

Instrukcja użytkowania
Fantom do nauki badania per rectum Mk 2

60120



*Więcej o naszych produktach
szkoleniowych na stronie:*

limbsandthings.com

Limbs & Things Ltd.

Sussex Street, St Philips

Bristol, BS2 0RA, UK

sales@limbsandthings.com

+44 (0) 117 311 0500

FANTOM DO NAUKI BADANIA PER RECTUM MK 2

Fantom, z realistycznie odtworzonymi poślądkami, odbytem i odbytnicą, umożliwi ćwiczenia w zakresie umiejętności diagnostycznych związanych z badaniem per rectum. W zestawie znajdują się dodatkowe krocza do nauki badania odbytu, z dwoma modułami zmian chorobowych odbytnicy.

Udoskonalenia

- Prostaty i moduły zmian chorobowych umieszczono bliżej odbytu, aby ułatwić badanie palpacyjne.
- Przemodelowane prostaty ze zmianami nowotworowymi mają bardziej realistyczny wygląd
- Ulepszono mechanizm blokujący prostat
- Kość ogonowa jest bardziej realistycznie uformowana

Umiejętności

- Badanie palpacyjne prostaty
- Badanie palpacyjne per rectum
- Wprowadzanie i stosowanie proktoskopu
- Komunikacja między pracownikiem medycznym i pacjentem

Właściwości

- Poślądkki, odbyt i odbytnica
- 2 wymienne krocza:
 - Prawidłowe, do badania prostaty
 - Chorobowe, z polipem i nowotworem
- 5 wymiennych prostat:
 - Prawidłowa
 - Obustronny łagodny przerost
 - Jednostronny łagodny przerost
 - Obustronny nowotwór
 - Jednostronny nowotwór - badanie
- Nowotwory prostaty wyczuwalne dotykiem
- W trakcie używania prostata jest ukryta, niewidoczna dla ćwiczącego
- Prostaty można łatwo i szybko wymieniać
- Wyczuwalna dotykiem kość krzyżowa
- Realistyczny dźwięk zwieracza

Zawartość zestawu

- **60122** Krocze fantomu do nauki badania per rectum Mk 2 - prawidłowe
- **60123** Krocze fantomu do nauki badania per rectum Mk 2 - chorobowe
- **60121** Prostaty fantomu do nauki badania per rectum Mk 2 (zestaw 5 modeli)
- Tubka żelu wodnego
- Podstawa
- Waliza

WAŻNE INFORMACJE

- Przed użyciem fantomu do nauki badania per rectum Mk 2 prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Niezastosowanie się do podanych tu zaleceń grozi uszkodzeniem produktu.
- Do fantomu należy używać wyłącznie środka smarującego na bazie wody, takiego jak dostarczony w zestawie. Stosowanie niezalecanych produktów może uszkodzić silikon lub zmniejszyć jego odporność.
- Skutkiem nieodpowiedniego smarowania może być rozerwanie lub inne uszkodzenie części silikonowych.
- Podczas pracy z urządzeniem wymagane jest noszenie rękawiczek. Wcześniej należy zdjąć z rąk biżuterię. Paznokcie, a także ostre krawędzie pierścionków mogą spowodować uszkodzenie silikonowych części.
- Po każdej sesji szkoleniowej należy zetrzeć środek smarujący ze wszystkich powierzchni. Użyć ciepłej wilgotnej szmatki lub chusteczek do pielęgnacji niemowląt. Zapobieganie odkładaniu się środka smarującego na produkcie pozwoli wydłużyć jego okres użytkowania.

KOMPONENTY



Pośladki



60122 - 60123 Krocze fantomu do nauki badania per rectum Mk 2



60121 Prostaty fantomu do nauki badania per rectum Mk 2 (zestaw 5 modeli)



Ramka



Płytką podstawy



Wspornik



Wkładka piankowa

WYMIANA PROSTATY

1



Aby odblokować prostatę, należy obrócić ją o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2



Zakładając prostatę, należy zwrócić uwagę na jej ułożenie (nazwa na prostacie powinna znajdować się na spodzie). Prostatę można włożyć w otwór w ramce tylko w jednym położeniu ze względu na różne rozmiary elementów wystających.



Aby wyjąć prostatę, wystarczy ją pociągnąć.



Włożyć prostatę i zablokować ją we właściwym położeniu, obracając o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

WYMIANA KROCZA

1



Ścisnąć koniec jelita grubego.

2



Nacisnąć i obrócić biały zacisk, aby zwolnić ramkę.

3




Przytrzymać jedną ręką białą piankę krocza. Wypchnąć krocze, naciskając je drugą ręką od tyłu.



Przełożyć koniec jelita grubego przez otwór w ramce.



Wyjąć ramkę.

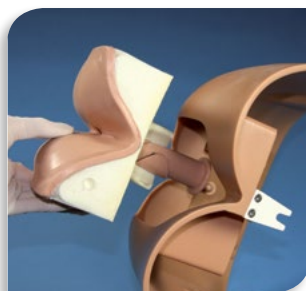

Wkładając z powrotem krocze, należy pamiętać o ułożeniu go we wskazany na ilustracji sposób.


ZMIANA POZYCJI BADANIA

1




Dostarczony fantom jest ustawiony w pozycji lewej bocznej.

2

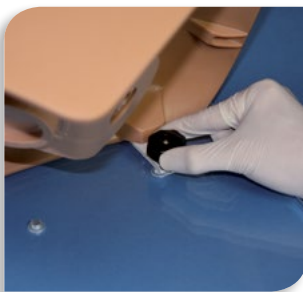

Poluzować oba czarne pokręta mocujące pośladki do płytki podstawy.

3

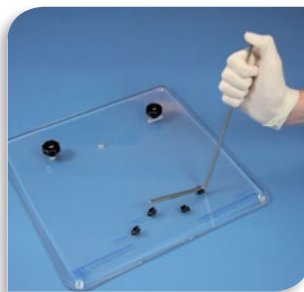

Wyjąć wspornik.



Aby zmienić ją na pozycję „pochyloną pacjenta”, należy najpierw zwolnić metalowy wspornik i ułożyć go płasko.



Odsunąć pośladki.




Odkręcić prawe czarne pokrętko.

4



Aby ułatwić demontaż, należy przytrzymać śrubkę od spodu płytki podstawy.

5

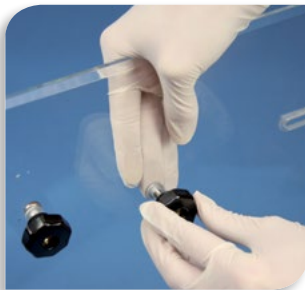


Przytrzymać śrubę i zamontować z powrotem czarne pokrętko

6



Ułożyć wspornik płasko.

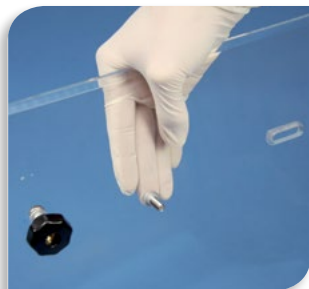

Umieścić śrubę w środkowym otworze płyty podstawy. (Drugie czarne pokrętko nie jest używane, ale powinno pozostać na swoim miejscu, żeby się nie zgubiło).



Wepchnąć wspornik w zaciski na płycie podstawy oznaczone „Position 2” .



Obróć model o 90°, tak aby krawędź z jednym tylko zaczepem znalazła się w jednej linii z płytką podstawy.

7



Zestawić odpowiednio zacpek z czarnym pokrętkiem.

8



Przymocować ponownie wspornik.



Nasunąć pośladki na płytkę podstawy tak, aby zacpek wystawał poza czarne pokrętko. Dokręcić pokrętko.



Model jest gotowy do użycia.

Więcej informacji na stronie:

limbsandthings.com