



*Wskazówki dla użytkownika*

## Fantom kliniczny kobiecej miednicy (CFPT) Mk 3 - wersja zaawansowana

Nr kat.: 60905



Nr kat.: 065-963

Wydanie 2, marzec 2011  
© 2014 Limbs & Things

*Więcej o naszych produktach  
szkoleniowych na stronie*  
**limbsandthings.com**

**Limbs & Things Ltd.**  
Sussex Street, St Philips  
Bristol, BS2 0RA, UK  
sales@limbsandthings.com  
+44 (0) 117 311 0500

# Fantom kliniczny kobiecej miednicy (CFPT) Mk 3 - wersja zaawansowana

Nr kat.: **60905**

Nowy fantom CFPT Mk 3 został zaprojektowany zgodnie z sugestiami klientów, z myślą o trzech głównych usprawnieniach:

- większa trwałość: nowe materiały wolniej się zużywają
- uproszczona konstrukcja: model można łatwo zdemontować, a moduły macicy szybko i łatwo wymienić (nie ma zacisków, ani śrub)
- większa różnorodność modułów: każdy z inną kombinacją odmian anatomicznych macicy i szyjki macicy oraz dodatkowych stanów patologicznych

Dokładne odwzorowanie miednicy kobiecej pod względem anatomicznym i wrażeń dotykowych umożliwia praktyczne badanie i rozpoznanie patologii i nieprawidłowości. Fantom można go stosować na różnych poziomach szkolenia studentów szkół medycznych, a także pracowników rodzinnej służby zdrowia.

## Umiejętności


- Znajomość anatomii krocza i miednicy, z uwzględnieniem cech charakterystycznych układu kostnego
- Badanie palpacyjne pochwy
- Badanie oburęczne
- Procedura badania cytologicznego (również z użyciem wziernika)
- Badanie palpacyjne per rectum

## Właściwości i udoskonalenia

- Dostępne są wymienne moduły macicy z różnymi powikłaniami (*na oddzielne zamówienie*)
- Szybka i łatwa wymiana modułów
- Każda macica jest przedstawiona pod prawidłowym anatomicznie kątem
- Szyjki są zgodnie z realiami bardziej uwydatnione
- Krocze i wargi sromowe wykonane z miękkiego w dotyku, solidnego tworzywa
- Bardziej realistycznie odtworzone, rozchylane wargi sromowe
- W każdym z modułów jest odbyt i jelito grube
- Warstwa tłuszczu na ścianie jamy brzusznej przydaje realizmu ćwiczeniom
- Szybka i łatwa wymiana ściany jamy brzusznej
- Uwzględnienie w modelu górnej partii ud ułatwia orientację w układzie anatomicznym
- Dołączony do zestawu środek smarujący na bazie wody pomaga w przeprowadzeniu badania i użyciu wziernika
- Środek smarujący łatwo usunąć z modułów
- Żaden z komponentów nie zawiera lateksu


## Zawartość zestawu

- 1 **CFPT Mk 3 - wersja standardowa** Nr kat.: **60900**
- 1 **CFPT – moduł 2** Nr kat.: **60921**
- 1 **CFPT – moduł 3** Nr kat.: **60922**
- 1 **CFPT – moduł 4** Nr kat.: **60923**
- 1 **CFPT – moduł 5** Nr kat.: **60924**
- 1 **CFPT – moduł 6** Nr kat.: **60925**
- 1 **CFPT – moduł 7** Nr kat.: **60926**

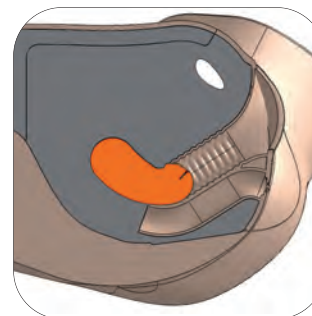


**CFPT – moduł 5:**  
**Tyłopochylenie - szyjka macicy wieloródki**

Nr kat.: **60924**

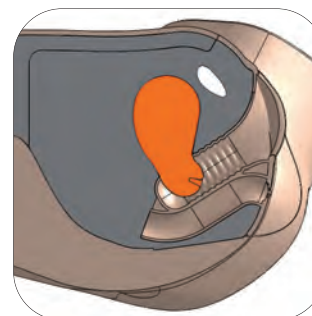

**CFPT – moduł 6:**  
**Ciężarna w 10-12 tygodniu**


Nr kat.: **60925**

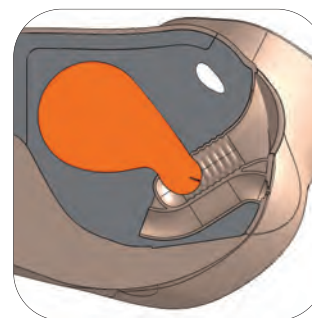

**CFPT – moduł 7:**  
**Ciężarna w 14-16 tygodniu**

Nr kat.: **60926**

## Wskazówki dot. modułów macicy CFPT:

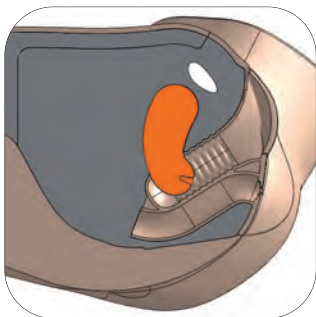


**CFPT – moduł 1:**  
**Budowa prawidłowa - szyjka macicy nieródki**

Nr kat.: 60920



**CFPT – moduł 2:**  
**Włókniakomięśniak duży - wywinięta szyjka macicy nieródki**

Nr kat.: 60921

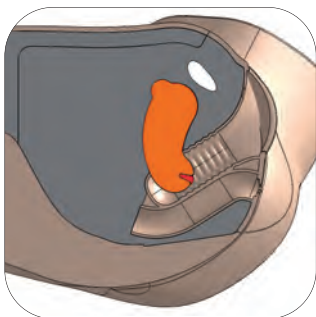

**CFPT – moduł 3:**  
**Włókniakomięśniak mały - szyjka macicy z polipem u nieródki**

Nr kat.: 60922



**CFPT – moduł 4:**  
**Torbiel jajnika - szyjka macicy wieloródki**


Nr kat.: 60923

## Komponenty




**CFPT – wkładka brzuszna**

Nr kat.: 60910

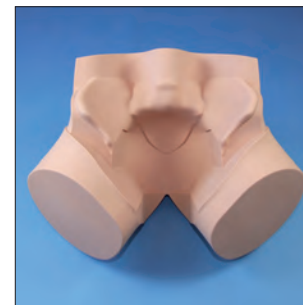

**Dolna część torsu**

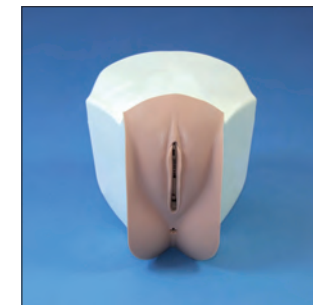

**CFPT – moduł 1**  
**CFPT – moduł 2**  
**CFPT – moduł 3**  
**CFPT – moduł 4**  
**CFPT – moduł 5**  
**CFPT – moduł 6**  
**CFPT – moduł 7**

Więcej informacji na temat modułów podano we Wskazówkach na odwrocie.



**Podstawka**

### WAŻNE!

Symulację badania palpacyjnego można wykonywać tylko przy prawidłowo zamocowanej części brzusznej.

Niezastosowanie się do tego wymogu może być przyczyną rozerwania pianki na górze modułu, a w konsekwencji spowodować unieważnienie gwarancji.



## Przygotowanie fantomu CFPT Mk 3

1



Umieścić podstawkę na powierzchni roboczej.


Ułożyć tors na podstawce

2




Sprawdzić, czy tors jest dosunięty do samej ścianki z tyłu podstawki.

Fantom jest gotowy do użycia.

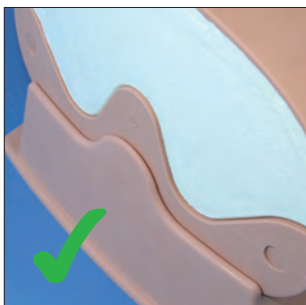

## Wymiana modułu macicy

1

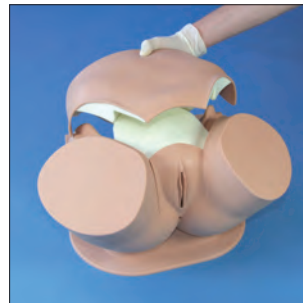


Wkładkę brzuszną najprościej wyjąć, podnosząc jej tylną część.



2



Unieść moduł, trzymając go obiema rękami (jedną przód, drugą tył).

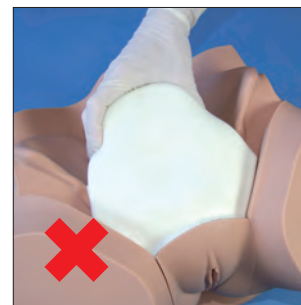

Niewskazane jest wyjmowanie modułu tylko jedną ręką: można w ten sposób wypaczyć wkładkę piankową i utrudnić wyjęcie modułu.

Ponowne umieszczenie modułu i wkładki polega na wykonaniu powyższych czynności w odwrotnej kolejności.