




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

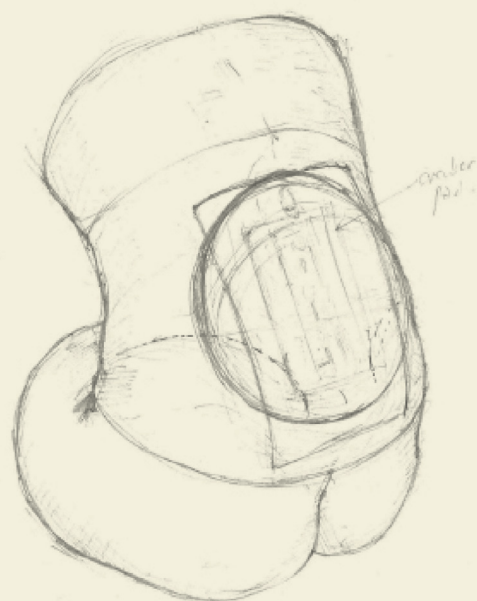

FANTOM DO NAUKI PUNKCJI LĘDŹWIOWEJ

61000

WIĘCEJ O NASZYCH PRODUKTACH SZKOLENIOWYCH NA STRONIE


limbsandthings.com

Sussex Street, St Philips, Bristol, BS2 0RA, UK | sales@limbsandthings.com | +44 (0) 117 311 0500

SKOROWIDZ

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	3
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	4
PRZYGOTOWANIE FANTOMU	5
• STATYW	5
• KASETA	7
• WKŁADKA SKÓRY	9
• OPONA TWARDA	10
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA	11

ZAPRASZAMY
DO OBEJRZENIA
FILMU

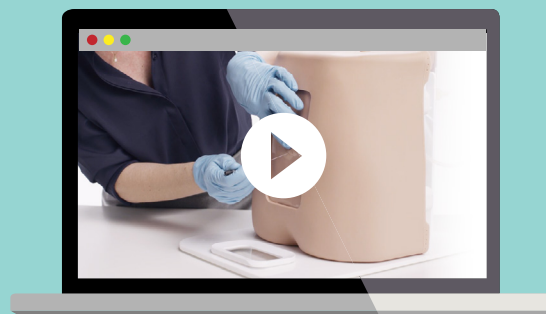

DOSTĘPNY NA STRONIE
limbsandthings.com

LUB NA KANALE YOUTUBE
youtube.com/limbsandthings

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE I PUNKCJA ŁĘDŹWIOWA - STATYW FANTOMU



ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE I PUNKCJA ŁĘDŹWIOWA - ZBIORNIK NA WODĘ



ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE I PUNKCJA ŁĘDŹWIOWA - TORS ZE SKÓRĄ TORSU

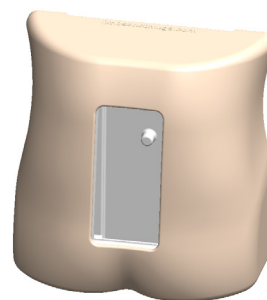

WKŁADKA DO PUNKCJI ŁĘDŹWIOWEJ - KOŚĆ

61010



WKŁADKA DO PUNKCJI ŁĘDŹWIOWEJ - TKANKA (2 szt.)

61011




ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE I PUNKCJA ŁĘDŹWIOWA - WKŁADKA SKÓRY

61015




ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE I PUNKCJA ŁĘDŹWIOWA - OPONA TWARDA (2 szt.)

61017

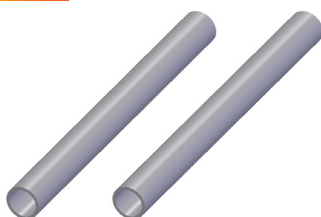


ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE I PUNKCJA ŁĘDŹWIOWA - KASETA WKŁADKI

61020

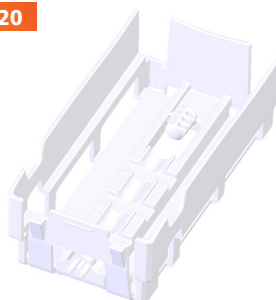

ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE I PUNKCJA ŁĘDŹWIOWA - WKŁADKA KRZYŻOWA

61021

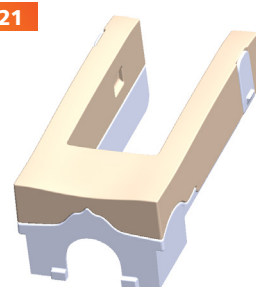

POTRZEBNE PRZYBORY (NIEDOSTARCZANE W ZESTAWIE)

IGŁY DO NAKŁUĆ ŁĘDŹWIOWYCH



MANOMETR



ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I CZYSZCZENIA

PRZED UŻYCIEM FANTOMU DO NAUKI ZNIECZULENIA
ZEWNĄTRZOPONOWEGO I PUNKCJI ŁĘDŹWIOWEJ NALEŻY
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI
BEZPIECZEŃSTWA

ZALECENIA



Należy stosować się do podanych zaleceń.
Instrukcję należy zachować.
Zwracać baczność uwagę na zamieszczone
ostrzeżenia.

Używać wyłącznie dodatków/akcesoriów
wskazanych przez firmę Limbs & Things.



Wszystkie czynności serwisowe należy zlecać
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
W przypadku uszkodzenia urządzenia wymagana
jest interwencja serwisu.

Odsączyć dokładnie wodę z produktu
i oczyścić go wilgotną miękką ściereczką
lub gąbką, używając tylko ciepłej wody
z łagodnym środkiem myjącym.



OSTRZEŻENIA



Nie instalować produktu w pobliżu źródeł
ciepła, nie wystawiać go na działanie płomieni
ani nie używać w pobliżu źródeł otwartego
ognia.

Nie wolno demontować produktu, ani
próbować naprawiać uszkodzone urządzenie.
W celu oceny i naprawy należy zwrócić produkt
do serwisu Limbs & Things.



Nie wolno udostępniać produktu
dzieciom.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT





Upewnić się, że produkty są odpowiednio
zapakowane i zabezpieczone podczas transportu
i przechowywania. Niewłaściwe zapakowanie
i zabezpieczenie grozi zapobiec obrażeniami ciała
lub uszkodzeniem produktu.



PRZYGOTOWANIE
DO UŻYCIA

STATYW


1

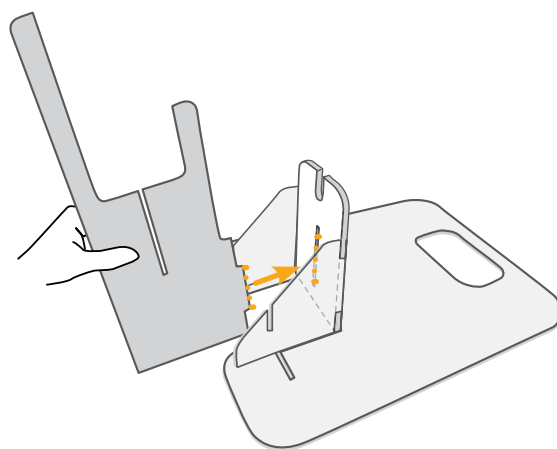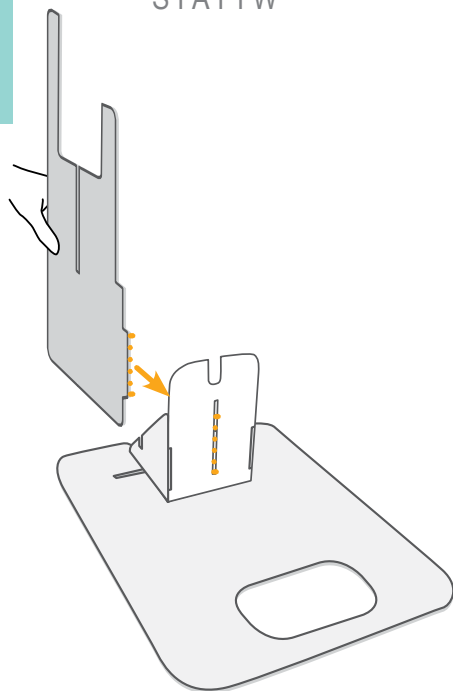


2

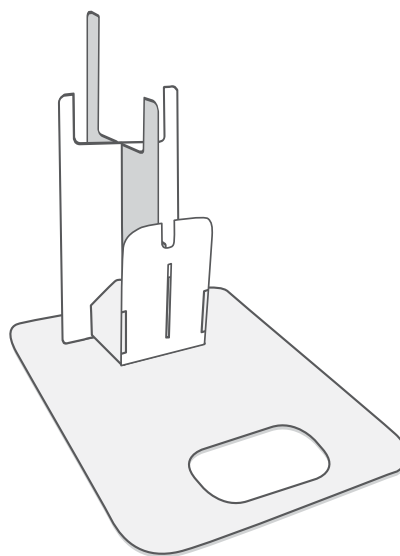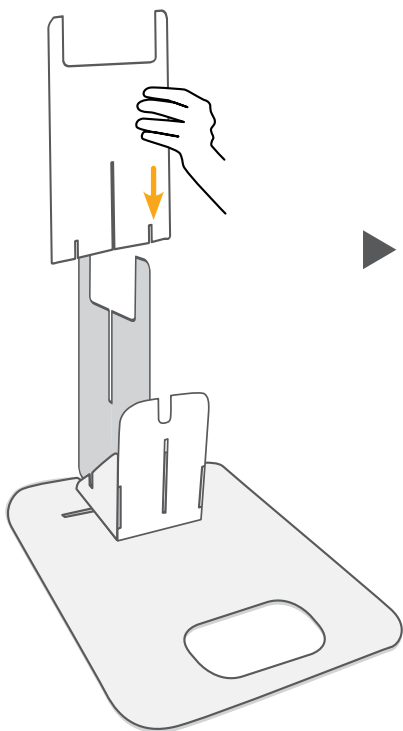


3

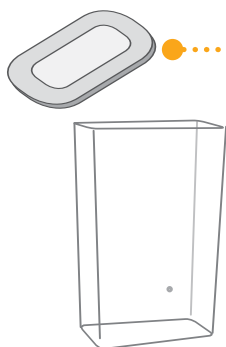


Użyć pokrywy jako tacki
ociekowej

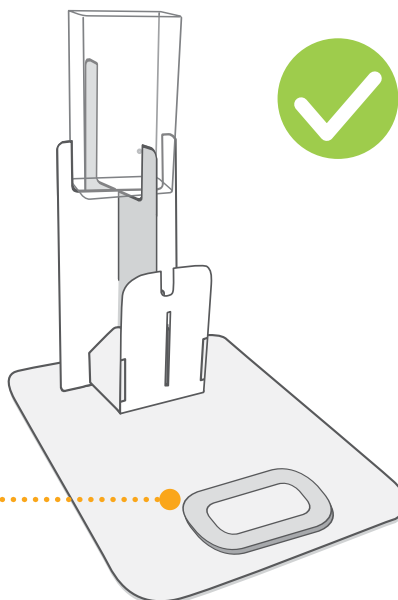

4


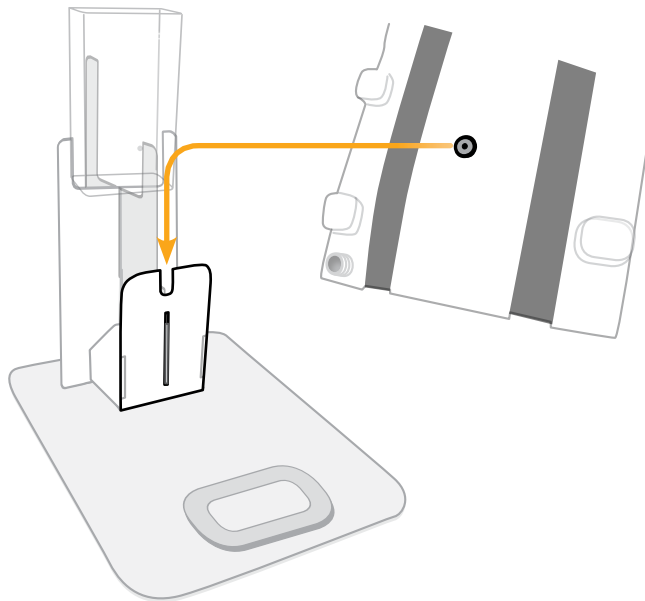


Zestawić odpowiednio tors ze statywem i szczeliną.

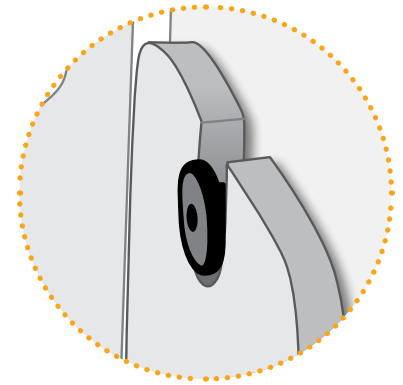

5



Tors można umieścić w pozycji pionowej lub lewej bocznej.

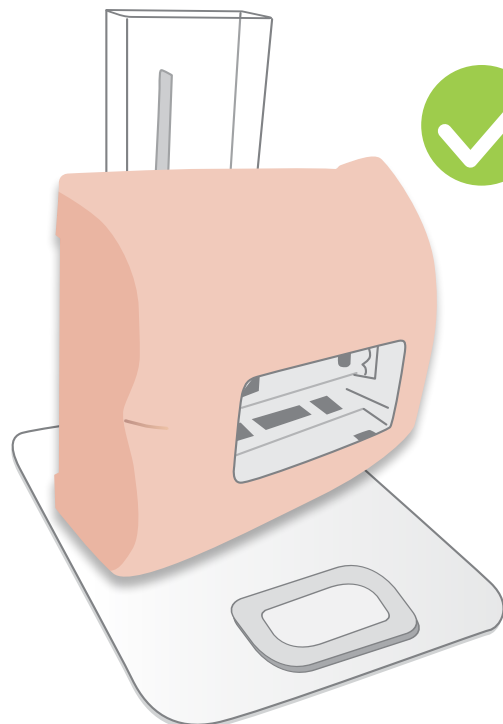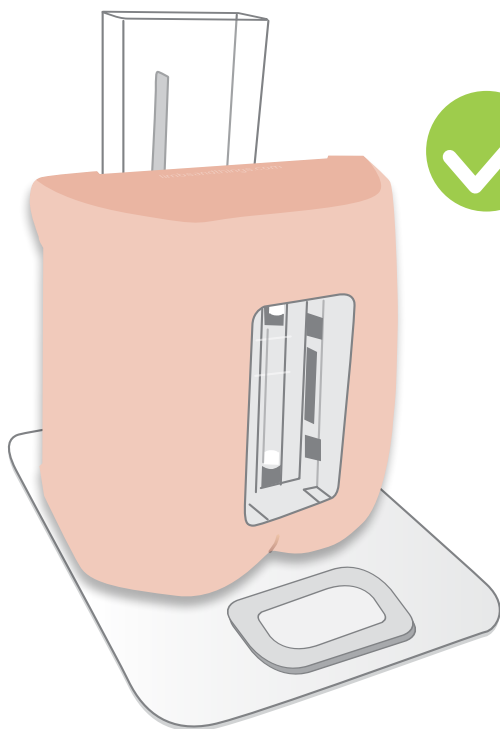

PRZYGOTOWANIE
DO UŻYCIA

KASETA

1

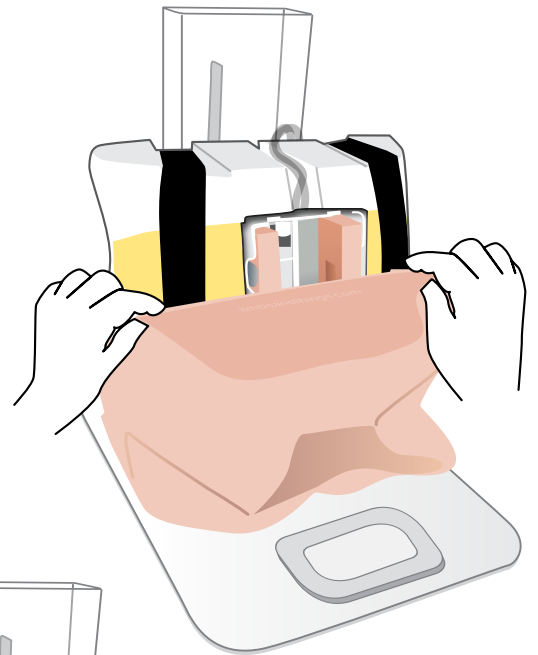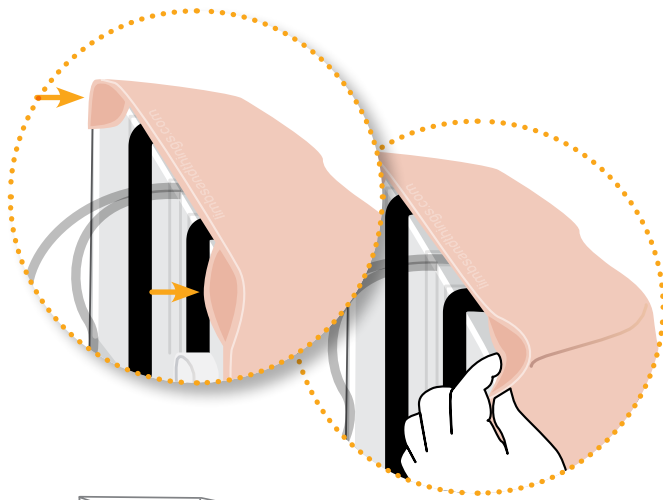

2





3




PRZYGOTOWANIE
DO UŻYCIA

KASETA

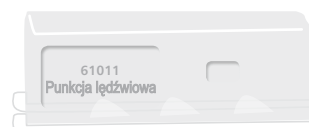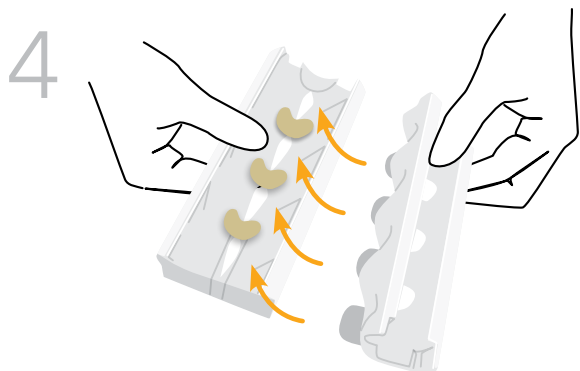

5

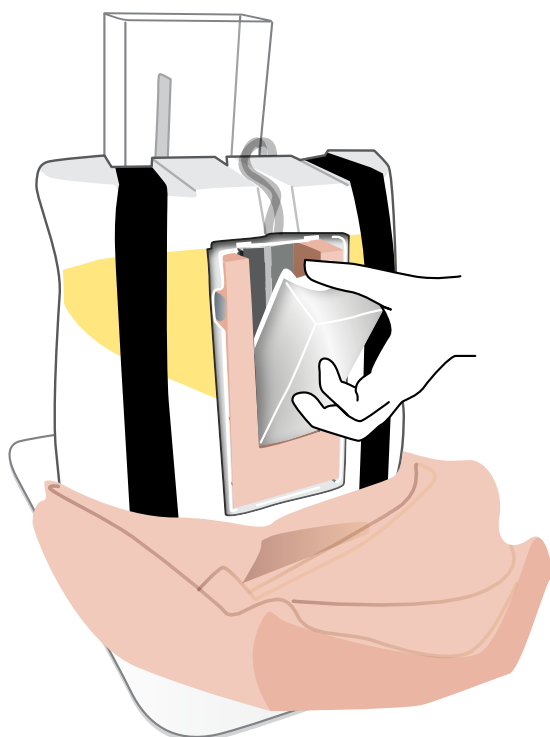


Najpierw należy mocować dolny koniec wkładki





PRZYGOTOWANIE
DO UŻYCIA

WKŁADKA SKÓRY

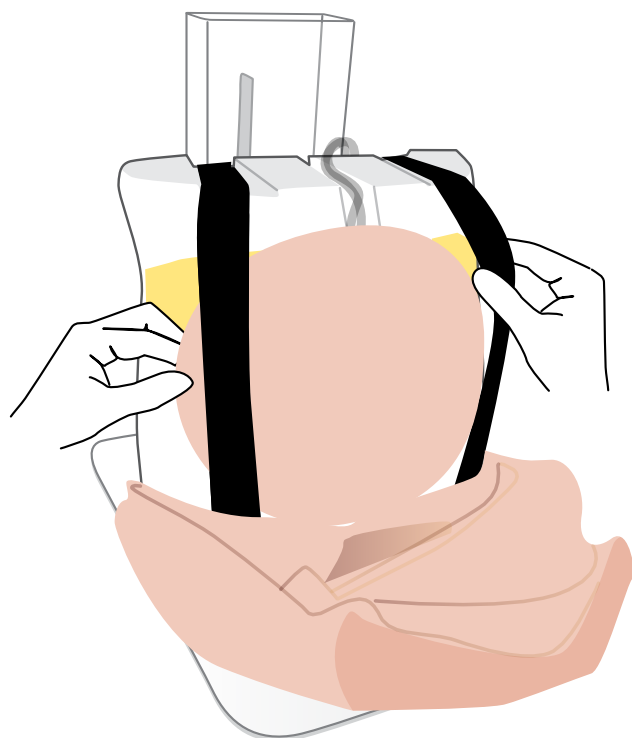



Obracanie wkładki skóry pozwala lepiej wykorzystać jej powierzchnię i zapobiega utwalaniu się śladów poprzednich nakłuć, wskazujących miejsce wstrzyknięć

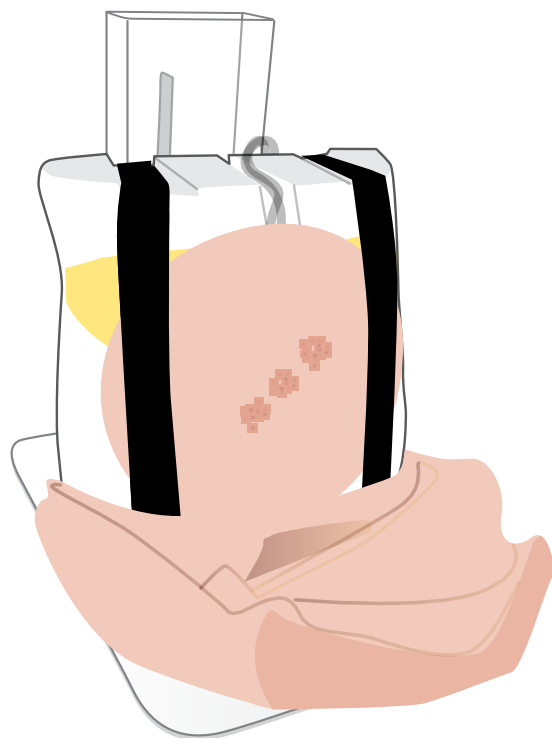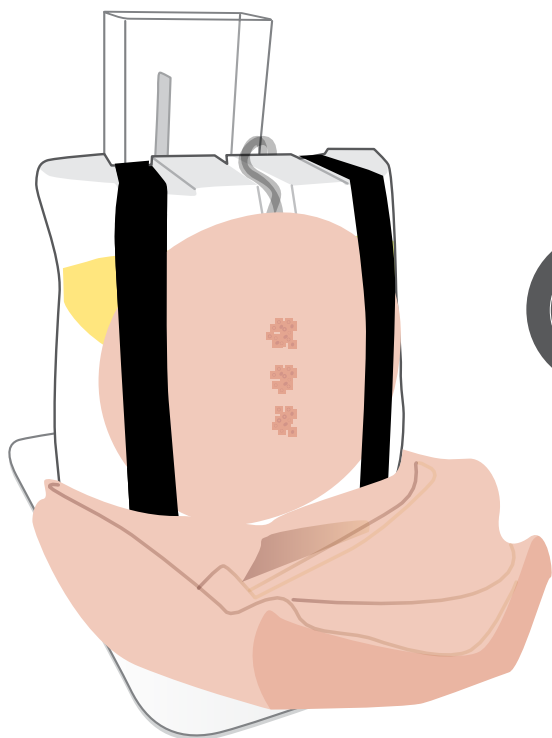


PRZYGOTOWANIE
DO UŻYCIA

OPONA TWARDA


1

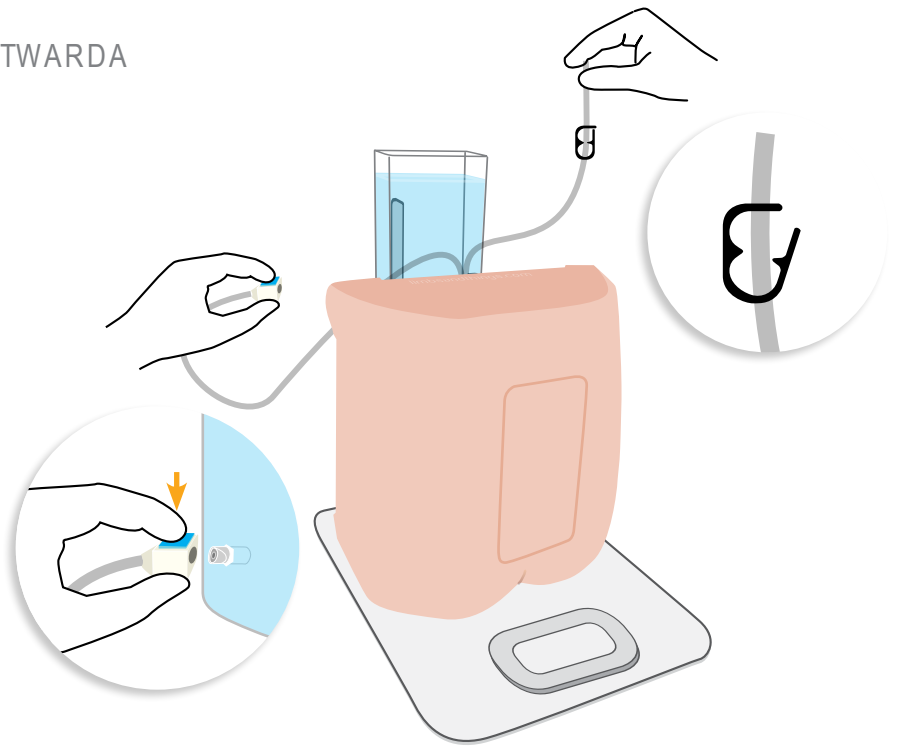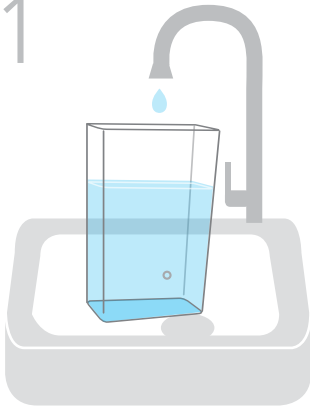

2

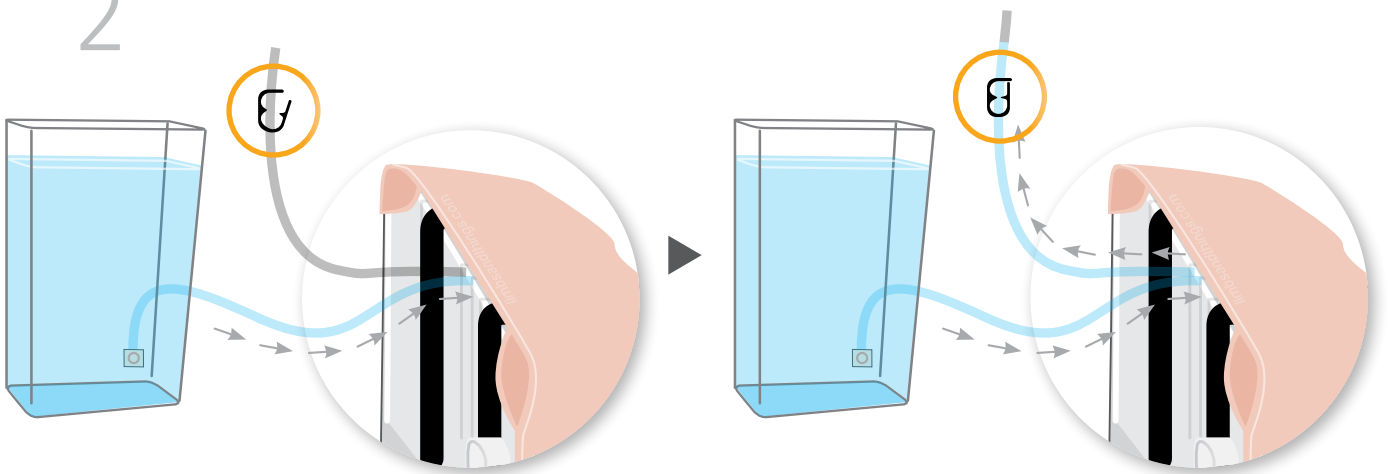


3

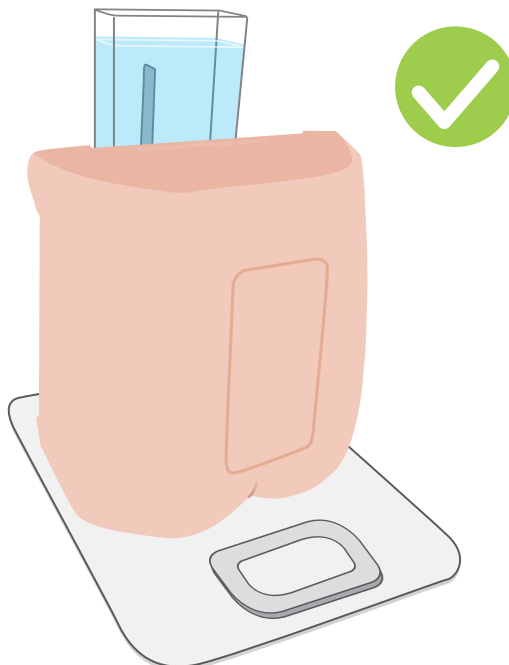


PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

1

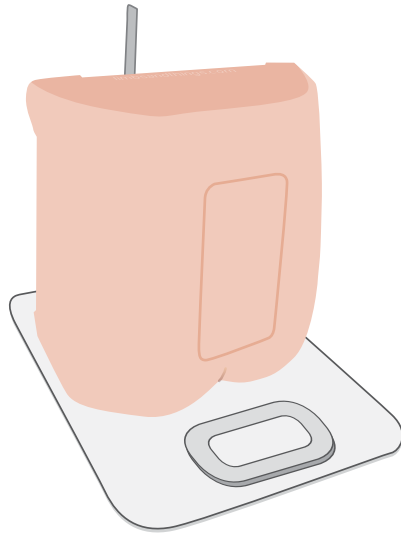






2

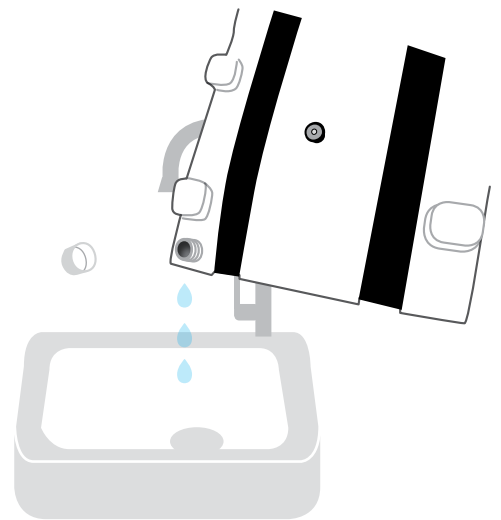

3



Osuszyć wszystkie części papierowym ręcznikiem

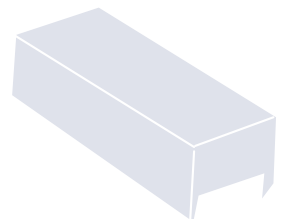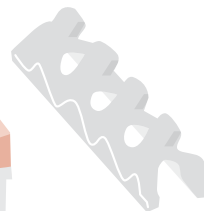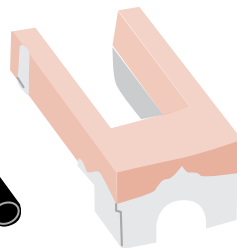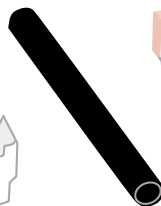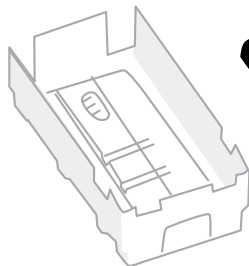

Ponownie zamontować wszystkie części po wyschnięciu

TO RÓWNIEŻ
MOŻE PAŃSTWA
ZAINTERESOWAĆ...

FANTOM DO NAUKI
ZNIECZULENIA
ZEWNĄTRZOPONOWEGO
I PUNKCJI LĘDŹWIOWEJ
- WERSJA
ZAAWANSOWANA

61001



FANTOM DO NAUKI
ZNIECZULENIA
ZEWNĄTRZOPONOWEGO
I PUNKCJI LĘDŹWIOWEJ
- WERSJA
ULTRADŹWIĘKOWA

61002

