



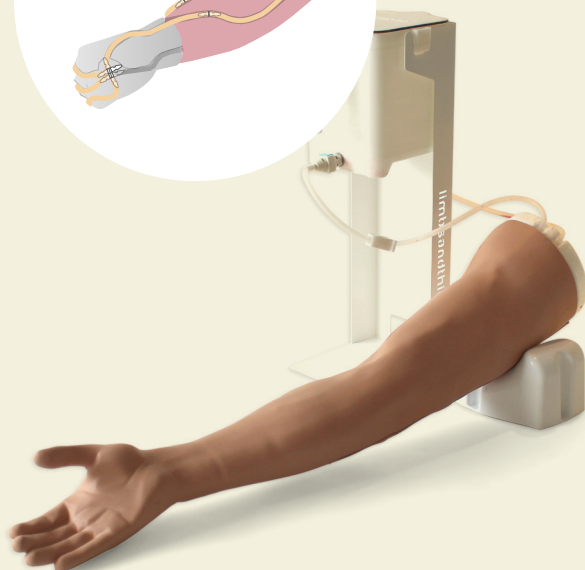

INSTRUKCJA OBSŁUGI

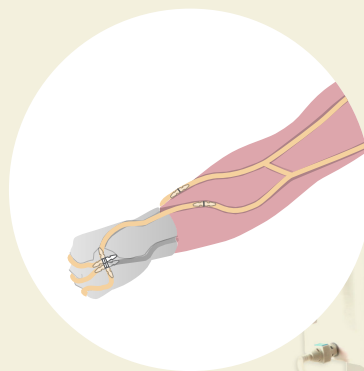

STANDARDOWA RĘKA DO NAUKI WENOPUNKCJI

Produkt dostępny jest w 2 tonacjach:
jasnej i ciemnej

70302

70303

WIĘCEJ INFORMACJI NA:

limbsandthings.com

SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	3
BEZPIECZEŃSTWO I CZYSZCZENIE	4
KONFIGURACJA	5
• NAPEŁNIANIE UKŁADU PODAWANIA KRWI	5
• PODŁĄCZENIE RĘKI DO UKŁADU PODAWANIA KRWI	6
• OPRÓŻNIANIE UKŁADU I ŻYŁ	7
• ZDJĘCIE/ZAŁOŻENIE SKÓRY	8
• WYMIANA ŻYŁ	10
KONSERWACJA	11
• CZYSZCZENIE ŻYŁ	11
• PRZECHOWYWANIE	11

ZOBACZ
NAGRANIE



ODWIEDŹ
limbsandthings.com
LUB KANAŁ YOUTUBE
youtube.com/limbsandthings

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Ręka do nauki wenopunkcji



Skóra

70312 70311




Grawitacyjny
układ podawania
krwi

70316



Żyły odpromieniowa, odłokciowa
i pośrodkowa łokcia

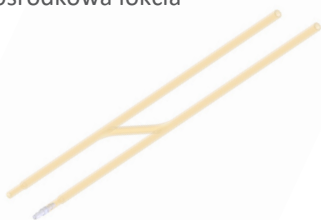


Żyły grzbietowe śródrecza



Podstawka pod rękę

00302

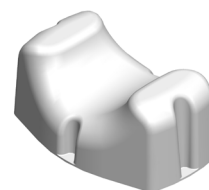


Szasetki z lubrykantem (x3)



Koncentrat sztucznej krwi żyłnej

00020

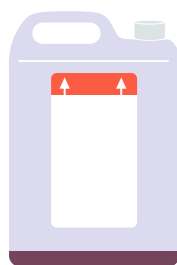

Rurka infuzyjna

00335



Taśma



BEZPIECZEŃSTWO I CZYSZCZENIE

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZED UŻYCIEM RĘKI NA NAUKI WENOPUNKCJI

DOZWOLONE



Postępuj zgodnie z instrukcją.
Zachowaj instrukcję.
Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.

Należy używać wyłącznie sztucznej
kroci dostarczonej z produktem.
Stosowanie innych płynów może
osłabić lub uszkodzić symulator.



Zawsze noś rękawiczki i zdejmij biżuterię.
Ostre powierzchnie, takie jak paznokcie i
pierścionki, mogą uszkodzić części
silikonowe.

Stosować wyłącznie lubrykant
na bazie wody.



Po każdym treningu czyść produkt
wilgotną, miękką szmatką lub gąbką,
używając tylko ciepłej wody z dodatkiem
łagodnego detergentu.

NIEDOZWOLONE



Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła,
nie wystawiaj na działanie płomieni
ani nie używaj w pobliżu ognia.
Nie używaj łatwopalnych rozpuszczalników
w pobliżu lub na tym produkcie.

Nie ustawiaj produktu w pobliżu
urządzeń elektrycznych lub
przedmiotów uszkodzonych
przez wodę.



Nie noś żadnej biżuterii.

Nie należy demontować produktu ani
podejmować prób naprawy
uszkodzonego urządzenia. W celu
oceny i naprawy należy zwrócić
produkt do firmy Limbs & Things.



Nie pozostawiaj produktu wypełnionego
kroci podczas przechowywania.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT



Zawsze upewnij się, że produkty są
odpowiednio zapakowane
i zabezpieczone podczas transportu
i przechowywania. Pozwoli to zapobiec
obrażeniom ciała lub uszkodzeniu produktu.





ŻYŁY ZAWIERAJĄ LATEKS


KONFIGURACJA

NAPEŁNIANIE UKŁADU PODAWANIA KRWI

Umieść pojemnik na stojaku

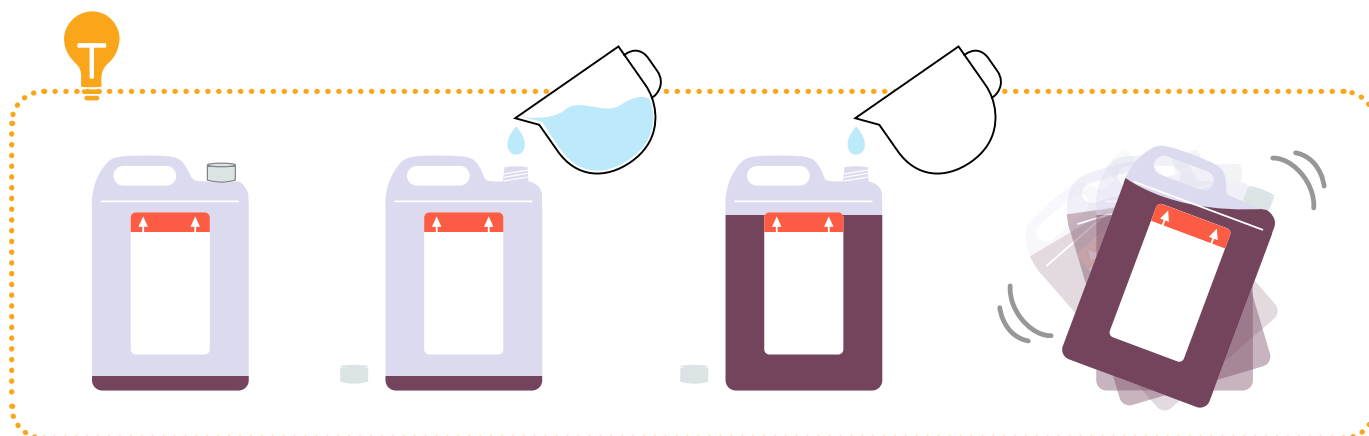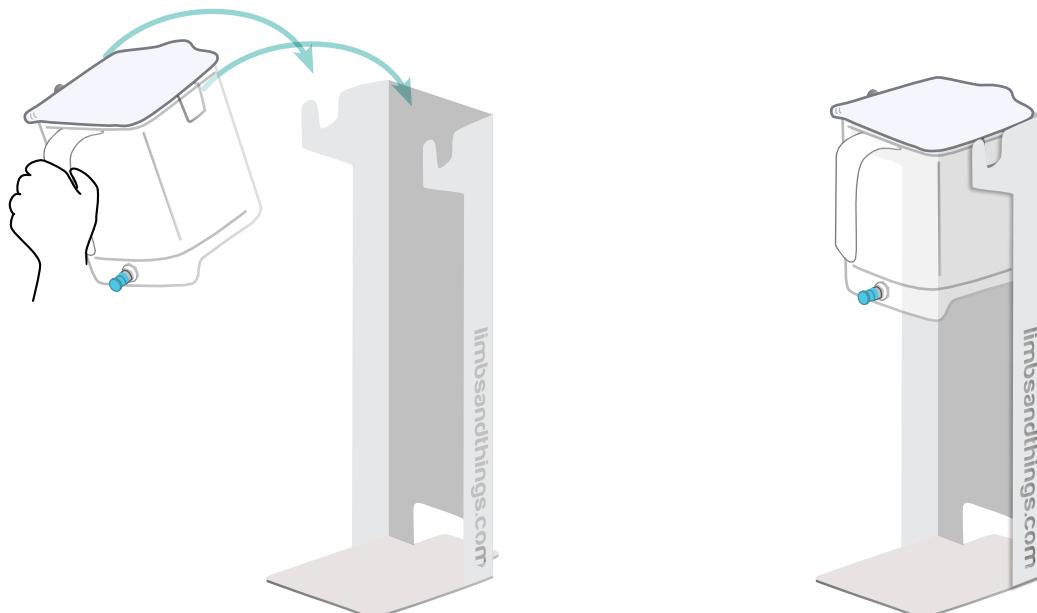

napętnij pojemnik



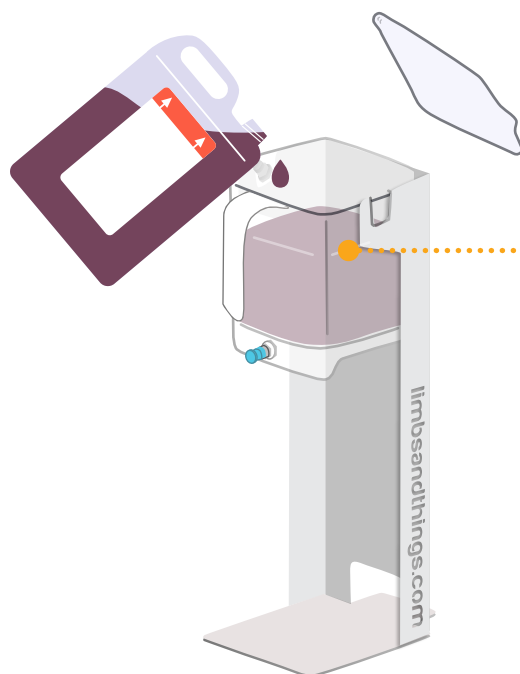


Wlej około 1 - 1,5 litra

KONFIGURACJA

PODŁĄCZENIE RĘKI DO UKŁADU PODAWANIA KRWI

Podłącz rurki do systemu grawitacyjnego

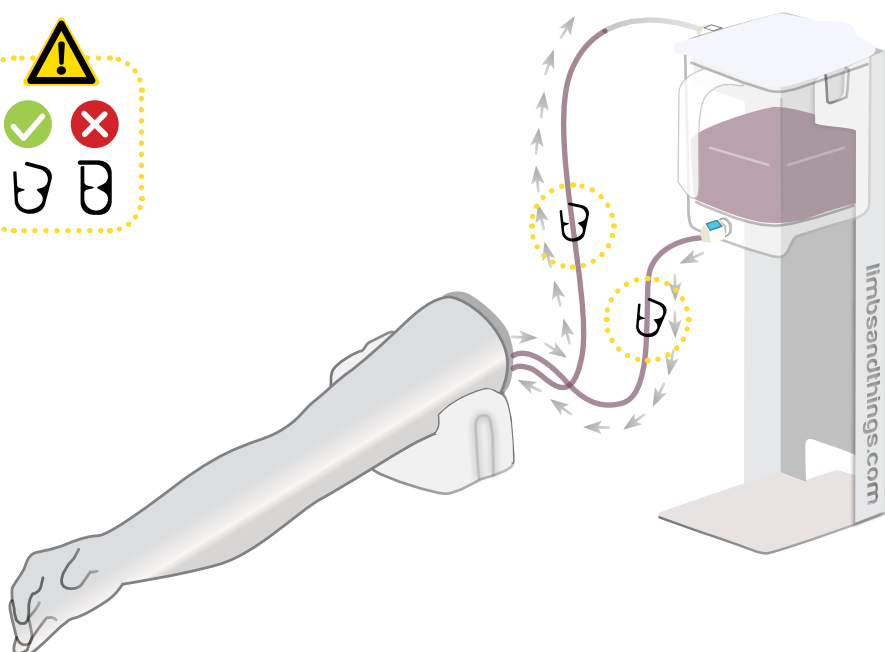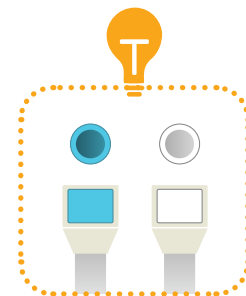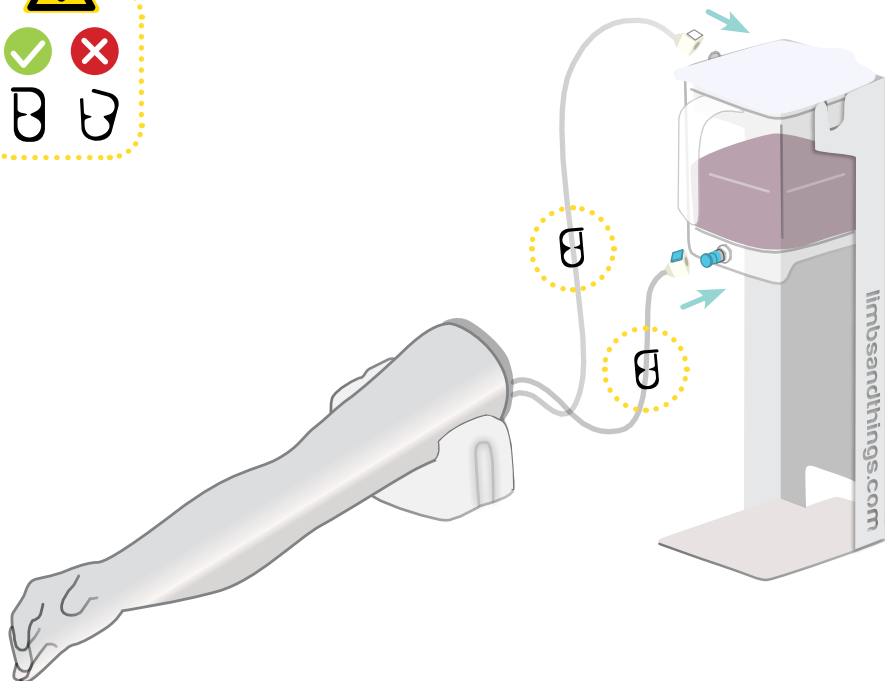


Ramię jest gotowe do użytku


KONFIGURACJA

OPRÓŻNIANIE UKŁADU PODAWANIA KRWI I ŻYŁ


Odłącz niebieską rurkę
i podłącz ją do rurki infuzyjnej

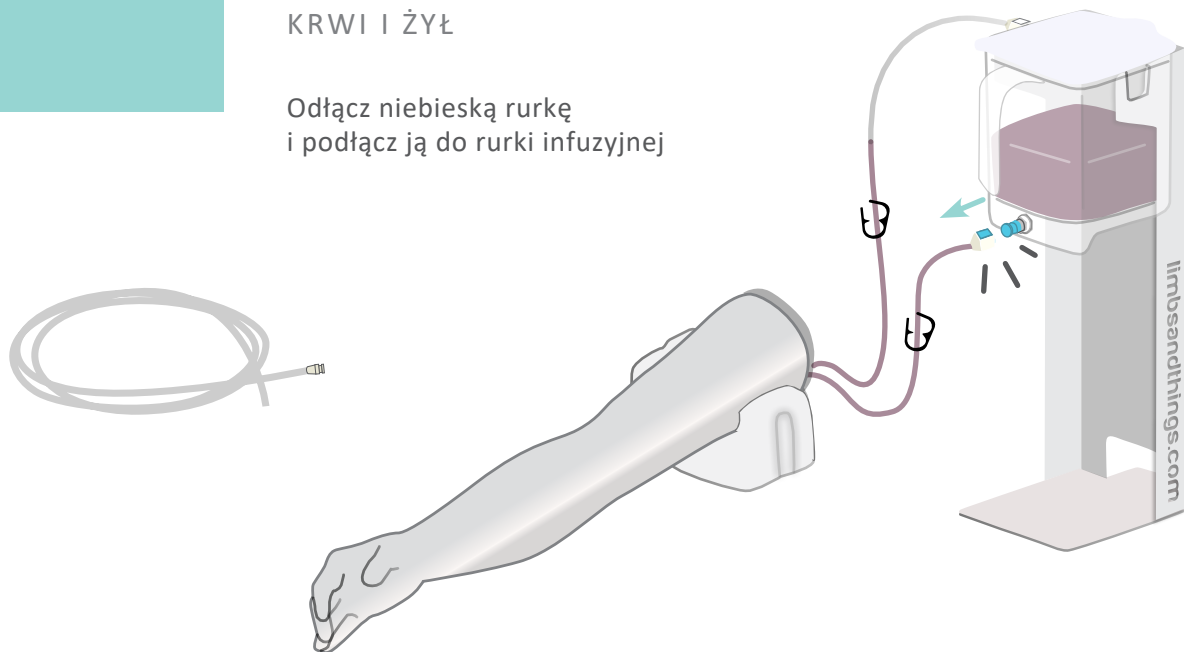


Usuń całą krew z przezroczystego
przewodu. Pozostała krew spowoduje
spowolnienie wypełniania modelu
przy następnym użyciu.

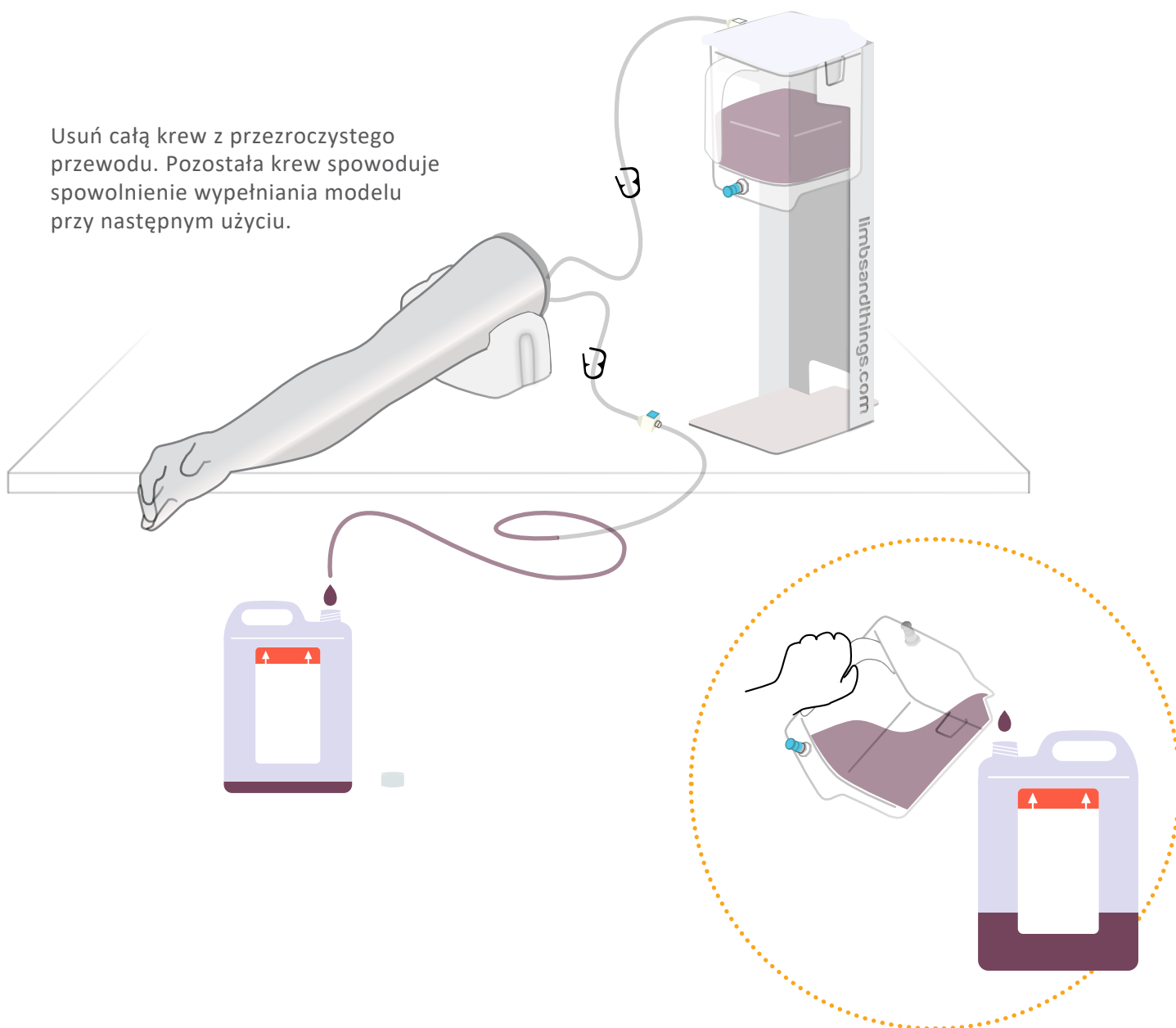





Ściąganie

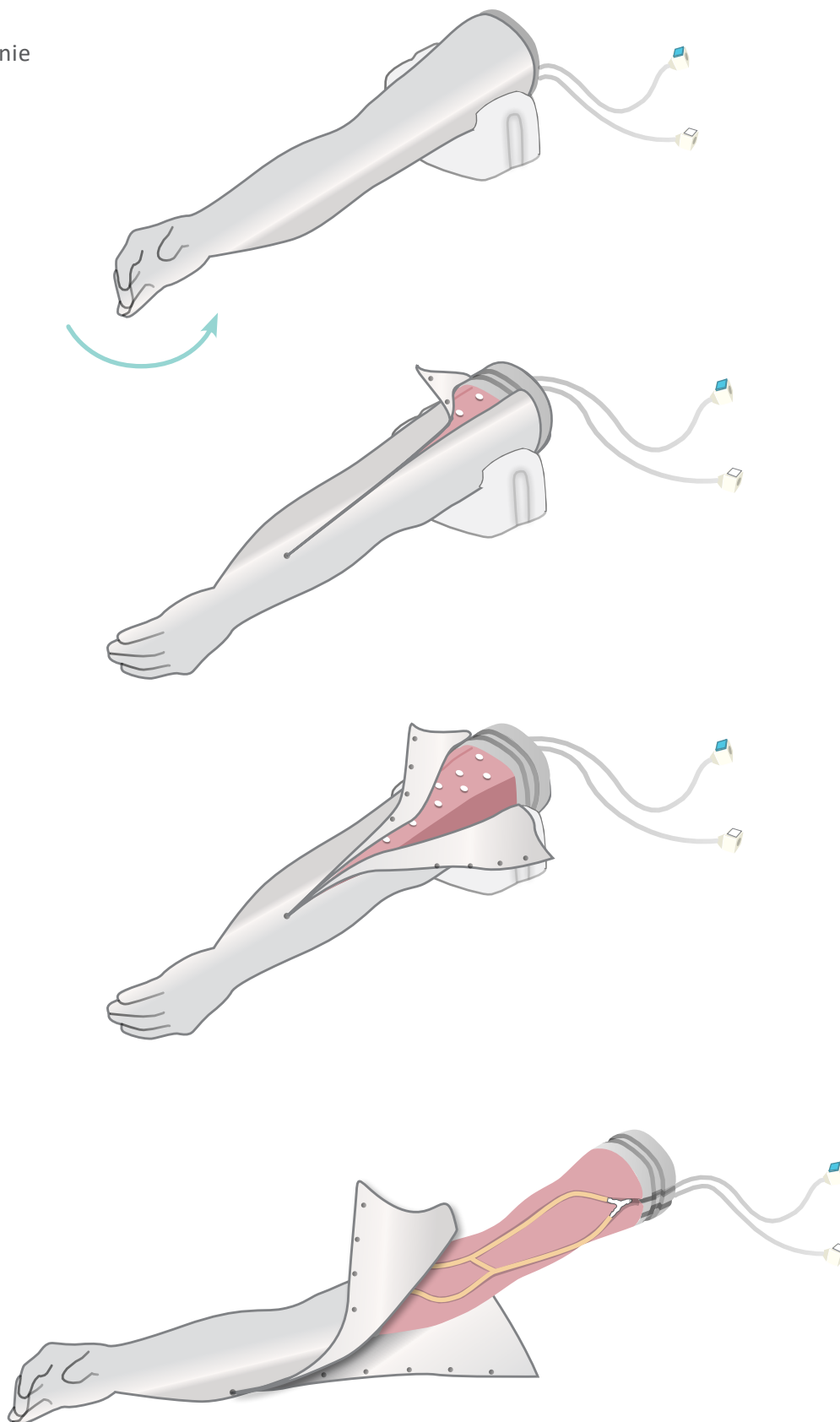


ZAKŁADANIE

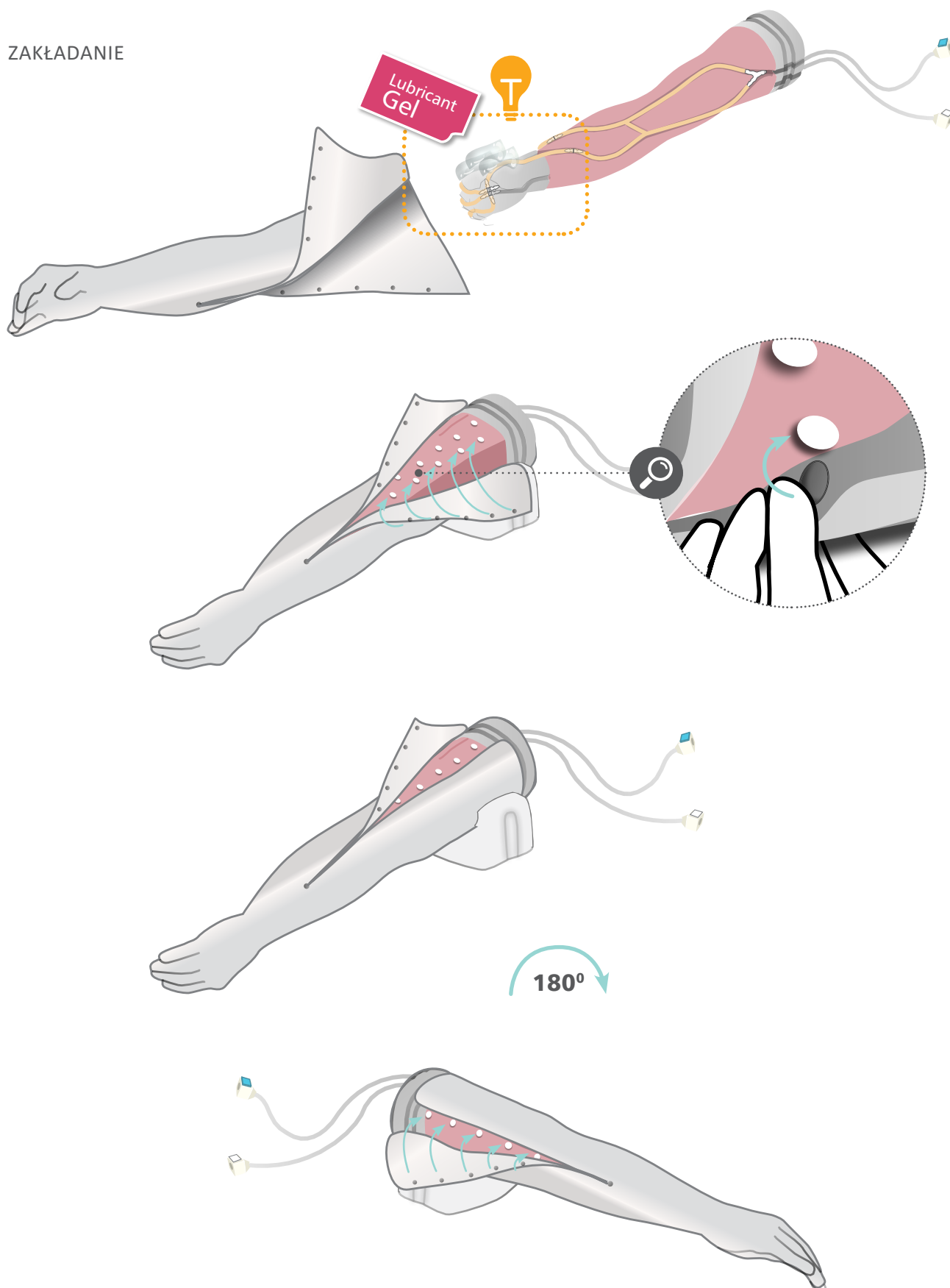

Rozłącz

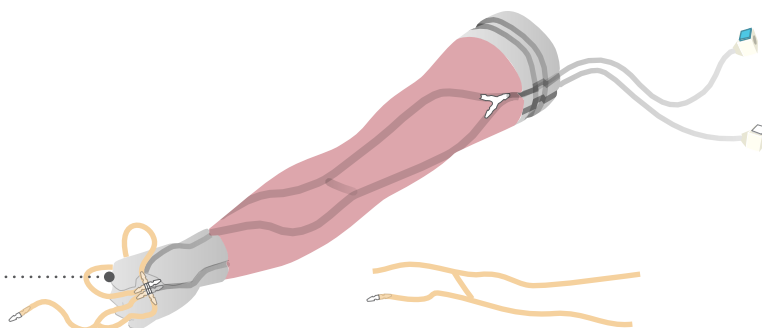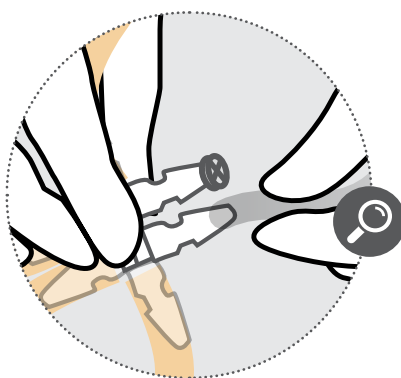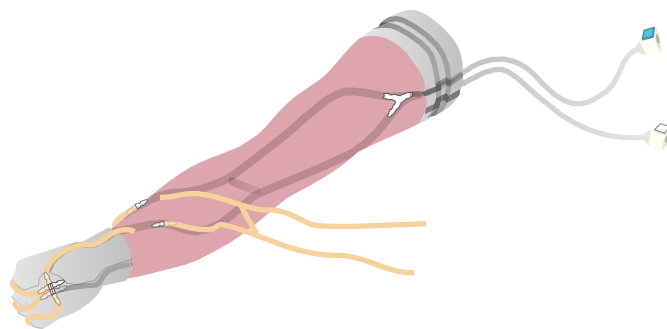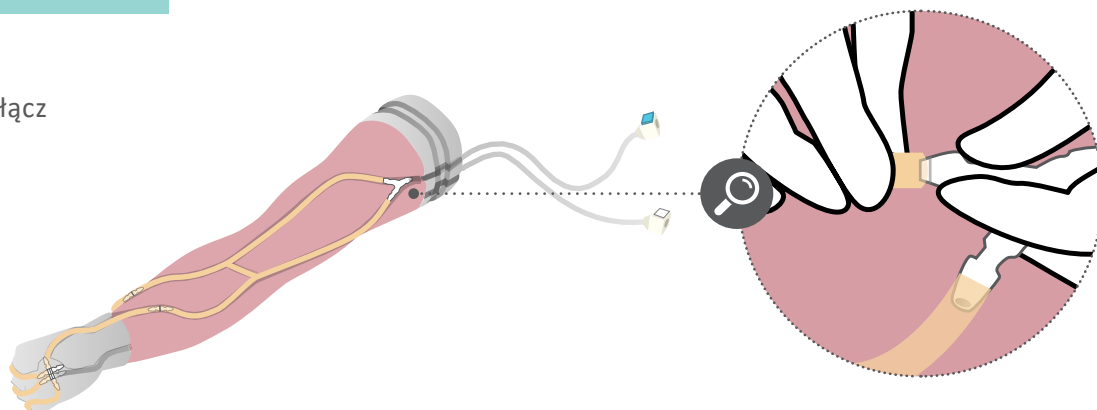


Podłącz nowe żyły

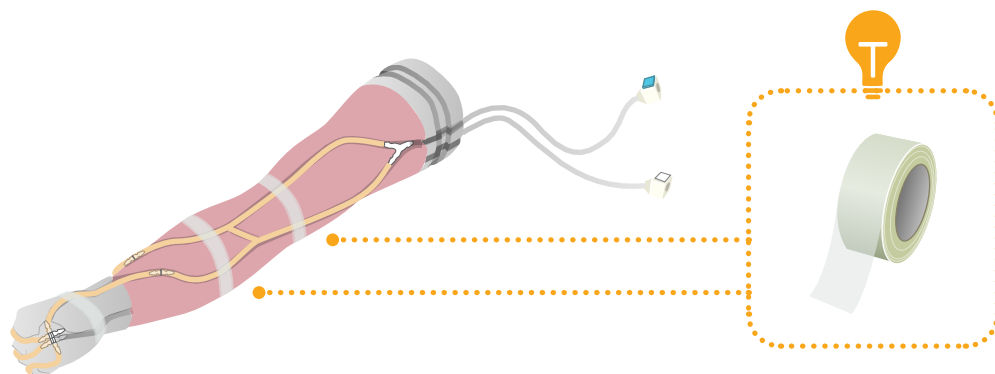

KONSERWACJA

CZYSZCZENIE ŻYŁ


Dokładne czyszczenie

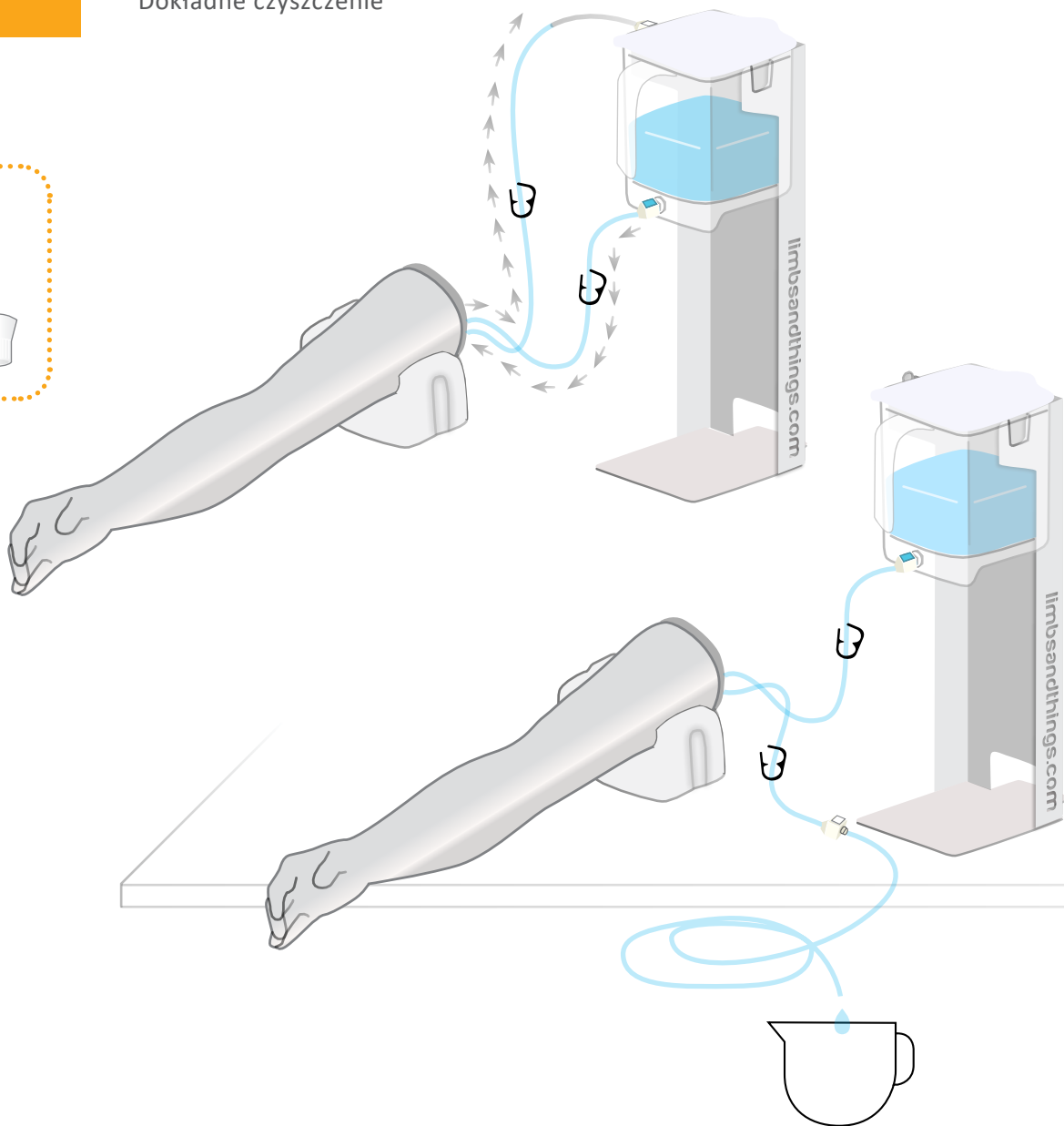

PRZECHOWYWANIE

Przed przechowywaniem wyczyść produkt wilgotną miękką szmatką lub gąbką, używając tylko ciepłej wody z łagodnym detergentem.

Przed przechowywaniem / transportem upewnij się, że układ podawania krwi i żyły zostały opróżnione

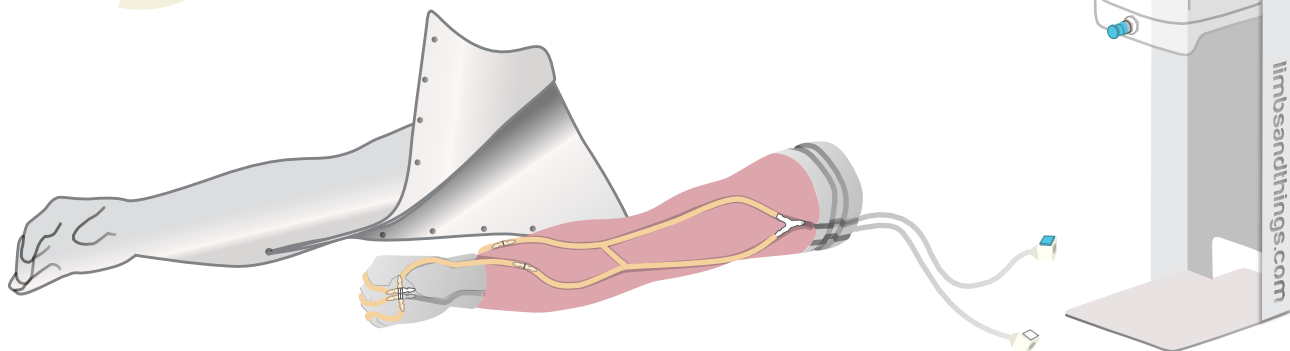

MOŻE CIĘ
RÓWNIEŻ
ZAINTERESOWAĆ

...

AKCESORIA I MATERIAŁY ZUŻYWALNE:


Żyła odpromieniowa, odłokciowa
i pośrodkowa łokcia (x2)

70306



Żyła grzbietowa śródreżcza (x2)

70307

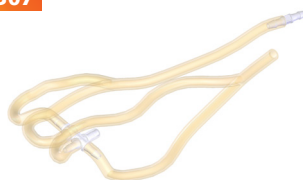

Podstawowe żyły do ręki
do nauki wenopunkcji

70309



Podstawowe żyły -
nie zawierają lateksu

70310



Lubrykant firmy
Limbs&Things

60869



Torba na model ręki

00301

