

Nr artykułu: **80060**



Ten wyjątkowy fantom, będący dokładną imitacją palca u nogi w stanie zapalnym, umożliwia ćwiczenie takich zabiegów, jak wycięcie klinowe, nakładanie klamry i całkowita ablacja łożyska paznokcia.

Umiejętności

- Techniki klamer
- Stosowanie tamponady
- Wycięcie klinowe
- Techniki fenolizacji
- Ablacja łożyska paznokcia

Zalety


- Oplacalność: 3 końce palców w zestawie
- Na każdym końcu palca można wykonać 2 zabiegi wycięcia klinowego
- Końce palców można wymienić w kilka sekund

Zawartość opakowania

- 1 podstawka do palców **80071**
- 3 końce palców **80070**


Zamocowanie

1

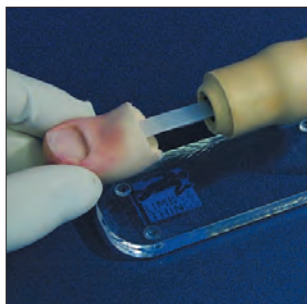


Przewlec przytwierdzony do palca elastyczny plastikowy pasek przez szczelinę z przodu trzpienia umocowanego na podstawce.

2

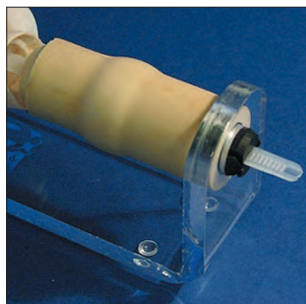

Pasek z tworzywa sztucznego przepchnąć przez całą długość trzpienia tak, by jego koniec pojawił się z drugiej strony trzpienia.


3

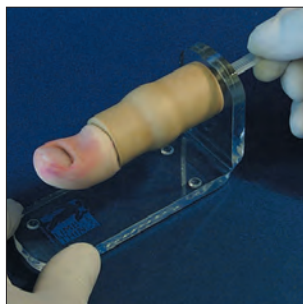

Chwycić koniec paska i ciągnąć powoli do momentu, aż koniec palca będzie przylegać dokładnie do przedniej części trzpienia. Po tej czynności podstawka z palcem jest gotowa do użycia.

Zdjęcie

1

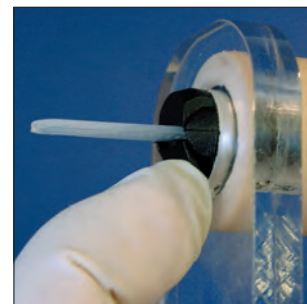

Wcisnąć zacisk z tyłu trzpienia, pod plastikowym paskiem i ciągnąć delikatnie za koniec palca, odłączyć go od trzpienia.

Pielęgnacja wyrobów z pianki lateksowej:

Pianka lateksowa jest produktem naturalnym. Przechowywać w miejscu zacienionym i w szczelnym opakowaniu, aby zmniejszyć narażenie na działanie ozonu. Gaz ten jest wytwarzany przez niektóre urządzenia elektryczne, m. in. telefony i komputery.

Przed dotknięciem pianki umyć ręce (pianka dotykana rękami, które wcześniej miały kontakt z niektórymi metalami, np. miedzią, staje się żółta i wyblakła).

Piankę można skutecznie umyć, używając dowolnego mydła. Po umyciu – opłukać. Bardzo skutecznym mydłem jest „Vanish”™.

Nie wolno połykać produktu. Po kontakcie z produktem należy stosować się do zwykłych zasad higieny.