



INSTRUKCJA OBSŁUGI



CaRE (TRENAŻER DO BADANIA FIZYKALNEGO)

Ten produkt jest dostępny w jasnych i ciemnych odcieniach skóry.

91000

91100

WIĘCEJ PRODUKTÓW DO SZKOLENIA UMIEJĘTNOŚCI


limbsandthings.com

Sussex Street, St Philips, Bristol, BS2 0RA, UK | sales@limbsandthings.com | +44 (0) 117 311 0500

INDEKS

ELEMENTY ZESTAWU	3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I CZYSZCZENIE	4
KONFIGURACJA	6
• KONFIGURACJA TRENAŻERA	6
• WŁĄCZANIE TRENAŻERA	7
• POŁĄCZENIE TRENAŻERA	8
• LimbPAD	10
• ŁADOWANIE	11
• USUWANIE/WYMIANA AKUMULATORA	12
• MOCOWANIE TRENAŻERA DO PODSTAWY	13
• MOCOWANIE MODUŁU PIERSI	14
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE	15


ZOBACZ NASZ FILM

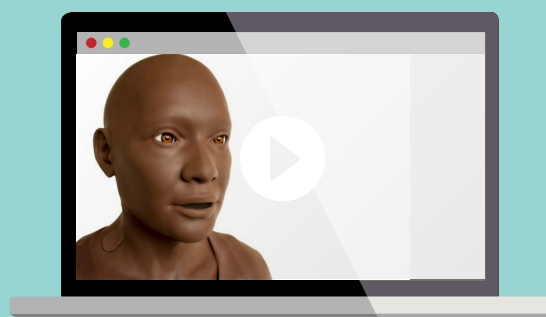

ODWIEDŹ STRONĘ
limbsandthings.com
LUB KANAŁ NA YOUTUBE
youtube.com/limbsandthings

ELEMENTY ZESTAWU

CaRE Tors
(x1)

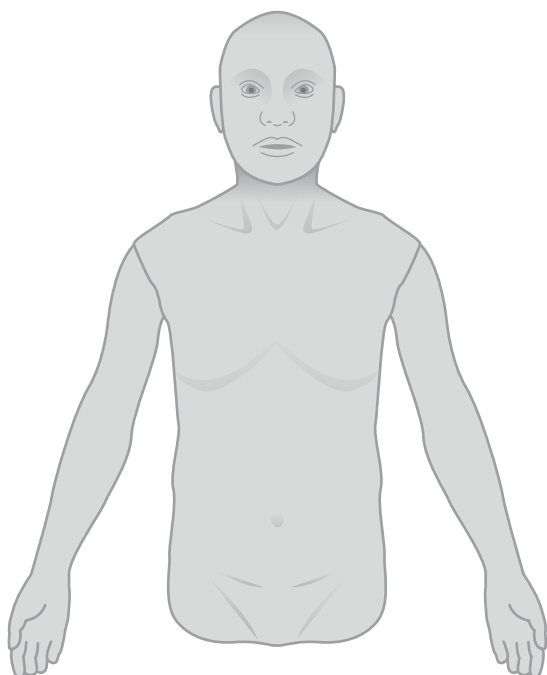


CaRE Moduł piersi
(x1)

91002 91102



CaRE Podstawa (x1)

91003

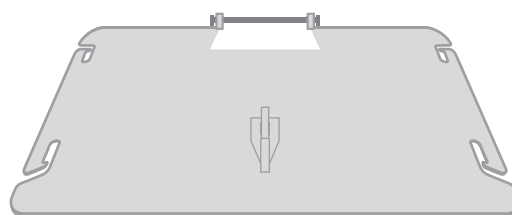


LimbPAD (x1)

91001



Ładowarka DC (x1)

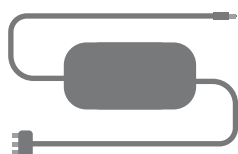

Kabel USB-C (x1)



CaRE Akumulator (x1)



CaRE Pasy mocujące do podstawy (2 sztuki)

91004



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I CZYSZCZENIE

PRZED UŻYCIEM TRENAŻERA DO BADANIA
FIZYKALNEGO NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
INSTRUKCJĘ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

NALEŻY



Postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Zachować niniejszą instrukcję. Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.

Używać wyłącznie akcesoriów/
dodatków zalecanych przez
Limbs & Things.



Jeśli produkt jest uszkodzony lub zużyty, należy go naprawić w serwisie Limbs & Things. W tym celu skontaktuj się z punktem sprzedaży, który poda kosztorys naprawy.

Do czyszczenia produktu należy używać wilgotnych chusteczek. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu.



NIE WOLNO




Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, nie wystawiać produktu na działanie płomieni ani nie używać w pobliżu źródeł otwartego ognia. Nie używać łatwopalnych rozpuszczalników w pobliżu lub na tym produkcie.

Trzymaj produkt z dala od wody



Nie należy rozmontowywać produktu ani próbować naprawiać uszkodzonego urządzenia. Prosimy o zwrot produktu do serwisu Limbs & Things w celu oceny i naprawy.

Używać tego modelu wyłącznie z dołączoną ładowarką.

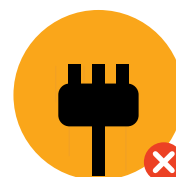

OSTRZEŻENIA

UWAGA: W przypadku wymiany akumulatora na akumulator innego typu istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.

UWAGA: Nie używać tego produktu, jeśli jest uszkodzony lub spadł np. ze stołu. Używanie uszkodzonego produktu może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i wpływać na jego działanie.



POLE MAGNETYCZNE.
Może być szkodliwe dla osób z rozrusznikiem serca. Osoby z rozrusznikiem serca powinny zachować odległość 10 cm.



Należy zawsze upewnić się, że produkty są odpowiednio zapakowane i zabezpieczone podczas transportu i przechowywania, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu produktu.

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA TRENAŻERA






Przed użyciem sprawdź dostępność najnowszych aktualizacji oprogramowania. Przejdź na stronę: www.limbsandthings.com/care-update




Umieść podstawę CaRE na płaskiej powierzchni.

Położ trenażer na wznak i włóż akumulator w dolnej jego części.

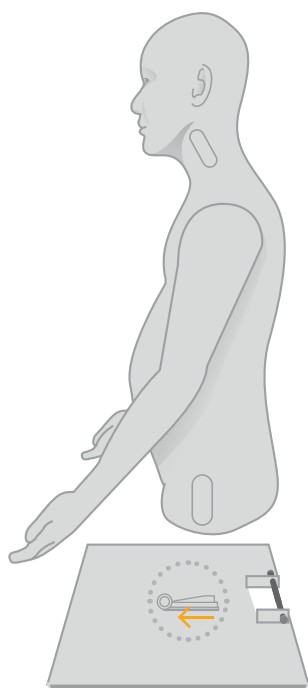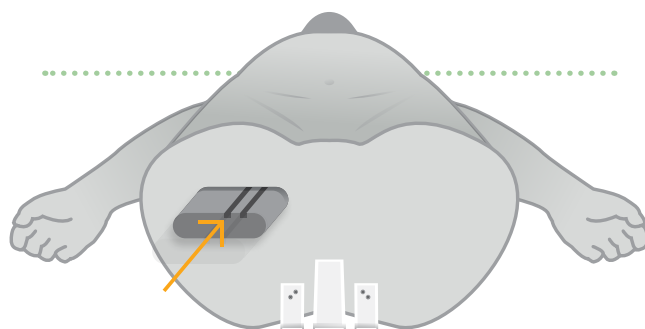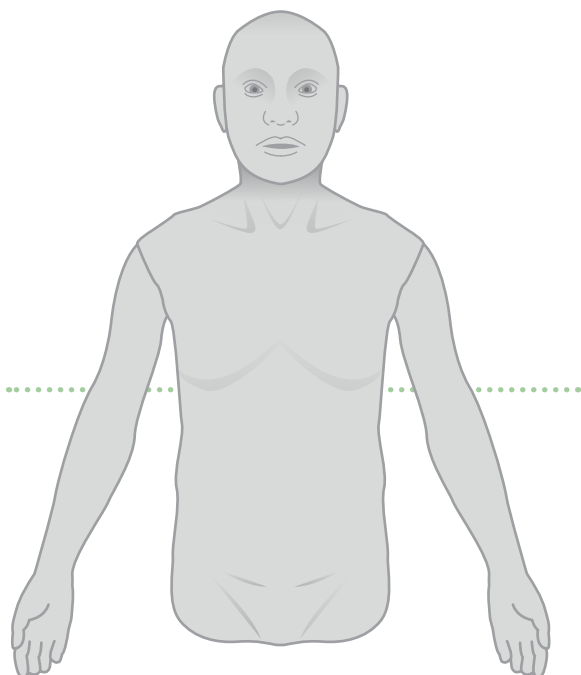


1

Wyciągnąć zatrzask w podstawie

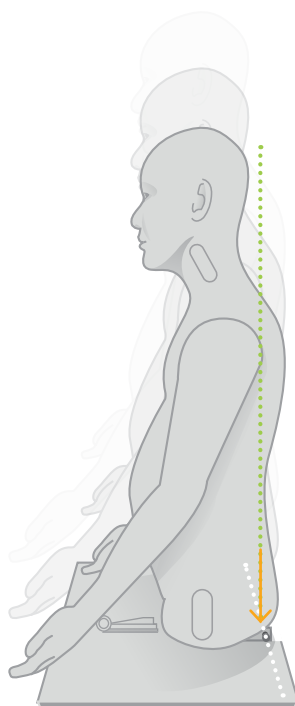

2

Umieść model na podstawie.

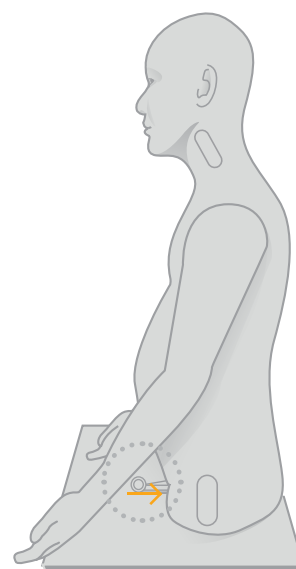


3


Zablokować zatrzask na podstawie




KONFIGURACJA


WŁĄCZENIE TRENAŻERA

 Naładować trener do pełna przed pierwszym użyciem

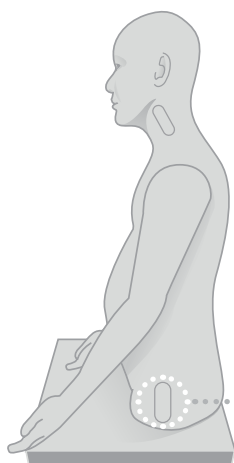

Nacisnąć przycisk zasilania na trenerze CaRE

 Dioda LED zaświeci się na biało po włączeniu zasilania

 Dioda LED będzie migać na pomarańczowo, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.


KONFIGURACJA


PODŁĄCZENIE TRENAŻERA

1 Korzystając z urządzenia z obsługą Wi-Fi, przejdź do ustawień Wi-Fi.




2 Znajdź numer seryjny swojego modelu CaRE i wybierz tę opcję.

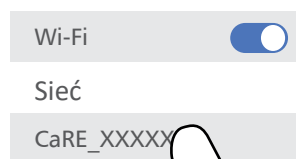

 Numer seryjny znajduje się na spodzie trenera.

3 Wejdź na stronę care.local z dowolnego urządzenia, żeby przejść do strony logowania CaRE.

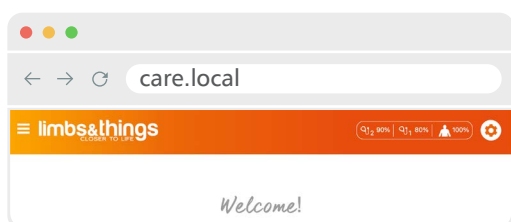

KONFIGURACJA

LimPAD

Naładować trenażer do pełna przed pierwszym użyciem



Przycisk zasilania i wskaźnik LED


Regulacja głośności

Wejście audio mini jack 3,5 mm


Wejście USB-C

1 Naciśnij przycisk zasilania.  - Różowe światło zacznie migać. 

2 Na stronie internetowej CaRE przejdź do menu ustawień.

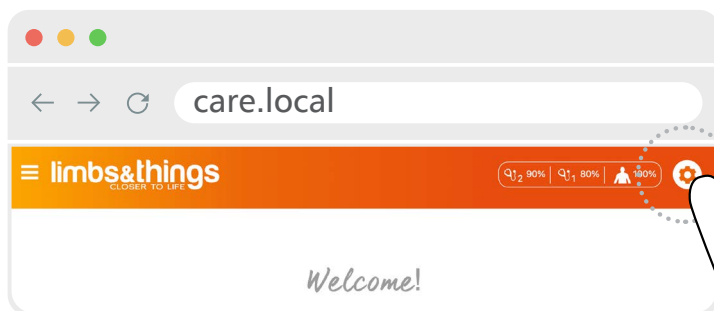

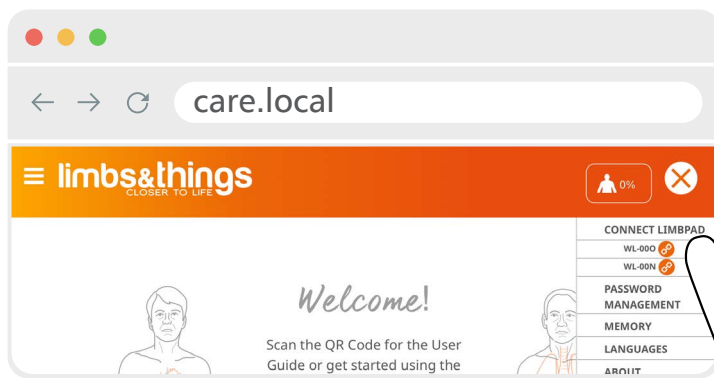

3 Wybierz podłączenie LimPAD




Z każdym CaRE można sparować 2 urządzenia LimPAD

Lampka przestaje migać po pomyślnym sparowaniu 

 = Poprawnie
 = Błąd


5 Podłączanie głośnika zewnętrznego.

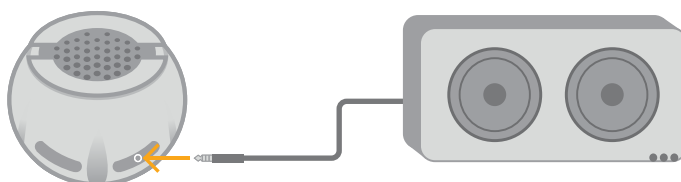

Zalecany zakres częstotliwości głośników: od 40 Hz do 16 kHz.

Ładowanie trenażera CaRE:

Podłącz ładowarkę DC – niebieska dioda zacznie migać, sygnalizując ładowanie urządzenia. Po zakończeniu ładowania dioda zaświeci się na niebiesko.

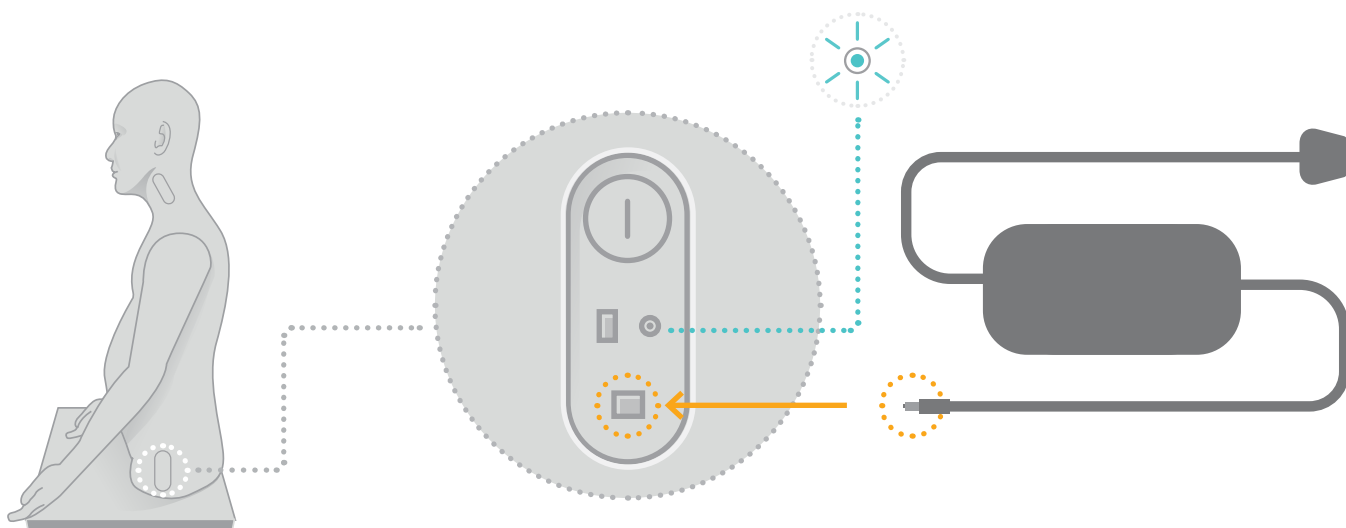**Ładowanie adaptera LimPAD:**

podłącz ładowarkę USB-C



Niebieska dioda będzie migać, sygnalizując ładowanie.




Po całkowitym naładowaniu dioda przestanie migać, świecąc na niebiesko.



1 Wyłącz trener CaRE za pomocą przycisku zasilania.


2 Pociągnij zatrzask do siebie

3 Połóż trener na plecach


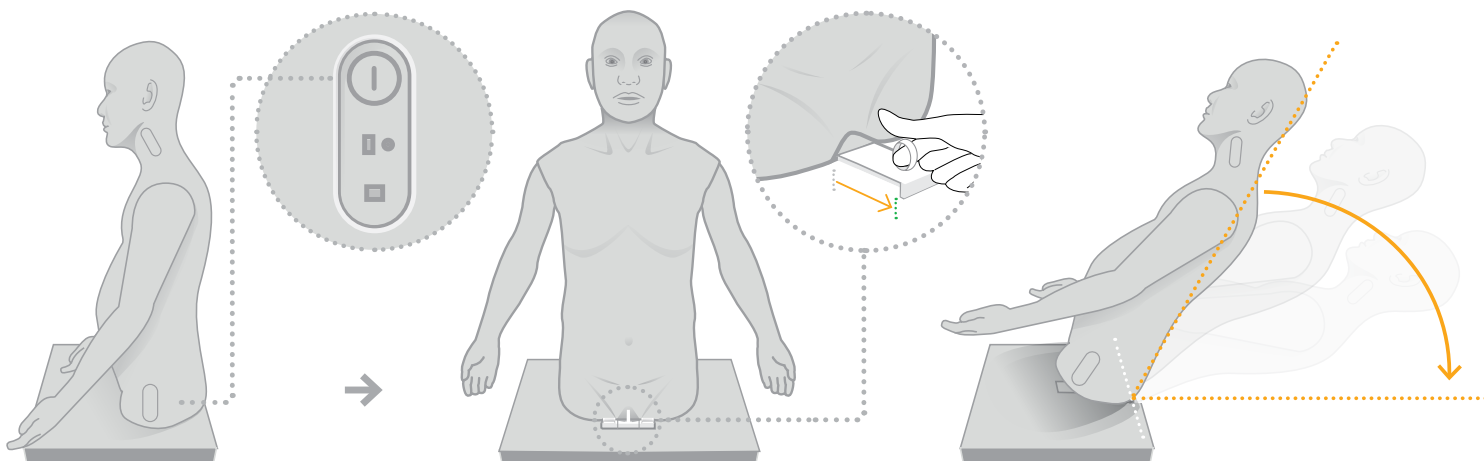


4 Użyj zatrzasku, aby odblokować akumulator

5 Pociągnij za zawieszkę, aby wyjąć akumulator.

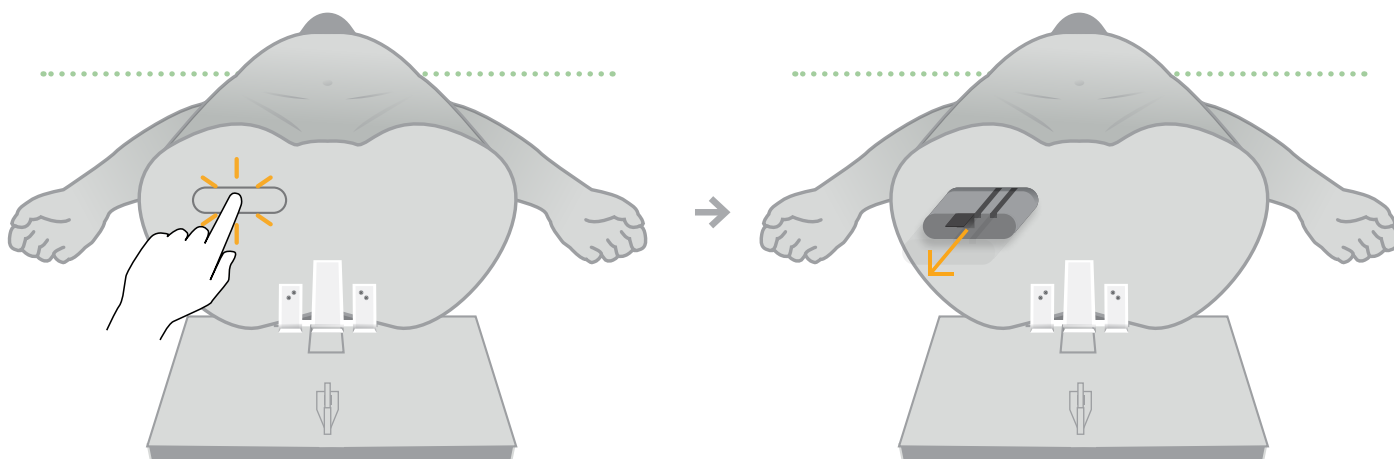



Za pomocą dostarczonych pasm zamocuj trener CaRE w odpowiednim miejscu.

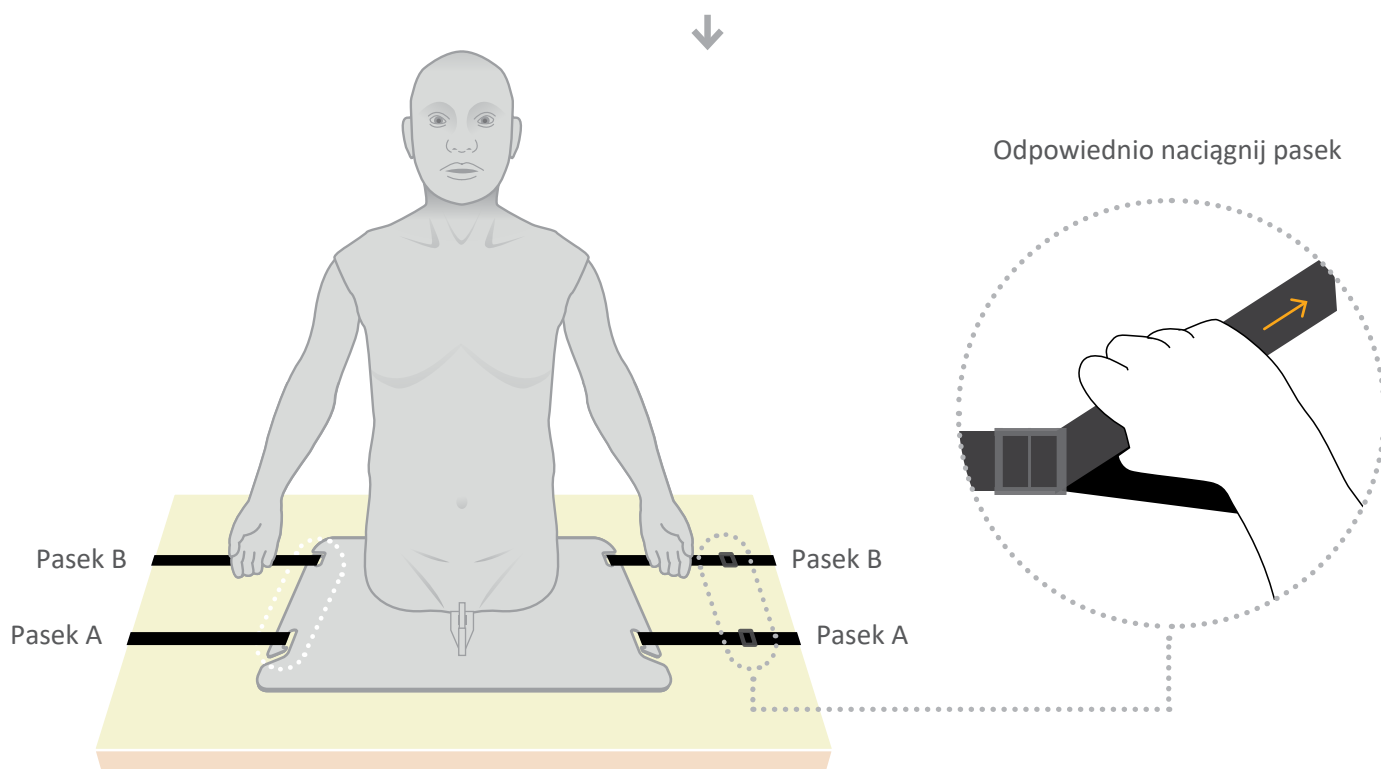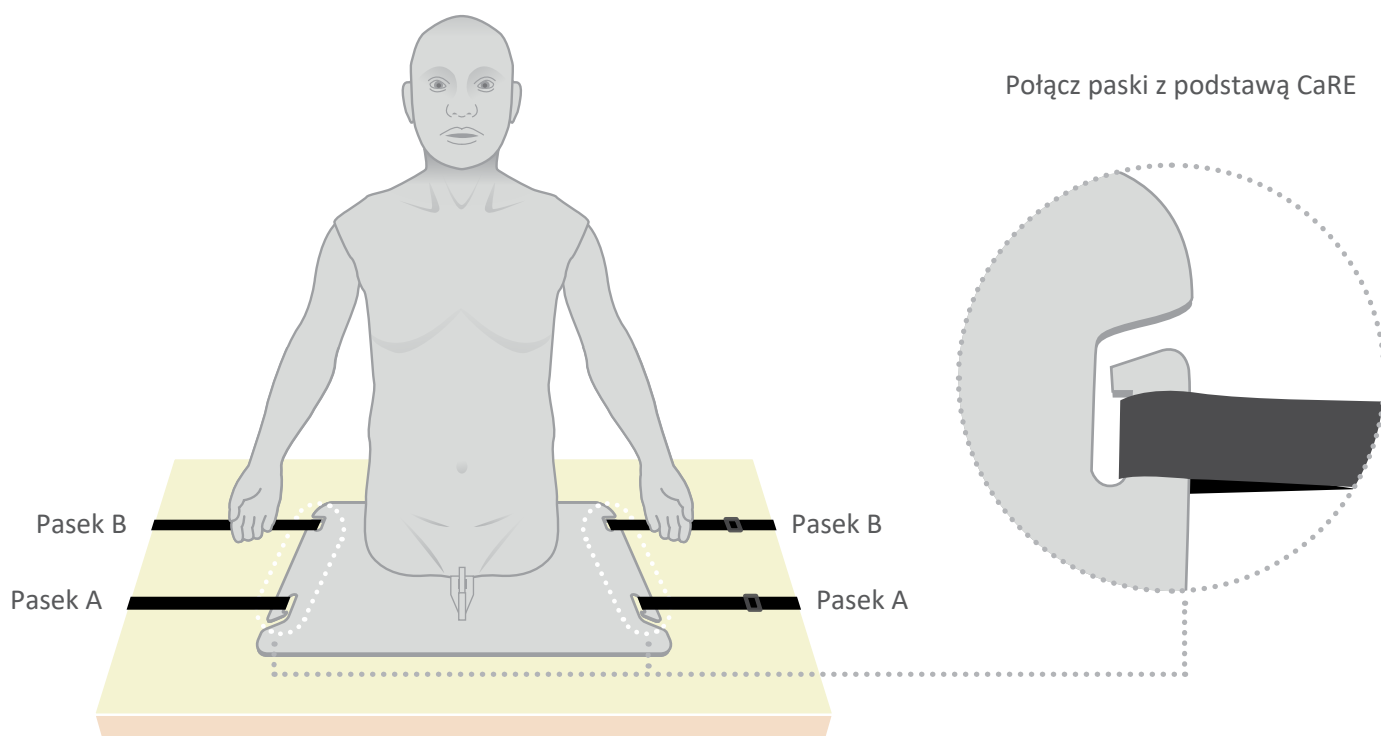


KONFIGURACJA

MOCOWANIE MODUŁU PIERSI


Umieść moduł piersi na trenażerze CaRE.

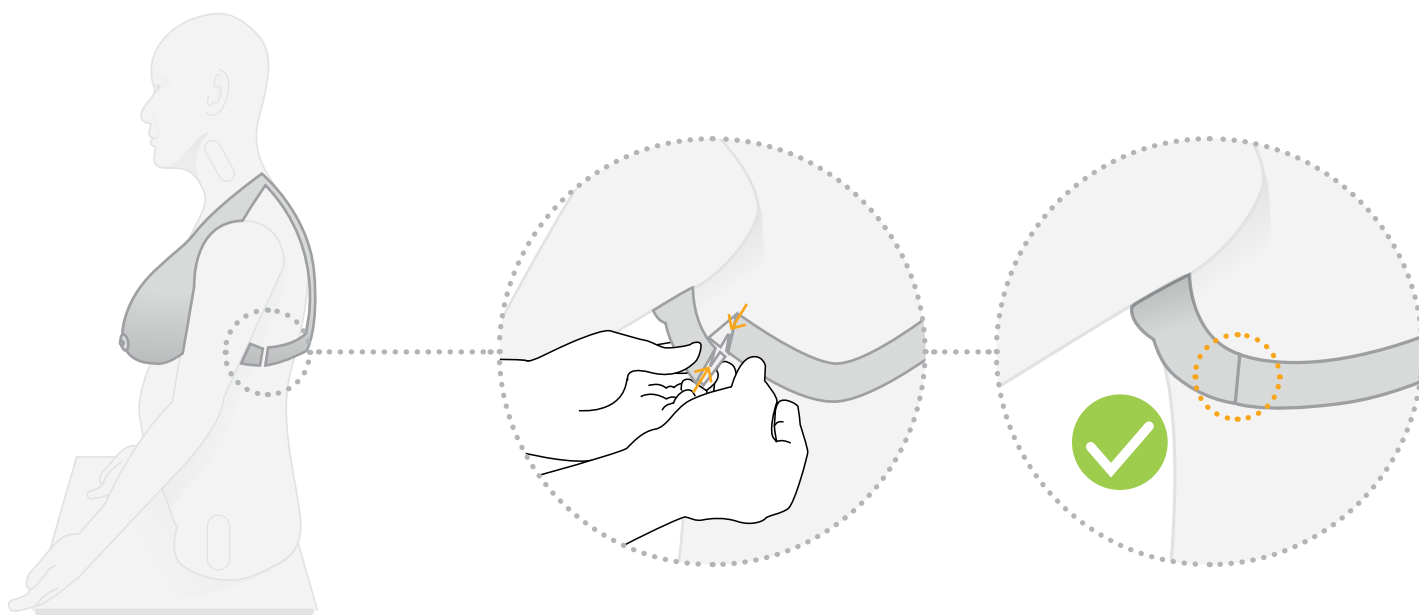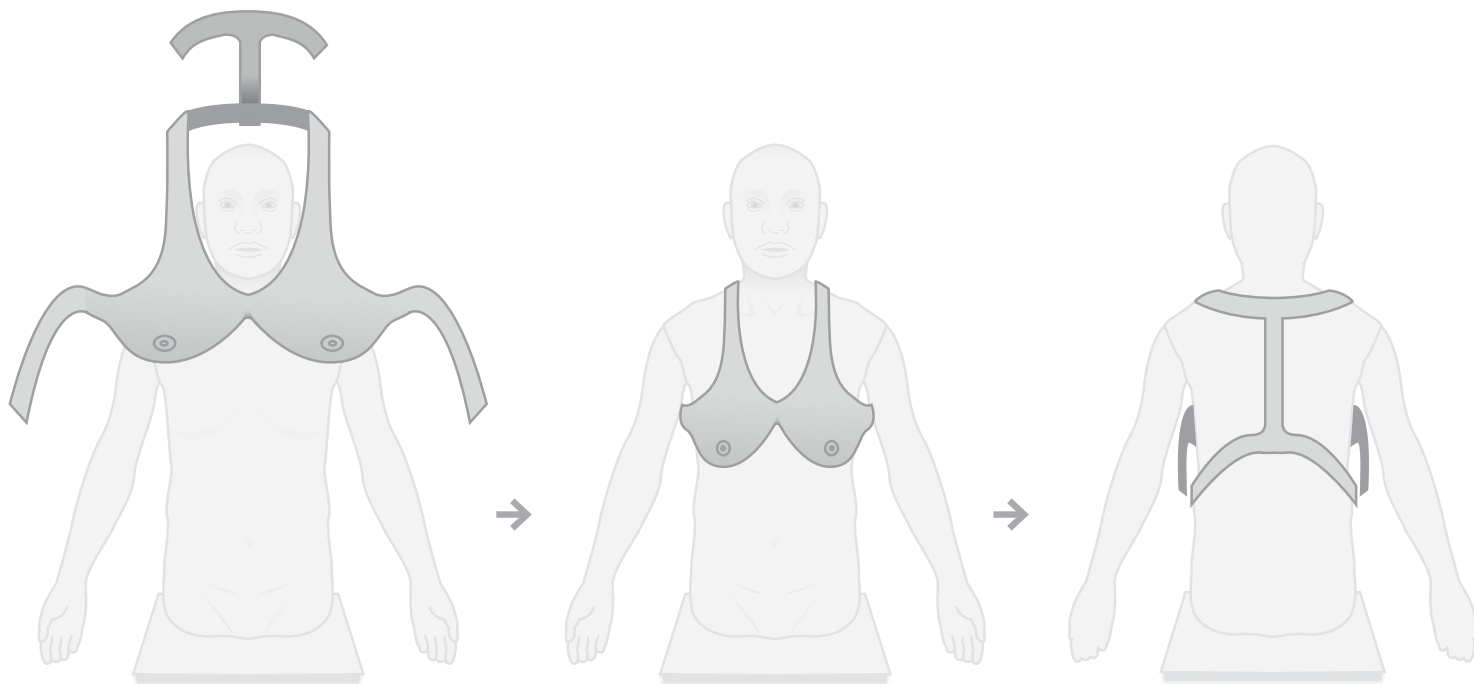


1 Pociągnij zatrzask na podstawie.

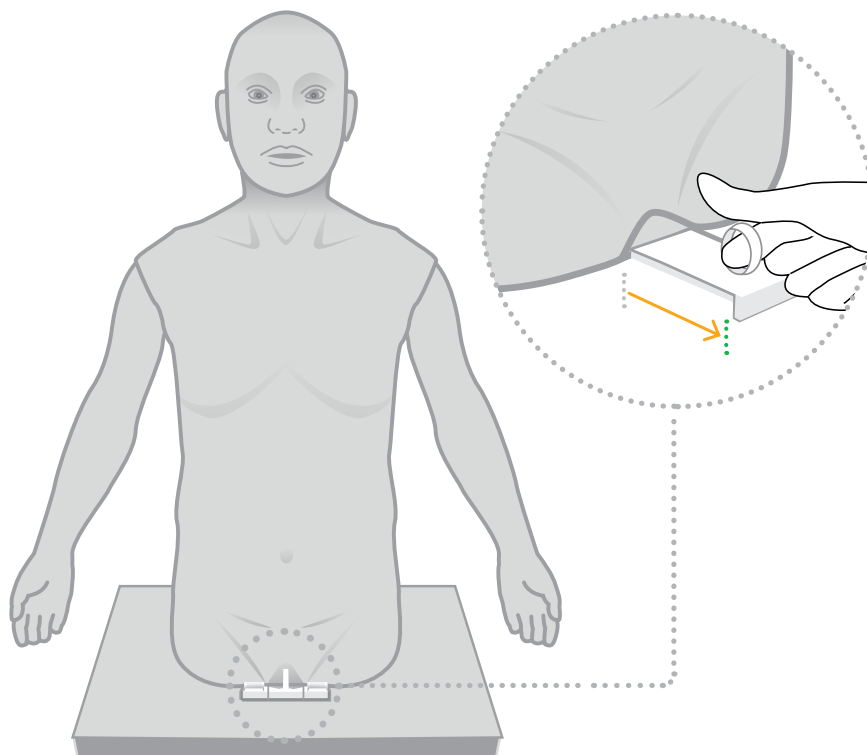



2 Wciśnij zatrzask z tyłu modelu.

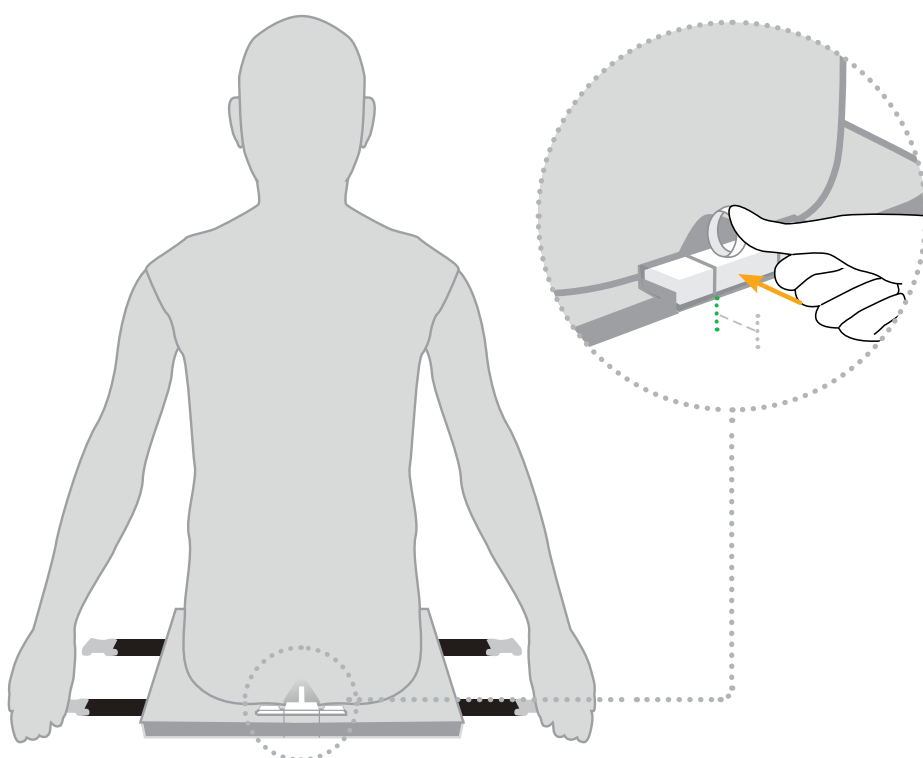

3 Podnieś trener, aby wyjąć go z podstawy.

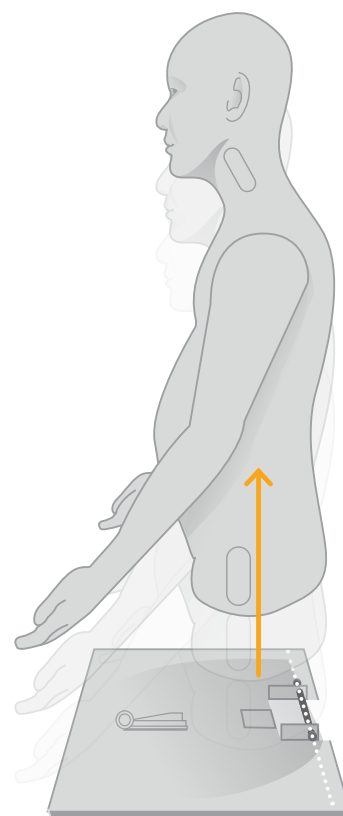

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

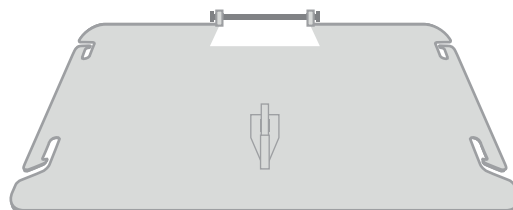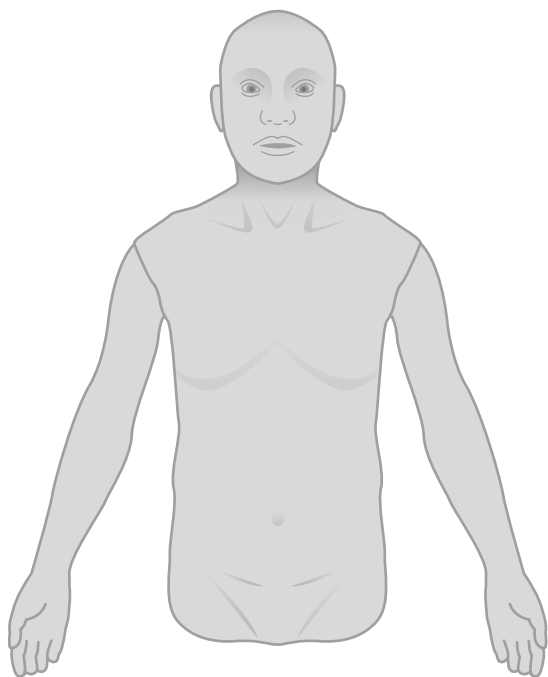

Wyczyść powierzchnię z wszelkich zabrudzeń za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki, używając wyłącznie ciepłej wody i łagodnego środka czyszczącego.



PRZECHOWYWAĆ W
SUCHYM MIEJSCU



Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z paragrafem 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia, stosując jedno lub kilka z poniższych środków:

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/ telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały zatwierdzone przez producenta, mogą spowodować utratę zgodności produktu z normami i utratę gwarancji.



Maksymalna wysokość, na której można używać ten produkt to 2000 metrów.