




Trenażer iniekcji szczepionek domięśniowych (10 szt.)

INSTRUKCJA

SPEC162

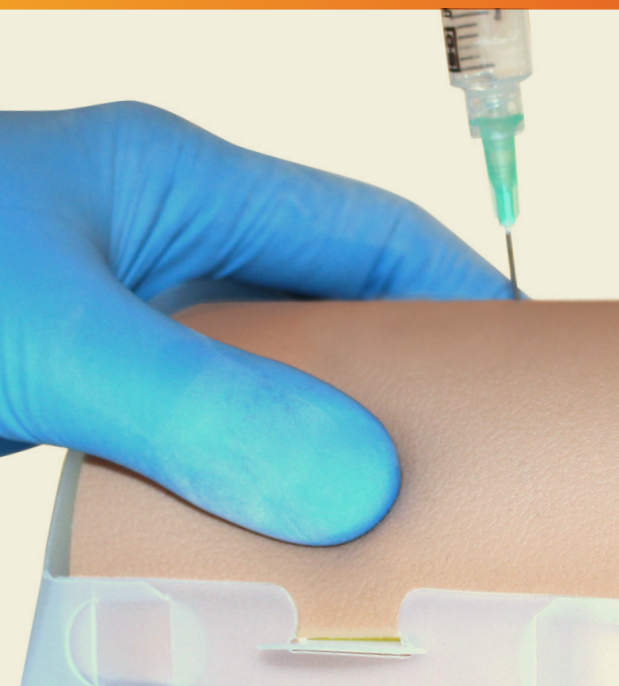

Zawartość zestawu






Podkładka imitująca skórę (x10)

Blok mięśniowy (x10)

Pianka absorbująca
płyny (x10)

Taca na tkanki (x10)

Podkładka absorbująca
płyny (x10)

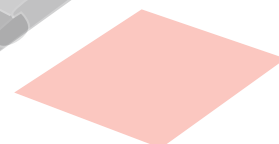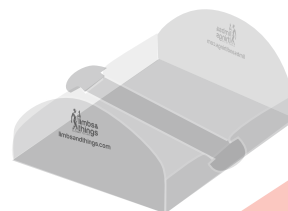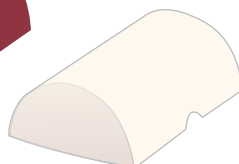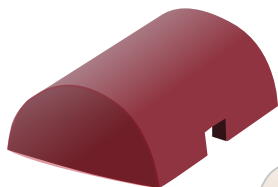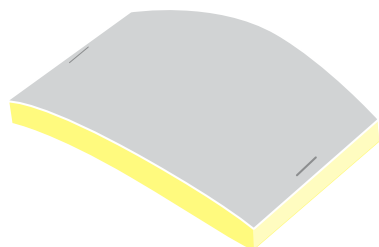

Aby zobaczyć więcej produktów odwiedź

limbsandthings.com



Do iniekcji zalecamy wykorzystanie mieszanki wody i środka przeciwbakteryjnego. Pozwoli to na sterylizację wody i ograniczenie tworzenia się pleśni.




Po każdym użyciu i przed przechowywaniem, wysusz dokładnie produkt.

UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE


1

Odepnij jeden koniec paska mocującego

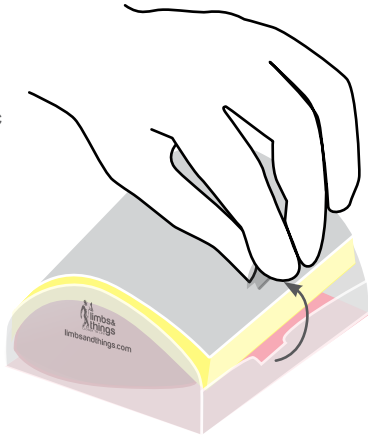


2

Odepnij drugi koniec i zdejmij podkładkę imitującą skórę i blok mięśniowy z tacy.

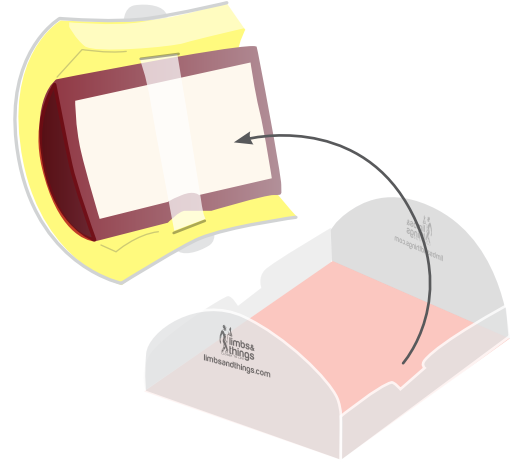


3

Ostrożnie wyjmij jeden koniec paska mocującego z mocowania znajdującego się w podkładce imitującej skórę.

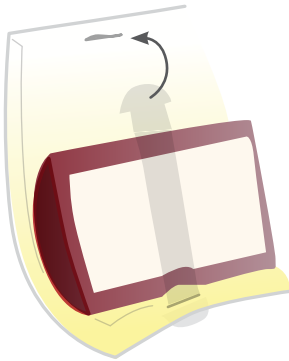


4

Odłóż podkładkę imitującą skórę wraz z paskiem na bok.

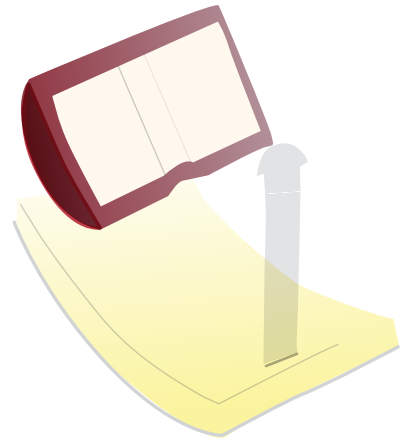

5

Wyjmij piankę absorbującą płyn z wnętrza bloku mięśniowego.

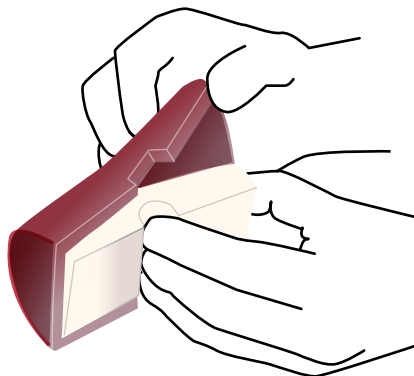

6

Ściśnij piankę, aby usunąć płyn i pozwól jej wyschnąć w naturalny sposób.

