


Wielożyłowy zestaw do nauki wenepunkcji

Męski, Damski i Pediatryczny

Instrukcja Obsługi

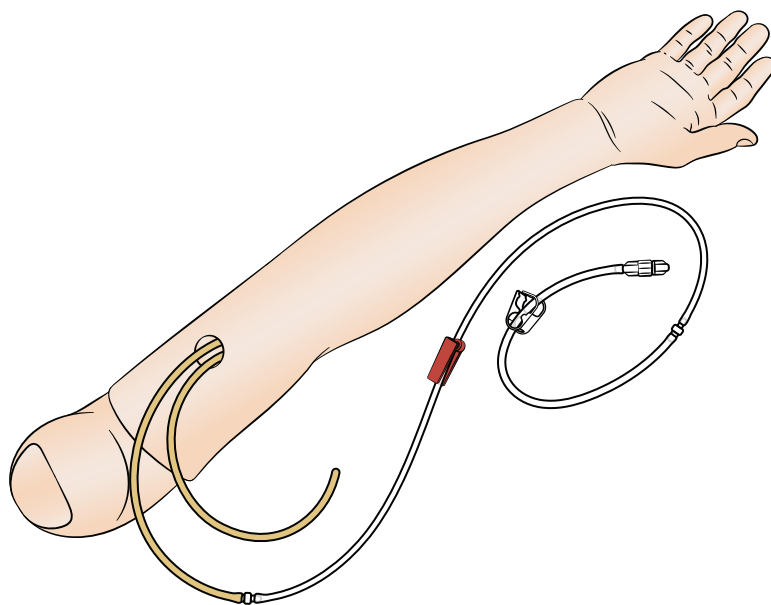

Wstęp

Wielożyłowy zestaw do nauki wenepunkcji to naturalnej wielkości, wiernie odwzorowane ramię, stanowiące realistyczną imitację ramienia pacjenta. Umożliwia szkolenie personelu medycznego w zakresie wykonywania nakłuć żylnych

Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje 3 wersje wielożyłowego zestawu do nauki wenepunkcji: ramię słego mężczyzny, kobiety oraz dziecka. O ile nie określono inaczej, informacje zawarte w niniejszej Instrukcji Obsługi.



Ostrzeżenie

Produkt zawiera lateks, który może powodować reakcje alergiczne.



Uwaga


Nie używać jodyny. Może trwale zabrudzić ramię.



Adnotacja

- Zalecana maksymalna grubość igły lub cewnika - 2 l.
- Cewnik lub inny przyrząd do nakłuwania żył należy spryskać silikonem, aby ułatwić jego wprowadzenie do żyły
- W przypadku wystąpienia nadmiernego wycieku należy założyć nową skórę i system wielożyłowy.


Elementy zestawu

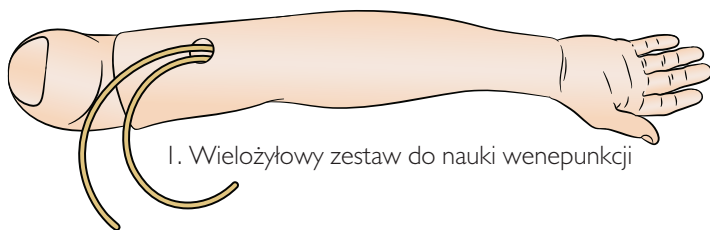


1. Wielożyłowy zestaw do nauki wenepunkcji




2. Zapasowa skóra

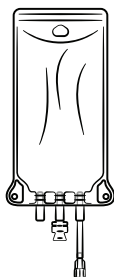

3. Woreczek wlewu
dożylnego

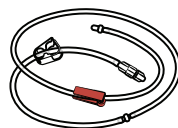

4. Wężyk do wlewu
dożylnego z zaciskiem

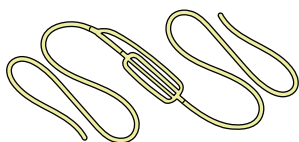


5. Zapasowa wiązka żył



6. Butelka silikonu
w sprayu




7. Butelka z koncentratem
sztucznej krwi

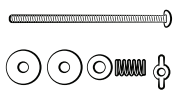

8. Mocowanie ramienia




9. Zabezpieczenie
wylotu żyły (x 4)

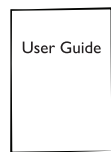


10. Instrukcja obsługi

Przegląd


Ramię mężczyzny



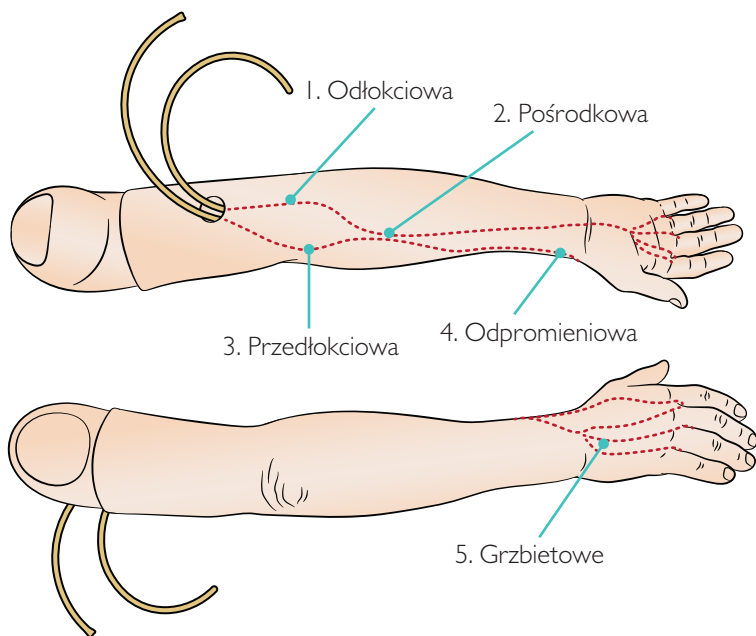


Ramię kobiety / dziecka

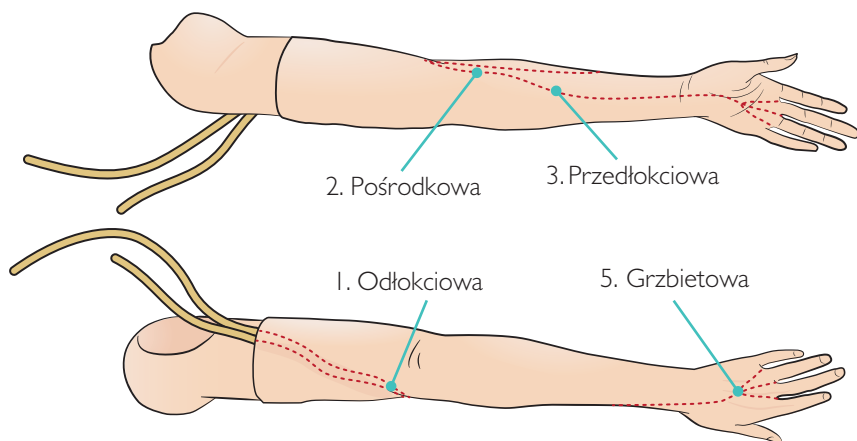


1

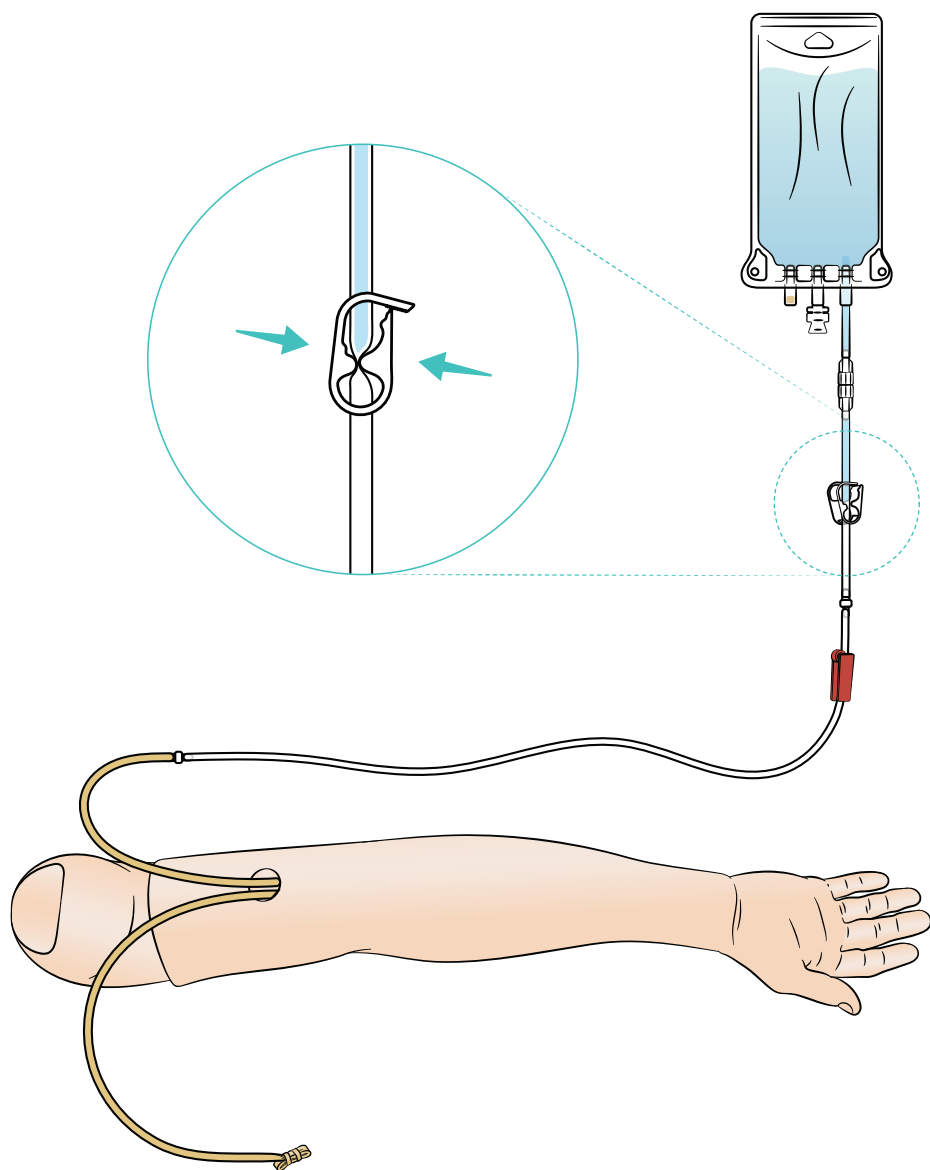

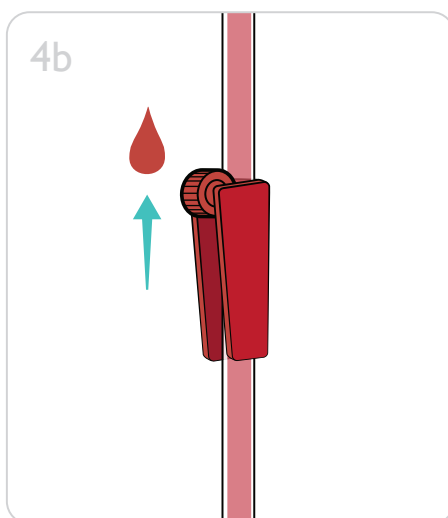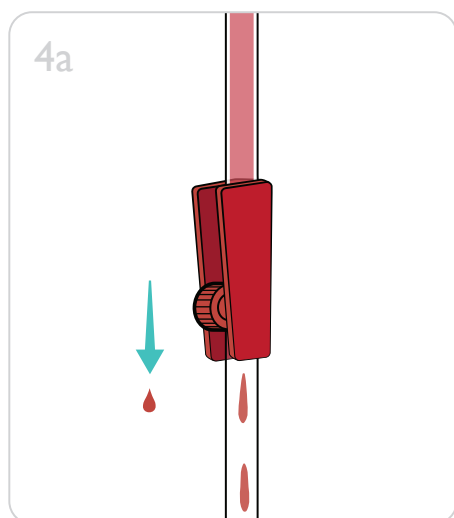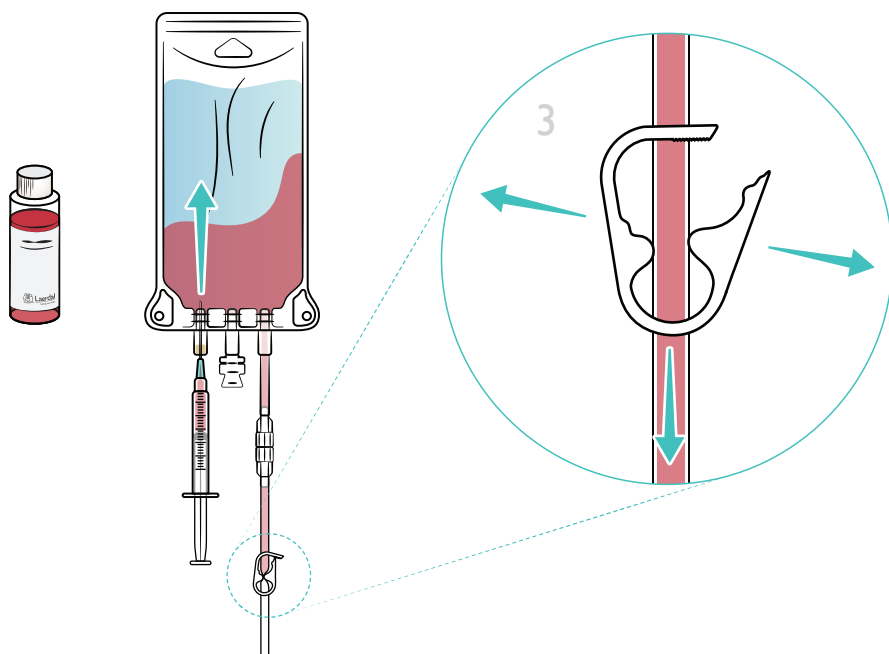


Wymiana skóry i żył


1

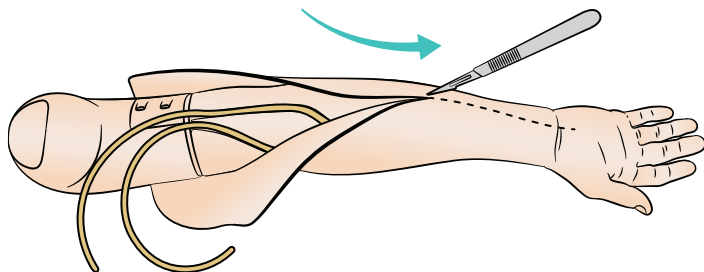


2

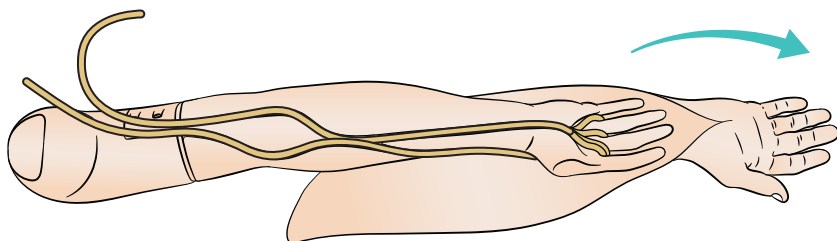


3

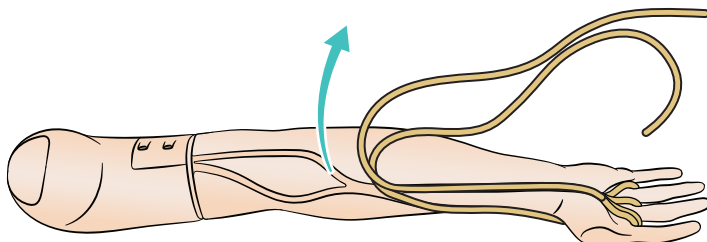

4

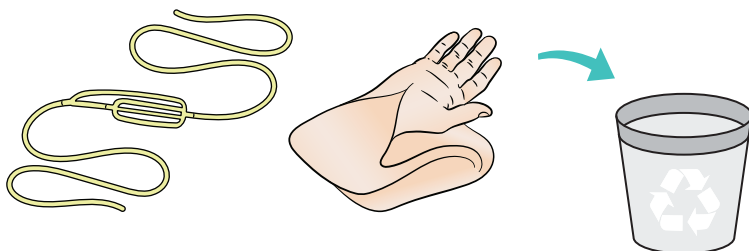


5

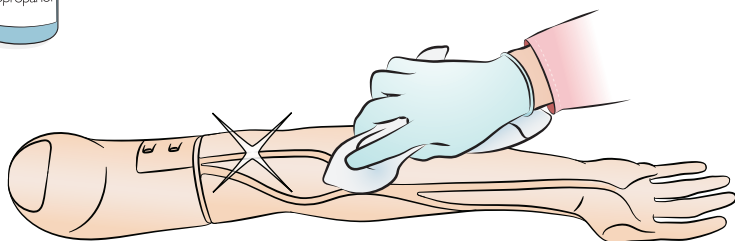

Adnotacja


Nadmiar zaschniętego kleju należy zeskrobać.

6

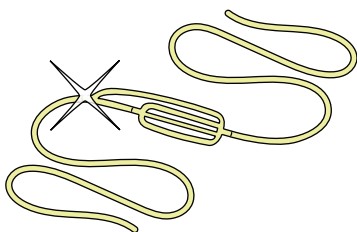


7


2.5 cm / 1 in

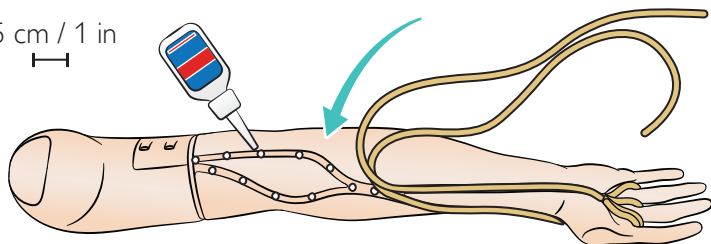

8

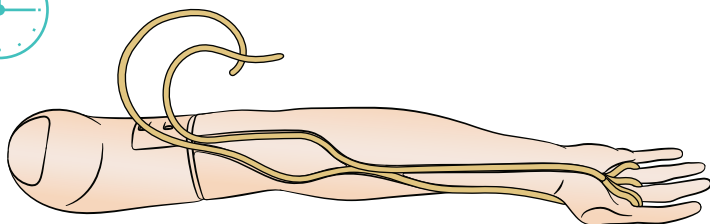


9

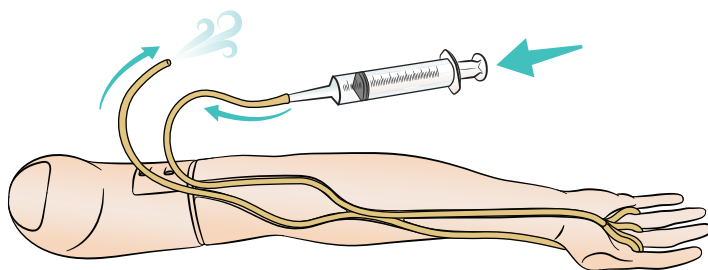

9. Za pomocą strzykawki wprowadź do żył powietrze i sprawdź czy nie powstały zagięcia lub zatory


10

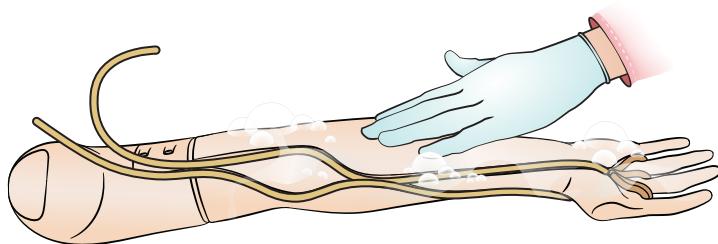


11



12

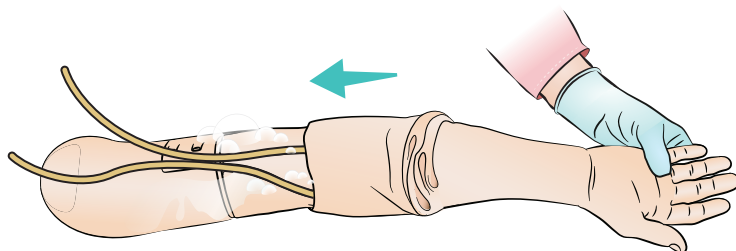

13

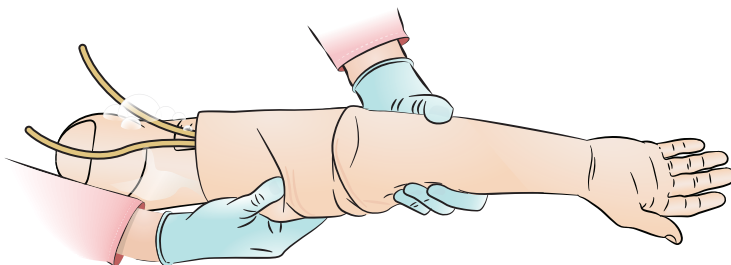

Adnotacje

- *Ogrzać skórę ramienia przed wymianą. Można to zrobić za pomocą suszarki.*
- *Skóra męskiego ramienia zawiera kciuk.*

Pielęgnacja i konserwacja:

- Po każdej sesji szkoleniowej ramię należy umyć wodą z mydłem. Regularnie należy wykonywać dokładne przeglądy.
- Za pomocą strzykawki przepłucz żyły wodą, a następnie osusz powietrzem. W razie potrzeby zdezynfekuj łagodnym roztworem wybielacza i wody, a następnie osusz powietrzem.
- Przy korzystaniu wkładek do iniekcji mięśniowej (należy wstrzykiwać jedynie wodę), Nie pozostawiaj wilgotnych wkładek w skórze. Po każdym szkoleniu wyciśnij wodę z wkładki i dokładnie ją wysusz. Przed ponownym włożeniem pod skórę, posyp ją talkiem, aby ułatwić wkładanie. Aby zapobiec powstawaniu pleśni, podkładki można wypłukać w łagodnym roztworze wybielacza i wody.

Ostrzeżenia

- *Nie zanurzać fantomu, ani jego elementów, w płynach czyszczących lub w wodzie.*
- *Unikaj używania kolorowych rękawiczek, gdyż mogą one spowodować zmianę koloru skóry. Chronić przed poplamieniem pisakami, długopisami, acetonem, jodyną lub innymi podobnymi produktami. Nie kłaść na papierze gazetowym, ani innej zadrukowanej powierzchni, gdyż mogą one trwale zabrudzić fantom.*

Gwarancja

Global Warranty

Warunki gwarancji określone zostały w Global Warranty firmy Laerdal. Więcej informacji znajduje się na stronie www.laerdal.com

Ważne informacje

Specyfikacja			
Temp. przechowywania	4 °C to 40 °C (39 °F to 104 °F)		
Temp. pracy	-15 °C to 50 °C (5 °F to 122 °F)		
Wilgotność	20% - 90% (non-condensing)		
	Male Arm	Female Arm	Pediatric Arm
Waga	1.7 kg (3.7 lbs)	1.79 kg (3.95 lbs)	0.91 kg (2 lbs)
Wymiary	72.4 cm (28.5 inches)	73.7 cm (29 inches)	51.44 cm (20.25 inches)
Przechowywać w pomieszczeniu i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych			

Części zamienne

Najnowsze części zamienne i akcesoria można znaleźć na stronie www.laerdal.com

© 2019 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Manufactured in USA for:
Laerdal Medical AS
P.O. Box 377, Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in USA

20-16104 Rev A

