



Laerdal
helping save lives

BABY HIPPY

375-35001

Instrukcja użytkowania



BABY HIPPY to naturalnej wielkości, wiernie odwzorowany model dolnej części torsu i nóg noworodka płci żeńskiej. Umożliwia szkolenie personelu medycznego w stosowaniu **Ortolani Jerk Sign i Barlow Maneuver**.

Jakość konstrukcji i łatwość wymiany poszczególnych części umożliwia, przy odpowiednich zabiegach pielęgnacyjnych i właściwej konserwacji, korzystanie z fantomu w trakcie wielu sesji szkoleniowych.

Zalecenia Producenta:

Baby Hippy nie jest zaprojektowane do sprawdzania pełnego odwodzenia stawów biodrowych. Takie próby spowodują rozdarcie skóry manekina co nie podlega gwarancji.

Uwagi Instruktora:

Elementy zestawu:

(1) Manekin BABY HIPPY

Nabywana umiejętność:

- Ortolani Jerk Sign
- Barlow Maneuver

Sposób użycia:

- Lewy staw biodrowy uległ dyslokacji. Ortolani Jerk-Sign spowoduje przesunięcie głowy biodra w panewkę.
- Prawy staw biodrowy jest sztywny („lax”) i może być przesunięty (dislocated) tylko poprzez zastosowanie manewru Barlow’a.

Zalecenia Producenta:

UWAGA: Baby Hippy nie jest zaprojektowane do sprawdzania pełnego odwodzenia stawów biodrowych. Takie próby spowodują rozdarcie skóry manekina co nie podlega gwarancji.

Pielęgnacja i konserwacja:

1. Myć wodą z mydłem; nie zanurzać fantomu w płynach czyszczących, ani w wodzie.
2. Fantom należy rozkładać jedynie na czystej powierzchni. Chronić przed poplamieniem pisakami, długopisami, acetonem, jodyną lub innymi podobnymi produktami. Nie kłaść na papierze gazetowym, ani innej zadrukowanej powierzchni.
3. Aby wydłużyć czas użytkowania fantomu, po każdej sesji szkoleniowej należy go czyścić, a w regularnych odstępach czasu wykonywać dokładne przeglądy. Fantomy przechowywać w osobnych workach.
4. Fantomy należy prawidłowo przechowywać w okresach pomiędzy sesjami szkoleniowymi.

Gwarancja:

Firma Laerdal Medical gwarantuje nabywcom, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od daty zakupu przez pierwotnego użytkownika. W trakcie ustalonego rocznego okresu gwarancji producent, po otrzymaniu od nabywcy produktu z wadami materiałowymi lub wytwórczymi, wraz z pisemną informacją o rodzaju usterki, według własnego uznania naprawi lub wymieni wadliwe części lub cały produkt. Wymiana lub naprawa oryginalnego produktu nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.

Wadliwe produkty wraz z informacją o usterekach można również przesłać autoryzowanemu przedstawicielowi firmy Laerdal Medical, u którego produkt został zakupiony. Obowiązek pokrycia kosztów wszelkich opłat pocztowych, kosztów przesyłki i opłat manipulacyjnych spoczywa wyłącznie na nabywcy.

Firma Laerdal Medical odpowiada za bezpieczne, niezawodne i właściwe działanie swoich produktów jedynie pod warunkiem przestrzegania następujących warunków:

- serwis, naprawy, regulacje lub poprawki mogą być wykonywane wyłącznie przez Laerdal Medical lub osoby przez nią upoważnione;
- instalacja elektryczna pomieszczenia, w którym produkty są używane odpowiada wymogom dla danego sprzętu;
- produkt jest używany w odpowiedni sposób, ściśle według zaleceń.

Firma Laerdal Medical nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej gwarancji za szkody przypadkowe lub pośrednie, a także w przypadku dokonywania napraw lub zmian przez osoby nieuprawnione, względnie gdy produkt, lub jego część, uległ uszkodzeniu wskutek wypadku lub niewłaściwego stosowania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje baterii, bezpieczników, skutków normalnego zużycia w trakcie eksploatacji, plam, odbarwień lub innych drobnych nieprawidłowości, które nie zakłócają i nie ograniczają działania produktu.

Przepisy prawa niektórych krajów nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub pośrednie, stąd powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą Państwa nie dotyczyć.

Nie udziela się żadnych innych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, odnośnie użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu produktu, jego części i akcesoriów.