


Airway Management Trainer

Instrukcja obsługi

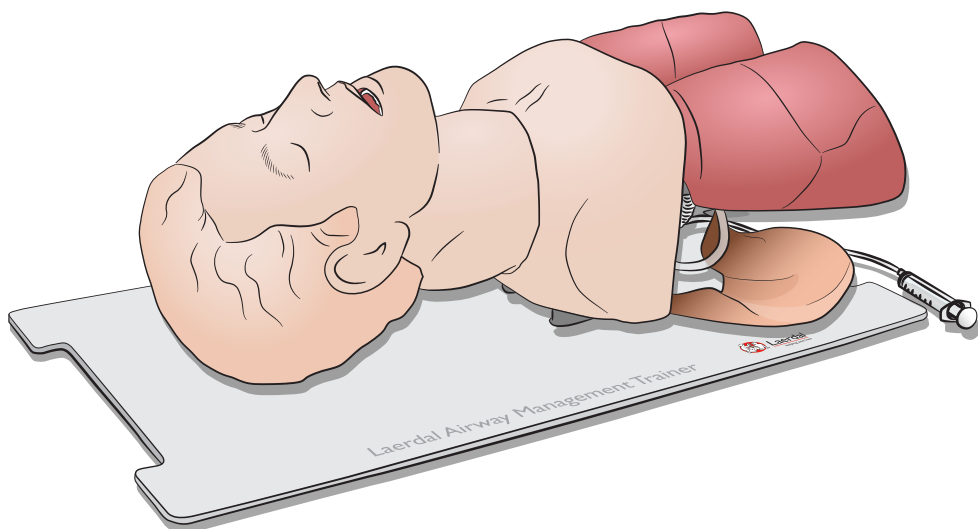


Wprowadzenie


PL

Trenażer Airway Management Trainer przeznaczony jest do nauki i ćwiczenia intubacji, wentylacji, odsysania i bronchoskopii.

Osobny moduł demonstracyjny dróg oddechowych przeznaczony jest do szkolenia rozpoznawania charakterystycznych punktów orientacyjnych. Zawiera realistyczne szczegóły i można go użyć do zademonstrowania rękoczynu Sellicka.

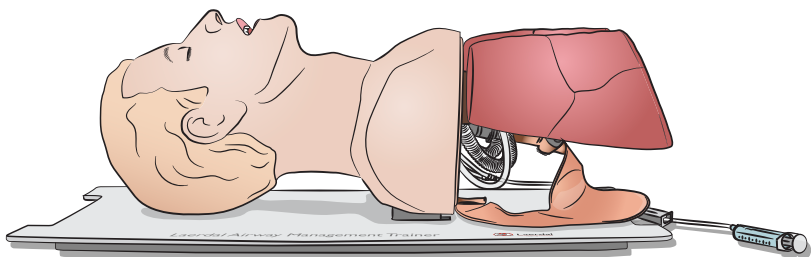

1. Trenażer

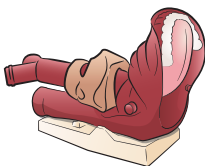


2. Model dróg oddechowych



3. Symulowana treść żołądkowa (150 g)



4. Lubrykant

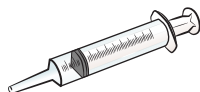


5. Strzykawka (60 ml)



6. Dokumentacja




7. Kompresy x 10

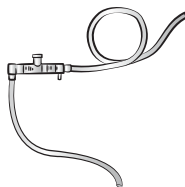

8. Pompa i przewody do czyszczenia dróg oddechowych

Ogólny zarys

PL

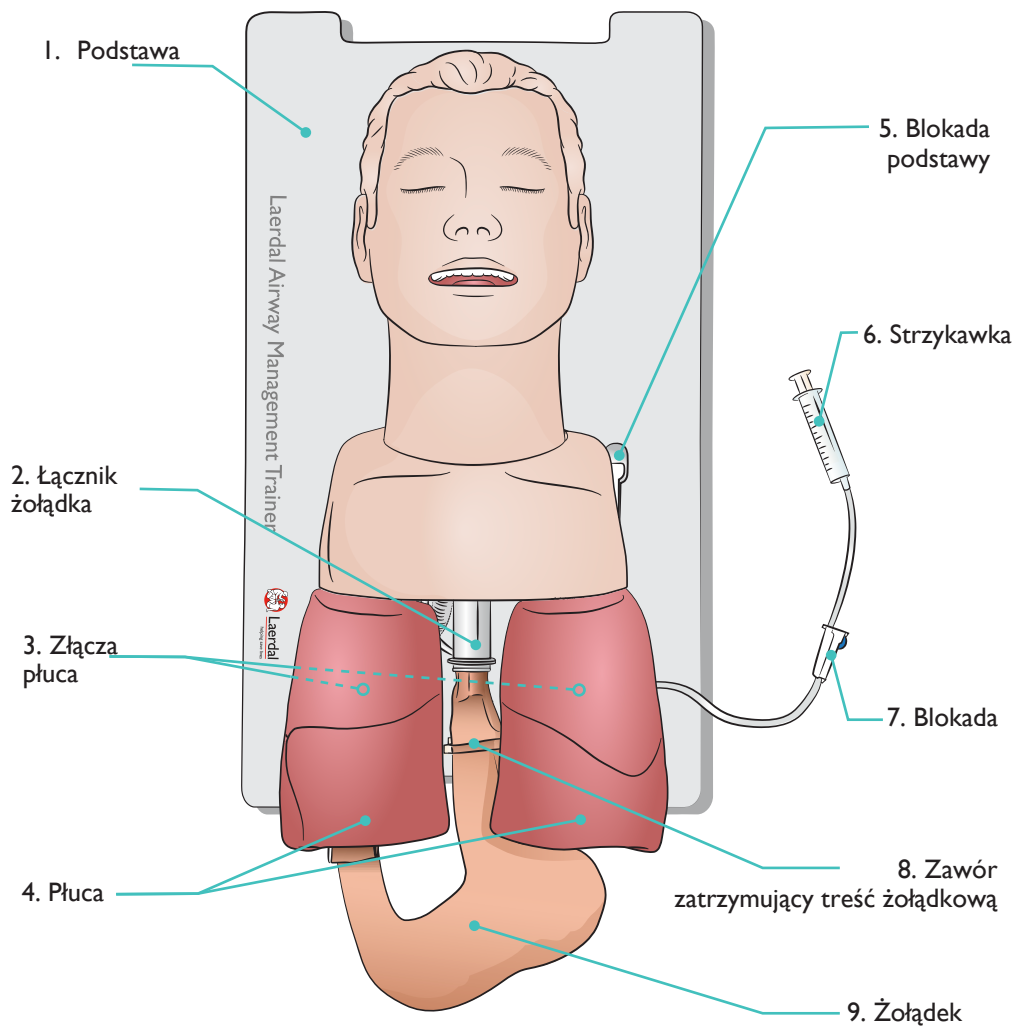

Funkcje

PL

Drogi oddechowe

- Odchylenie głowy
- Uniesienie podbródka
- Uniesienie karku
- Wyluksowanie żuchwy

Wentylacja workiem samorozprężalnym

- Obserwacja wypełniania się płuc
- Osluchiwanie szmerów oddechowych
- Manewr Sellicka (ucisk na chrząstkę pierścieniową)

Intubacja



- Nadmierny nacisk na laryngoskop
- Zakładanie rurek nosowo-gardłowych
- Zakładanie rurek ustno-gardłowych
- Wprowadzenie rurki do żołądka
- Intubacja oskrzela
- Zakładanie LMA
- Intubacja dotchawicza
- Zakładanie przyrządów nadłośniowych
- Ocena prawidłowego położenia rurki
- Bronchoskopowa ocena położenia rurki

Odsysanie - usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych


- Jamy ustnej
- Ustno- lub nosowo-gardłowa
- Ustno- lub nosowo-tchawicze przez rurkę dotchawiczą
- Płukanie żołądka

Rozdęcie żołądka

Symulacja wymiotów

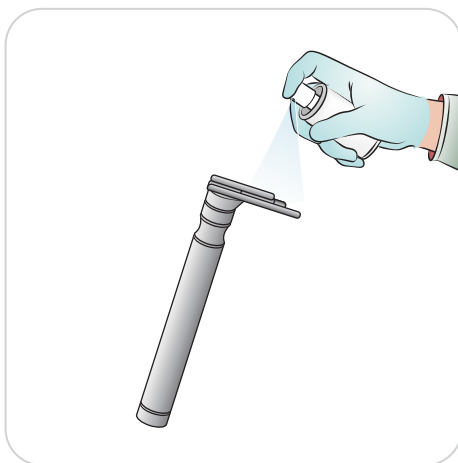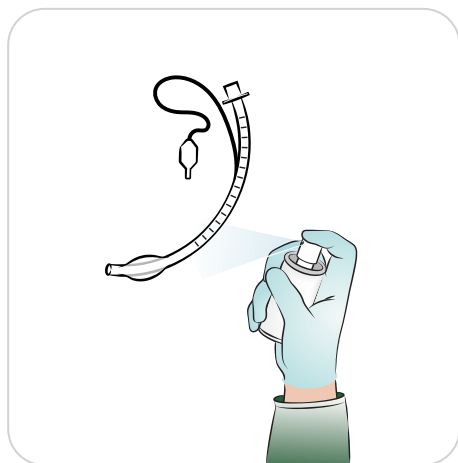


Przygotowanie do ćwiczeń - symulacja wymiotów

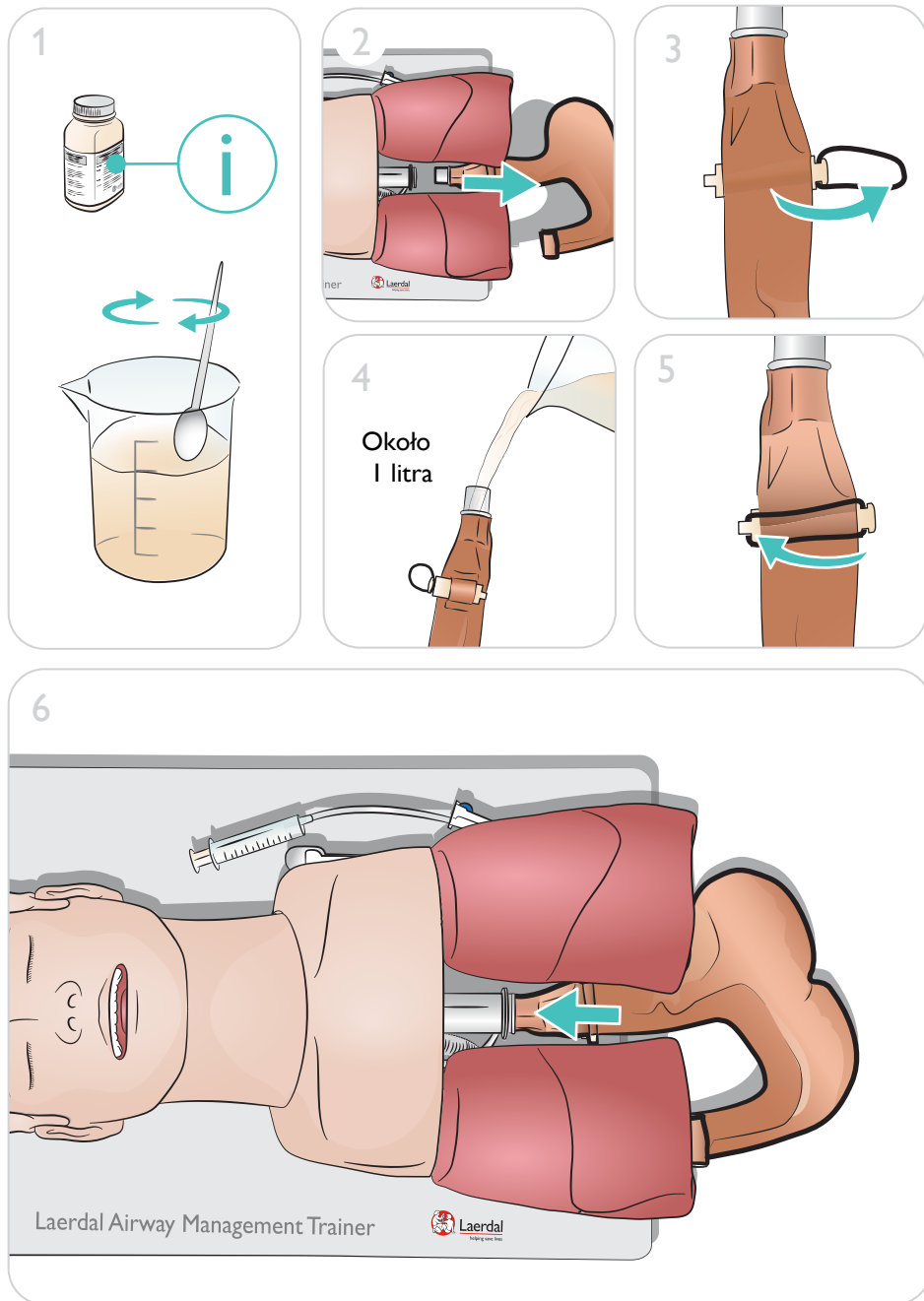

PL

Wymioty można symulować w celu praktycznych ćwiczeń w udrażnianiu dróg oddechowych i usuwaniu płynów z dróg oddechowych. Aby wywołać wymioty należy nacisnąć wypełniony żołądek.

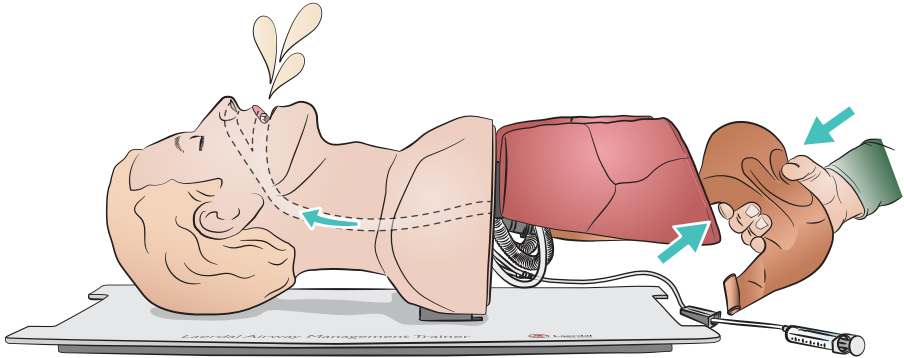


Symulacja kurczu krtani

PL

1. Naciśnij tłok strzykawki
aby zasymulować kurcz krtani


2. Utrzymaj skurcz
za pomocą suwaka
blokady

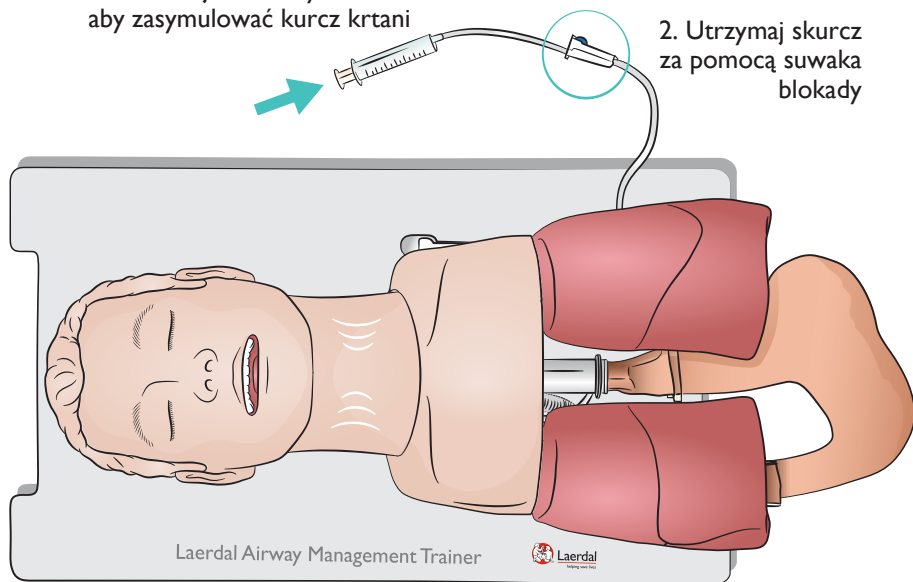

Nadmierny ucisk na laryngoskop


PL

Nadmierny ucisk laryngoskopem na górne zęby sygnalizowany jest odgłosem kliknięcia.

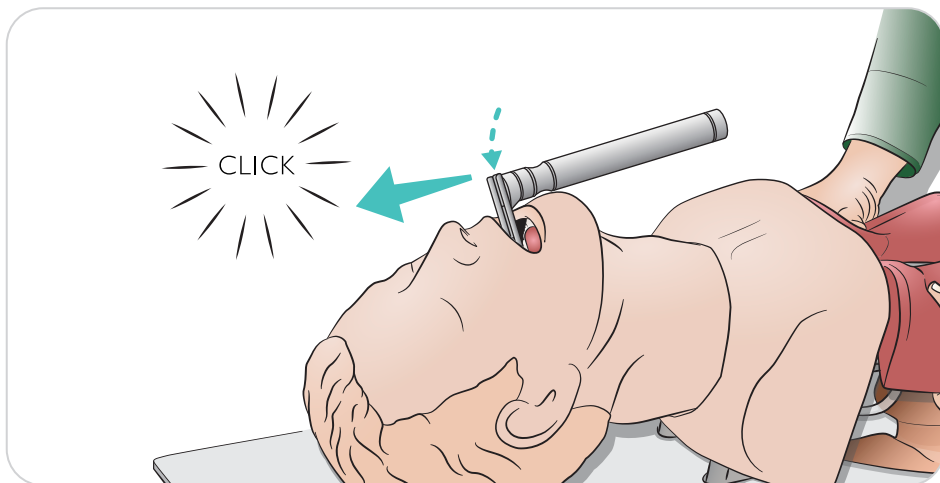


Czyszczenie - płuca


1

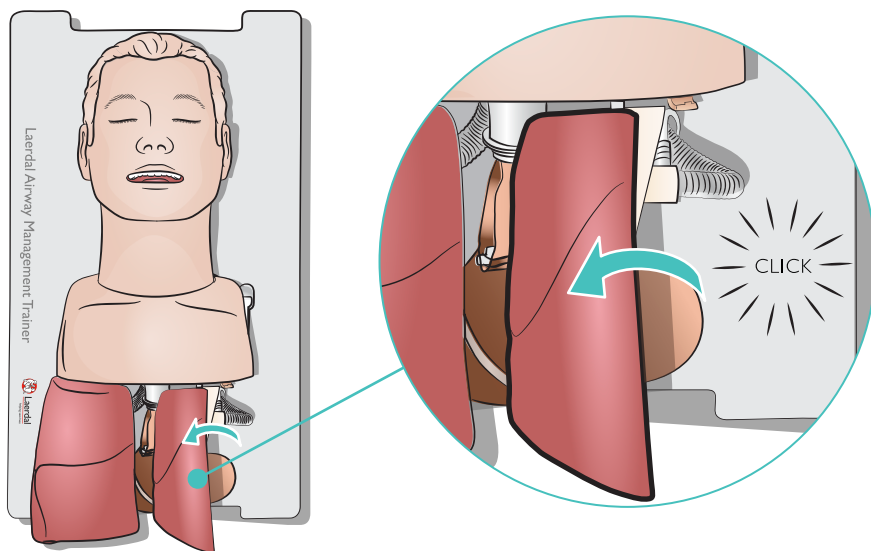


2

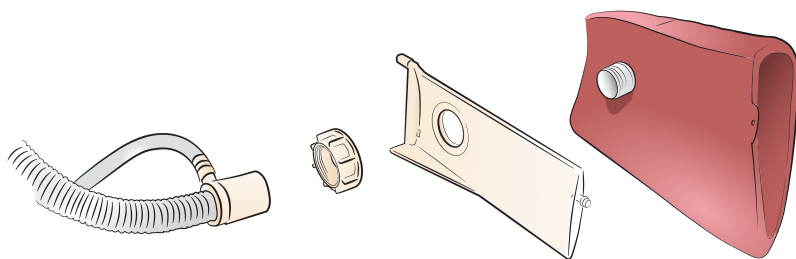


3

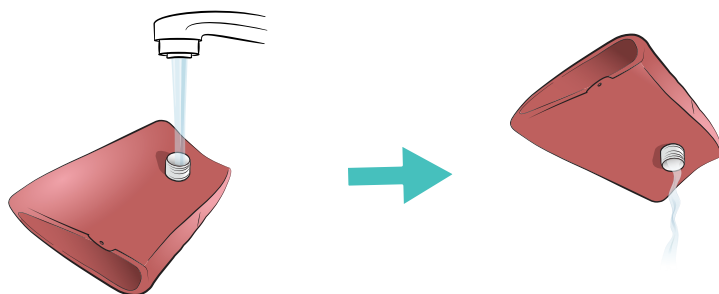


1

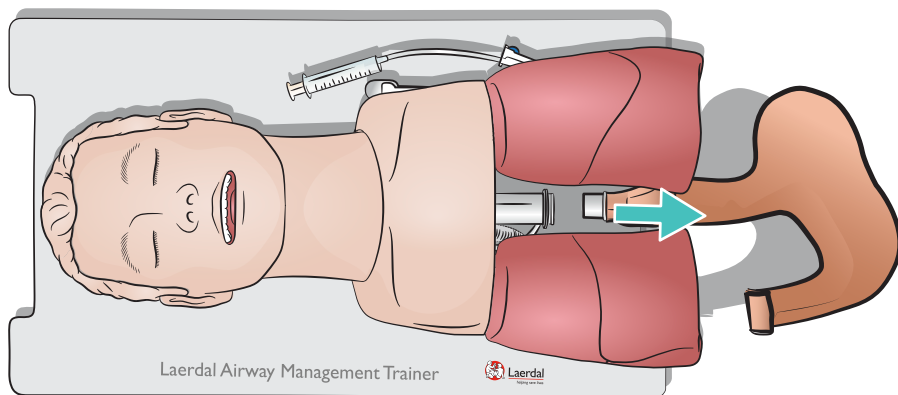

2

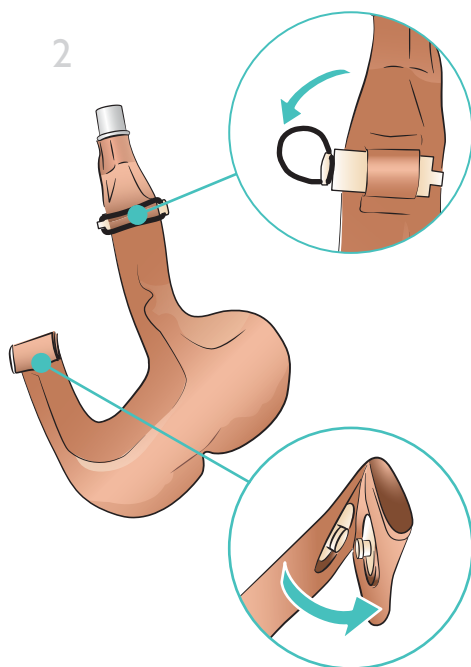


3

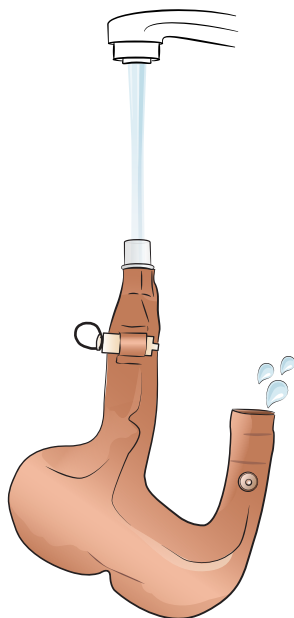






Czyszczenie - drogi oddechowe

1

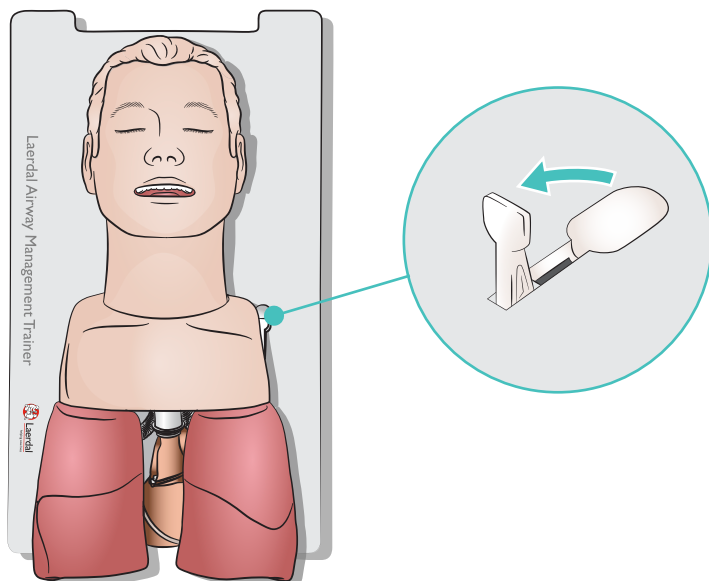

2

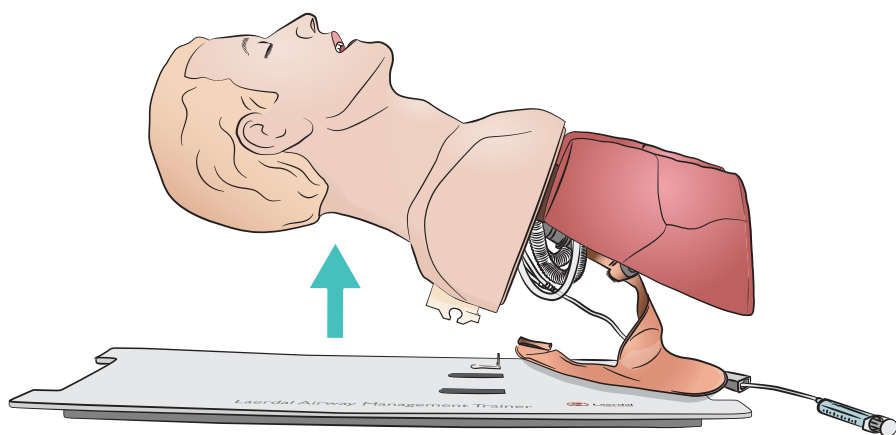

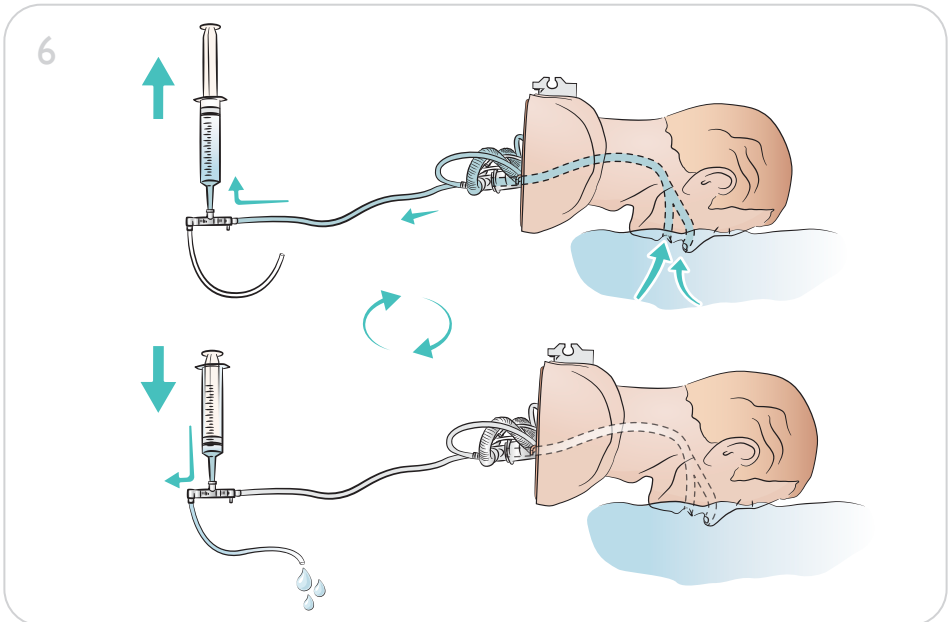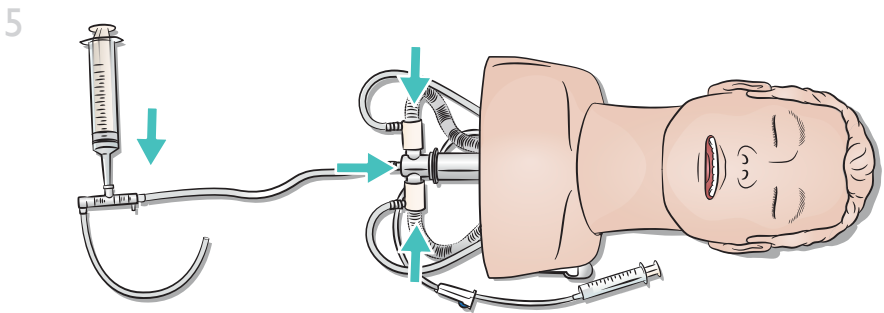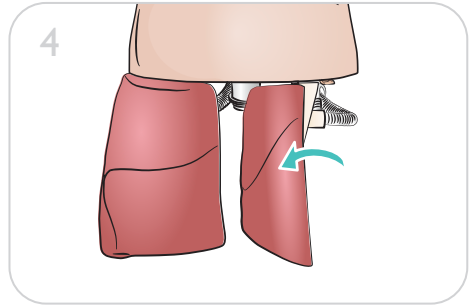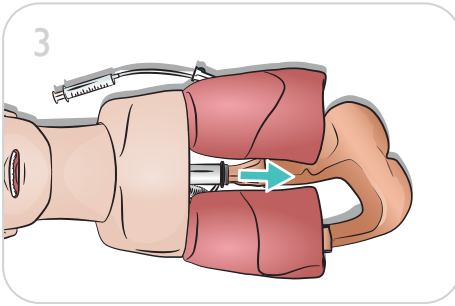

Czyszczenie - ogólne uwagi

PL

- Użyj ciepłej wody z mydłem, aby usunąć skroploną parę i następnie spłucz czystą wodą.
- Płyn dezynfekujący powinien pozostać co najmniej 10 minut, następnie należy spłukać czystą wodą.



Pozostawić do wyschnięcia.

Uwagi:



To może odbarwić manekin:

- *Pigment z długopisu lub pióra*
- *Rękawiczki lateksowe*

© 2019 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Manufactured in the US by: Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in USA

6511 Rev G

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives