

BaXstrap

Deska ortopedyczna



Instrukcja obsługi i serwisowa



Laerdal
helping save lives

1. OPIS URZĄDZENIA.

1.1 Zakres zastosowania

Deska ortopedyczna "BaXstrap" służy szczególnie do unieruchamiania i transportu pacjentów z urazami kręgosłupa. Deska może być także używana do przenoszenia poszkodowanych.


1.2 Opis

Deska ortopedyczna "BaXstrap" wykonana została z pianki polietylenowej, zaś jej zewnętrzna część z polietylenu o dużej gęstości zapewniając niewielką wagę i unoszenie się na wodzie. Konstrukcja deski została wzmocniona prętami z włókna szklanego dając dużą wytrzymałość na obciążenia.

W celu ułatwienia podniesienia deski i transportu pacjenta deskę wyposażono w 14 dużych uchwytów po siedem z obu stron.

12 kołków do zacisków na szybkozłącza (po 6 z każdej strony) służy do mocowania pasów wyposażonych w szybkozłącze.

Pasy wyposażone w "pętlę" mocujemy do odpowiednio przygotowanych 10-ciu uchwytów po pięć z każdej strony.

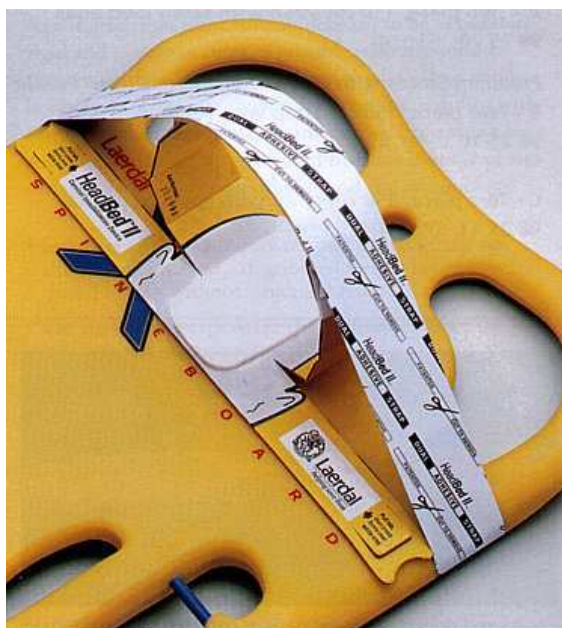

Odpowiednio wyprofilowana deska pozwala na bezpieczne ułożenie i unieruchomienie pacjenta, pasy na szybkie i skuteczne umocowanie pacjenta, komplet zapewnia bezpieczny transport niezależnie od warunków w jakim przyjdzie go wykonać. Konstrukcja deski pozwala na przymocowanie dowolnego uniwersalnego unieruchomienia głowy.

2. WYPOSAŻENIE

Deska ortopedyczna "BaXstrap" może być wyposażona w dwa rodzaje pasów mocujących:

- A - dwuelementowy 150-centymetrowy standardowy pas zakończony pętlą
nr katalogowy 982510 (opak. 4 szt.)
- B - dwuelementowy 150-centymetrowy pas zakończony pętlą
nr katalogowy 982512 (opak. 4 szt.)
- C - dwuelementowy 150-centymetrowy pas zakończony szybkozłączem
nr katalogowy 982513 (opak. 4 szt.)



3. DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy 982500

Waga: 6,2 kg

Wymiary: 40 x 183 x 6,5 cm

Uchwyty: 14

Kółki zacisków na szybkozłaczce: 12

Przepuszcza promienie rentgenowskie

Unosi się na wodzie

*Wytrzymałość konstrukcji: niezależne badania laboratoryjne wykazały, że deska ortopedyczna BaXstrap wytrzymuje bez szkody rozłożone obciążenie przekraczające 1100 kg.

4. WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- Deska ortopedyczna "BaXstrap" powinna być położona na płaskim miejscu przed umieszczeniem pacjenta.
- Przed zapięciem klamer pasów należy upewnić się czy koniec "pętli" pasa jest dobrze umocowany do uchwyty lub czy szybkozłaczce jest dobrze zapięte na kółku.
- Przed transportem pacjenta należy upewnić się czy jest on prawidłowo* zabezpieczony.
- Deska może być używana w różnych warunkach pogodowych; odporna jest na deszcz, śnieg, słońce, wodę, kurz, piasek a także na wydzieliny ustrojowe.
- Deskę należy czyścić przy użyciu gąbki, mydła i ciepłej wody lub domowych środków czyszczących.
- Dezynfekcja – dezynfekcje należy wykonać przemywając deskę spirytusem lub środkami dezynfekującymi dopuszczonymi do stosowania z tworzywami.

- Zaleca się magazynowanie desek w pozycji leżącej kładąc jedną na drugą w celu zaoszczędzenia powierzchni magazynowej.



*Techniki mocowania pacjenta należą do standardów postępowania medycznego.

5. GWARANCJA

Producent udziela 1 roku gwarancji (od daty zakupu) obejmującej braki materiałowe lub błędy fabryczne urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje:

- Mechanicznego uszkodzenia spowodowanego używaniem sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem
- Skutków zwykłego zużycia, rozdarć, poplamień i innych drobnych uszkodzeń, które nie zmniejszają walorów użytkowych produktu.
- Uszkodzeń i wad powstałych w wyniku samowolnych napraw, przeróbek, lub zmian konstrukcyjnych.

6. SERWIS

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony jest przez firmę Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6 40-241 Katowice

Deska ortopedyczna „BaXstrap” wraz z kompletem pasów składa się z kilku głównych elementów, gdzie poszczególne pasy są częściami wymiennymi i mogą być przedmiotem zabiegów serwisowych dokonywanych na miejscu u użytkownika.

Pasy mocujące można bardzo łatwo zamontować i zdemontować z uchwytów deski dlatego wszelkie naprawy i zabiegi konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika.

W razie uszkodzenia się pasa mocującego można go wymienić na nowy kontaktując się z serwisem lub zamawiając go w firmie Laerdal Medical Poland Sp. z o.o tel: 32/493-70-20