

FANTOM DO NAUKI KONIKOTOMII

261-01001

(C) Copyright Laerdal, Gatesville TX
Nr dokumentu 1001607 wersja A
14 kwiecień 2003

SPIS TREŚCI

Deklaracja jakości	2
Zalecenia producenta	3
Elementy zestawu	4
Nabywane umiejętności	4
Pielęgnowanie i konserwacja	5
Gwarancja	5
Części zamienne	7

Deklaracja jakości

*W konsekwentnym współdziałaniu
pracowników firmy, kierownictwa,
sprzedawców i klientów, tworzymy,
projektujemy, produkujemy
i wprowadzamy na rynek najwyższej
jakości produkty.*

*Chcemy, aby nasze produkty i usługi
były przedmiotem dumy wszystkich
uczestników tego procesu...*

Fantom do symulacji konikotomii 261-01001 to naturalnej wielkości, realistyczna imitacja głowy dorosłego pacjenta. Umożliwia szkolenie personelu medycznego w zakresie przecięcia lub nakłucia więzadła pierścienno-tarczowego krtani.

Jakość konstrukcji i łatwość wymiany poszczególnych części umożliwia, przy odpowiednich zabiegach pielęgnacyjnych i właściwej konserwacji, korzystanie z fantomu w trakcie wielu sesji szkoleniowych.

Zalecenia Producenta:

Zalecana grubość igły do konikotomii – 16 lub 18.

Zalecany rozmiar rurki dotchawiczej do konikotomii – nr 3 lub 4.

Uwagi Instruktora:

Elementy zestawu:

- (1) Fantom głowy do nauki konikotomii
- (1) Tchawica wymienna – sztywna
- (1) Tchawica wymienna – miękka
- (1) Balon płuca
- (1) Taśma jednostronnie przepuszczająca
- (1) Skóra szyi
- (1) Podstawa

Nabywana umiejętność:

- Nacięcie więzadła pierścienno-tarczowego
- Nakłucie więzadła pierścienno-tarczowego

Sposób użycia:

Tchawice są wymienne. Mocowane są do balonu płuca za pomocą taśmy.

- Sztywna, twardsza tchawica posiada wycięcie i nadaje się lepiej do nauki nakłucia więzadła pierścienno-tarczowego. Używanie igły o grubości 16 lub 18 pozwoli wydłużyć czas użytkowania fantomu.
- Miękka tchawica jest bardziej odpowiednia do wykonywania nacięć i łatwiej umieścić w niej rurkę dotchawiczą w rozmiarze 3 lub 4 niż w wersji sztywnej.

Przed wykonaniem nakłucia sztywnej tchawicy zaleca się zaklejenia wycięcia taśmą samoprzylepną lub specjalną taśmą jednostronnie przepuszczalną (dostarczaną przez producenta za dodatkową opłatą). Zapewnia to wymagany opór i realistycznie naśladuje charakterystyczny dźwięk towarzyszący nakłuciu tchawicy.

Zalecenia Producenta:

Nie używać żadnych dostępnych w handlu narzędzi do konikotomii.

Skóry szyi **nie należy pozostawiać** przez długi okres czasu w kontakcie z szyją fantomu. Powoduje to przenikanie plastyku, a w konsekwencji tworzenie się pęcherzy na powłoce modelu i lepkość skóry szyi.

Unikać składowania skóry w nadmiernie nagrzanym pomieszczeniach.

Skórę szyi można używać wielokrotnie, przesuwając ją w prawo i w lewo.

Pielęgnacja i konserwacja:

1. Myć wodą z mydłem; nie zanurzać fantomu, ani jego elementów, w płynach czyszczących lub w wodzie.
2. Fantom należy rozkładać jedynie na czystej powierzchni. Chronić przed poplamieniem pisakami, długopisami, acetonem, jodyną lub innymi podobnymi produktami. Nie kłaść na papierze gazetowym, ani innej zadrukowanej powierzchni.
3. Aby wydłużyć czas użytkowania fantomu, po każdej sesji szkoleniowej należy go czyścić wraz z wszystkimi elementami. Regularnie należy wykonywać dokładne przeglądy.
4. Fantom należy prawidłowo przechowywać w okresach pomiędzy sesjami szkoleniowymi.

Gwarancja:

Firma Laerdal Medical gwarantuje nabywcom, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od daty zakupu przez pierwotnego użytkownika. W trakcie ustalonego rocznego okresu gwarancji producent, po otrzymaniu od nabywcy produktu z wadami materiałowymi lub wytwórczymi, wraz z pisemną informacją o rodzaju usterki, według własnego uznania naprawi lub wymieni wadliwe części lub cały produkt. Wymiana lub naprawa oryginalnego produktu nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.

Wadliwe produkty wraz z informacją o usterkach można również przesłać autoryzowanemu przedstawicielowi firmy Laerdal, u którego produkt został zakupiony. Obowiązek pokrycia kosztów wszelkich opłat pocztowych, kosztów przesyłki i opłat manipulacyjnych spoczywa wyłącznie na nabywcy.

Firma Laerdal odpowiada za bezpieczne, niezawodne i właściwe działanie swoich produktów jedynie pod warunkiem przestrzegania następujących warunków:

- serwis, naprawy, regulacje lub poprawki mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę Laerdal lub osoby przez nią upoważnione: LMP Sp.z o.o.
- instalacja elektryczna pomieszczenia, w którym produkty są używane odpowiada wymogom dla danego sprzętu;
- produkt jest używany w odpowiedni sposób, ściśle według zaleceń.

Firma Laerdal nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej gwarancji za szkody przypadkowe lub pośrednie, a także w przypadku dokonywania napraw lub zmian przez osoby nieuprawnione, względnie gdy produkt, lub jego część, uległ uszkodzeniu wskutek wypadku lub niewłaściwego stosowania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje baterii, bezpieczników, skutków normalnego zużycia w trakcie eksploatacji, plam, odbarwień lub innych drobnych nieprawidłowości, które nie zakłócają i nie ograniczają działania produktu.

Przepisy prawa niektórych krajów nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub pośrednie, stąd powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą Państwa nie dotyczyć.

Nie udziela się żadnych innych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, odnośnie użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu produktu, jego części i akcesoriów

www.laerdal.pl

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Niżej podane numery części zamiennych dotyczą fantomów o jasnym odcieniu skóry. W sprawie części zamiennych do fantomów o innych odcieniach należy kontaktować się z naszymi przedstawicielami handlowymi.

Nr części:

CM-1301R

CM-1301S

CM-1302

1004063

1000671

BS-2500

9500-20-0003

Opis:

Wymienna tchawica – sztywna

Wymienna tchawica – miękka

Skóra szyi

Taśma jednostronnie

przepuszczalna

Zespół głowy do nauki konikotomii

Podstawa

Balon płuca