

1. ZESTAW ZAWIERA

- UCHWYT ŚCIENNY DO SSAKA LSU
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- SZABLON UMIEJSCOWIENIA OTWORÓW W ŚCIANIE

2. PRZEZNACZENIE

Uchwyt ścienny LSU jest przeznaczony do utrzymania i zasilania ssaka LSU w karetkce, szpitalu lub na stoliku medycznym

Nr kat. 782640 - nie posiada zasilania

3. PRZEGLĄD

- A – Uchwyt blokujący
- B – Płyta górna uchwytu ściennego
- C – Górne otwory na śruby
- D – Złącze zasilania (brak w 782640)
- E – Steering pin
- F – Kaczyki
- G – Dolny otwór na śrubę
- H – Dolna płyta uchwytu ściennego
- I – Bolce naprowadzające
- J – Kabel (brak w 782640)

4. NUMERY KATALOGOWE

- 782600 Uchwyt LSU z przewodem DC, 1.6 m
- 782601 Uchwyt LSU z przewodem DC, 3 m
- 782610 Uchwyt LSU z przewodem AC (US)
- 782620 Uchwyt LSU z przewodem AC (EU)
- 782630 Uchwyt LSU z przewodem AC (UK)
- 782640 Uchwyt LSU bez przewodu zasilającego

5. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU

UCHWYTU ŚCIENNEGO LSU

Proszę skorzystać z załączonego szablonu, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami (szablon w skali 1:1, może być używany bezpośrednio na ścianie podczas montażu uchwytu ściennego).

- Wybierz odpowiednie miejsce w pomieszczeniu z wystarczającą ilością wolnej przestrzeni, na której można zamontować uchwyt ścienny.
- Wybierz elementy mocujące odpowiednie do stabilnego zamocowania uchwytu na wybranej powierzchni montażowej. Śruby muszą mieć odpowiedni rozmiar i wytrzymałość, aby zamocować uchwyt do ściany z siłą większą niż 20 g (500 N / wkręt)
- Wspornik ścienny należy zamontować w pozycji pionowej przy użyciu odpowiednich rozpórek, jeśli jest to konieczne.
- Przyklej szablon do wybranej powierzchni montażowej i wywierć otwory zgodnie z szablonem.
- Częściowo zainstaluj górne śruby [C] (jeśli śruby nie są prawidłowo zamontowane, istnieje ryzyko ich poluzowania).
- Zamontuj wspornik ścienny na 2 śrubach i przesun go w dół, aż zostanie bezpiecznie zamocowany.
- Wkręć śrubę w dolny otwór na śrubę [G] i odkręć górne śruby.
- Nie zaginaj kabla i nie układaj go na ostrych krawędziach.

Uwaga: Zalecamy montaż wspornika ściennego LSU na stałych powierzchniach. Montaż do np. drzwi wahadłowych może generować siły powyżej 20 g.

6. INSTALACJA

- Naprowadź dolne rowki znajdujące się na spodzie ssaka LSU na bolce naprowadzające części uchwytu ściennego [I].
- Unieś uchwyt blokujący [A]
- Osadź LSU na miejscu.
- Opuść uchwyt blokujący, przytrzymując ssak LSU na miejscu. (Przy zamykaniu ruchomych części należy uważać na palce)
Uwaga: Jeśli do opuszczenia uchwytu blokującego potrzebne jest użycie siły:
 - LSU nie jest prawidłowo umieszczony na bolcach naprowadzających lub
 - między modulem LSU a wspornikiem ściennym znajduje się obcy przedmiot, w takim przypadku haczyki mogą nie uchwycić ssaka. Należy wówczas podnieść uchwyt blokujący, przenieść LSU i / lub usunąć obcy przedmiot.
- Upewnij się, że LSU jest bezpiecznie zamocowany. Przy prawidłowym umiejscowieniu uchwyt blokujący [A] jest całkowicie opuszczony nad uchwytem LSU, a dioda LED zasilania zewnętrznego ssaka LSU zapali się (z wyjątkiem uchwytu ściennego 782640 LSU bez kabla).

7. WYCIĄGANIE LSU

- Unieś uchwyt blokujący [A]
- Wyciągnij LSU

8. CZYSZCZENIE

Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych używaj szmatki zwilżonej wodą z łagodnym detergentem.

9. TEMPERATURA

Pracy: od -5°C do +40°C
Przechowywania: od -40°C do +70 °C

10. GWARANCJA

Aby zapoznać się z warunkami, zobacz Globalną gwarancję dostępną na www.laerdal.com

11. SERWIS

Brak części, które można naprawić.


12. ELEMENTY I DEMONTAŻ

Przy wyrzucaniu uchwytu ściennego LSU zalecamy korzystanie z lokalnego protokołu. Uchwyt demontuje się poprzez odkręcenie śrub G i C. Rozmontuj uchwyt i posegreguj elementy zgodnie z poniższą tabel.

Niebieskie plastikowe części	PA z włóknami szklanymi
Żółte plastikowe części	PA z włóknami szklanymi
Etykiety	PC - Plastik
Płyta tylna	Alumini
Płyta mocująca	Stal
Sprężyny	Stal
Sworzeń	Stal
Śruby	Stal
Kable	Kabel (nie występuje w 782640)

Uchwyt ścienny można również dostarczyć do lokalnego przedstawiciela firmy Laerdal Medical w celu demontażu / utylizacji. Laerdal Medical AS nie pobierze żadnej opłaty za demontaż; koszt przesyłki ponosi nadawca.

Uchwyt ścienny do ssaka LSU

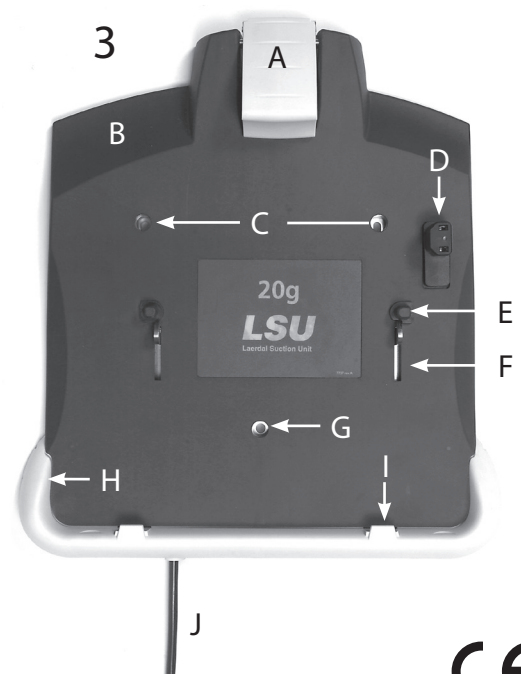

Producent:
Laerdal Medical AS
Stavanger, Norway

Dystrybucja:
Informacje dotyczące dystrybucji opisano w Globalnej Gwarancji i na laerdal.com.



Laerdal
helping save lives

www.laerdal.com

