

NG Tube and Trach Care Simulator

Instrukcja użytkowania

Spis treści

Zalecenia producenta	4
Elementy zestawu	4
Nabywane umiejętności	4
Pielęgnacja tracheotomii	5
Tętno szyjne	5
Zgłębnik nosowo-żołądkowy	5
Zabiegi na drogach oddechowych	5
Pielęgnowanie i konserwacja	6
Części zamienne	7

NG Tube and Trach Care Trainer (375-1001) to wiernie odwzorowany model torsu mężczyzny, realistycznie imitujący pacjenta. Został skonstruowany jako pomoc w szkoleniu personelu medycznego w zakresie podstawowej pielęgnacji tracheotomii, wprowadzania zgłębnika nosowo-żołądkowego i zabiegów na drogach oddechowych.

Jakość konstrukcji manekina i łatwość wymiany poszczególnych elementów umożliwia, przy odpowiednich zabiegach pielęgnacyjnych i właściwej konserwacji, korzystanie z niego w trakcie wielu sesji szkoleniowych.

Zalecenia Producenta:

Rurka tracheotomijna – rozmiar 6

Rurka dotchawicza – rozmiar 7,5

Elementy zestawu:

- (1) Zgłębnik nosowo-żołądkowy
- (1) Bezrękawnik
- (1) Waliza
- (1) Środek nawilżający
- (1) Zespół gruszki
- (1) Broszura z gwarancją firmy Laerdal
- (1) Instrukcja użytkowania

Nabywane umiejętności:

- Pielęgnacja tracheotomii
- Odsysanie tchawicy
- Wprowadzanie i usuwanie zgłębnika nosowo-żołądkowego
- Irygacja, instalacja i monitorowanie zgłębnika nosowo-żołądkowego
- Wprowadzanie i usuwanie zgłębnika do sztucznego karmienia
- Płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik
- Wprowadzanie, usuwanie i pielęgnacja rurki nosowo-jelitowej i przełykowej
- Wprowadzanie zgłębnika i odsysanie odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych
- Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurki tracheotomijnej

Pielęgnacja tracheotomii:

Zalecenia Producenta:

Zaleca się stosowanie rurki tracheotomijnej w rozmiarze 6. Otwór dostosowuje się do innych rozmiarów, jednak rozmiar 6 jest zwykle najbardziej odpowiedni.

Aby przydać realizmu zabiegom pielęgnacji tracheotomii, należy zmieszać:

- ½ szklanki łagodnego płynu do mycia
- ½ szklanki wody

Konsystencja roztworu jest zbliżona do śluzu zwykle spotykanego u pacjentów poddawanych tracheotomii.

Wlać roztwór do modelu płuc. Napętnić płuca do poziomu, przy którym roztwór może być wciągany przez cewnik.

Tętno szyjne:

Tętno szyjne generuje się za pomocą czerwonej gruszki umieszczonej po prawej stronie, w okolicy pachowej manekina. W trakcie wyczuwania tętna w okolicy szyjnej należy mocno uciskać gruszkę.

Umieszczenie zgłębnika nosowo-żołądkowego

Manekin jest wyposażony w przełyk i zbiornik żołądka do ćwiczeń w umieszczaniu zgłębnika nosowo-żołądkowego i wykonywaniu takich zabiegów, jak płukanie i odżywianie przez zgłębnik.

Przed włożeniem należy zwilżyć zgłębnik silikonem w sprayu lub płynem do mycia.

Zabiegi na drogach oddechowych:

1. Aby ułatwić ćwiczenie, należy spryskać obficie gardło, nozdrza i wszystkie rurki intubacyjne środkiem nawilżającym dostarczonym wraz z manekinem lub mydłem w płynie.
2. Wykonać zabiegi inkubacyjne, zgodnie z lokalnie obowiązującym protokołem szkoleniowym.

UWAGA: Przed umieszczeniem rurek w drogach oddechowych należy wyjąć zatyczkę umieszczoną w szyi.

Zalecenia Producenta:

Można wprowadzać rurki dotchawicze w rozmiarze 8,5, jednak zalecamy stosowanie rozmiaru 7,5, gdyż pozwoli to wydłużyć okres użytkowania manekina.

Pielęgnacja i konserwacja:

1. Myć wodą z mydłem; nie zanurzać manekina w płynach czyszczących, ani w wodzie.
2. Manekin należy rozkładać jedynie na czystej powierzchni. Chronić przed poplamieniem pisakami, długopisami, acetonem, jodyną lub innymi podobnymi produktami. Nie kłaść na papierze gazetowym, ani innej zadrukowanej powierzchni.
3. Aby wydłużyć czas użytkowania manekina, po każdej sesji szkoleniowej należy go czyścić, a w regularnych odstępach czasu wykonywać dokładne przeglądy.
4. Po umyciu, wkładki i wszystkie pozostałe elementy zestawu należy odsączyć i dokładnie wysuszyć, a w razie potrzeby zdezynfekować.
5. Przed sesjami szkoleniowymi wskazane jest użycie talku do połączeń przegubowych.
6. Przechowywać prawidłowo w okresach pomiędzy sesjami szkoleniowymi.

Uwagi i ostrzeżenia

Produkt zawiera lateks **Natural Rubber**, który może powodować reakcje alergiczne.

Części zamienne:

Numer produktu:

100-00650

100-00750

300-00650

255-00350

Opis:

Bezrękawnik

Waliza

Środek nawilżający

Zespół gruszki

©Laerdal Medical, Gatesville TX. Wszystkie prawa zastrzeżone
1001633 wersja B
30 października 2006 r.