

SimStart


Instrukcja użytkowania




SimStart to nowe rozwiązanie szkoleniowe do symulacji monitora AED lub defibrylatora na monitorze pacjenta LLEAP firmy Laerdal. Ustawienia AED lub defibrylatora są kontrolowane przez LLEAP lub SimPad PLUS.

Laerdal zaleca uruchomienie SimStart na tablecie z LLEAP. Wybierz AED lub Defibrylator w Monitorze Pacjenta.



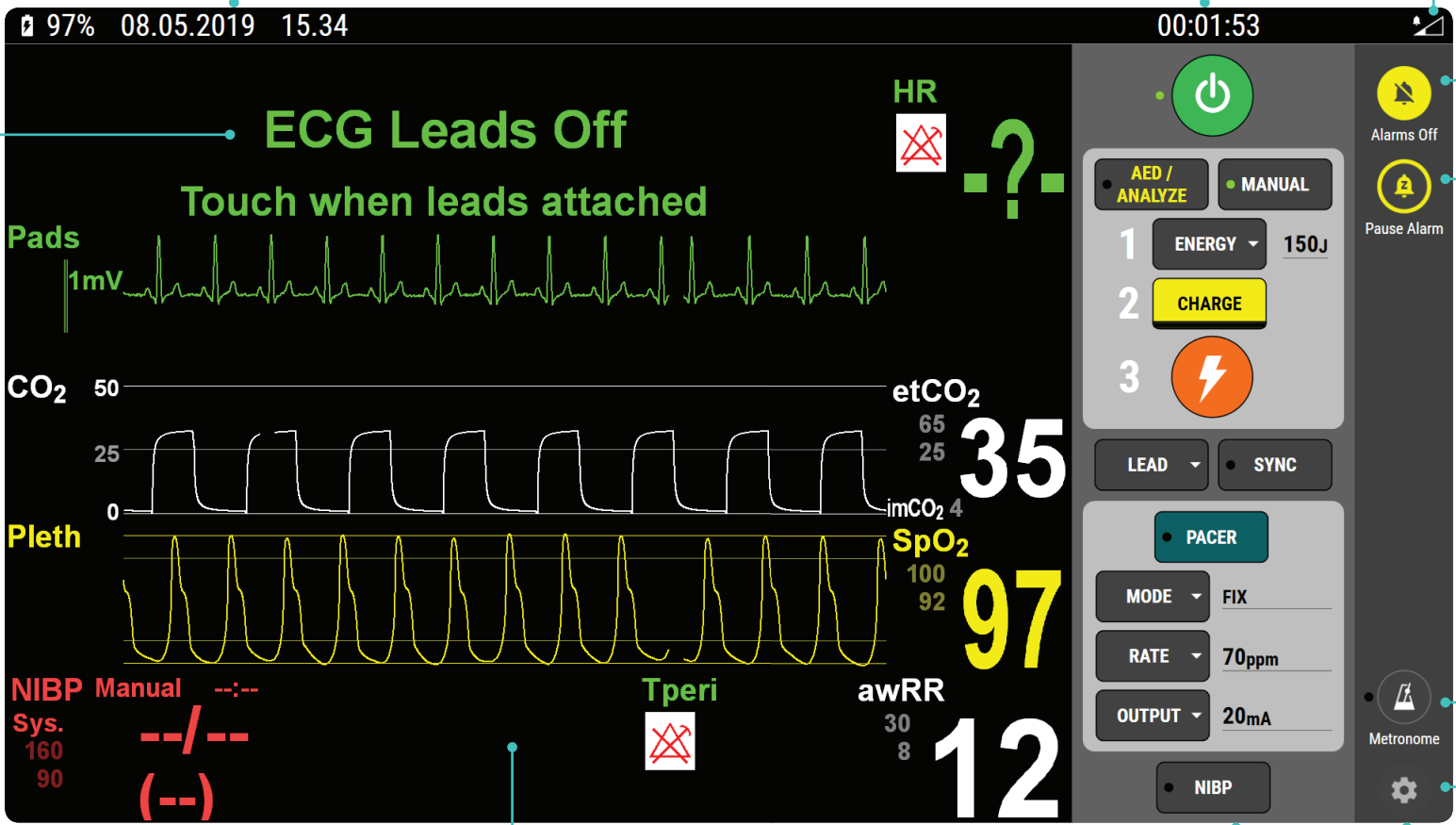

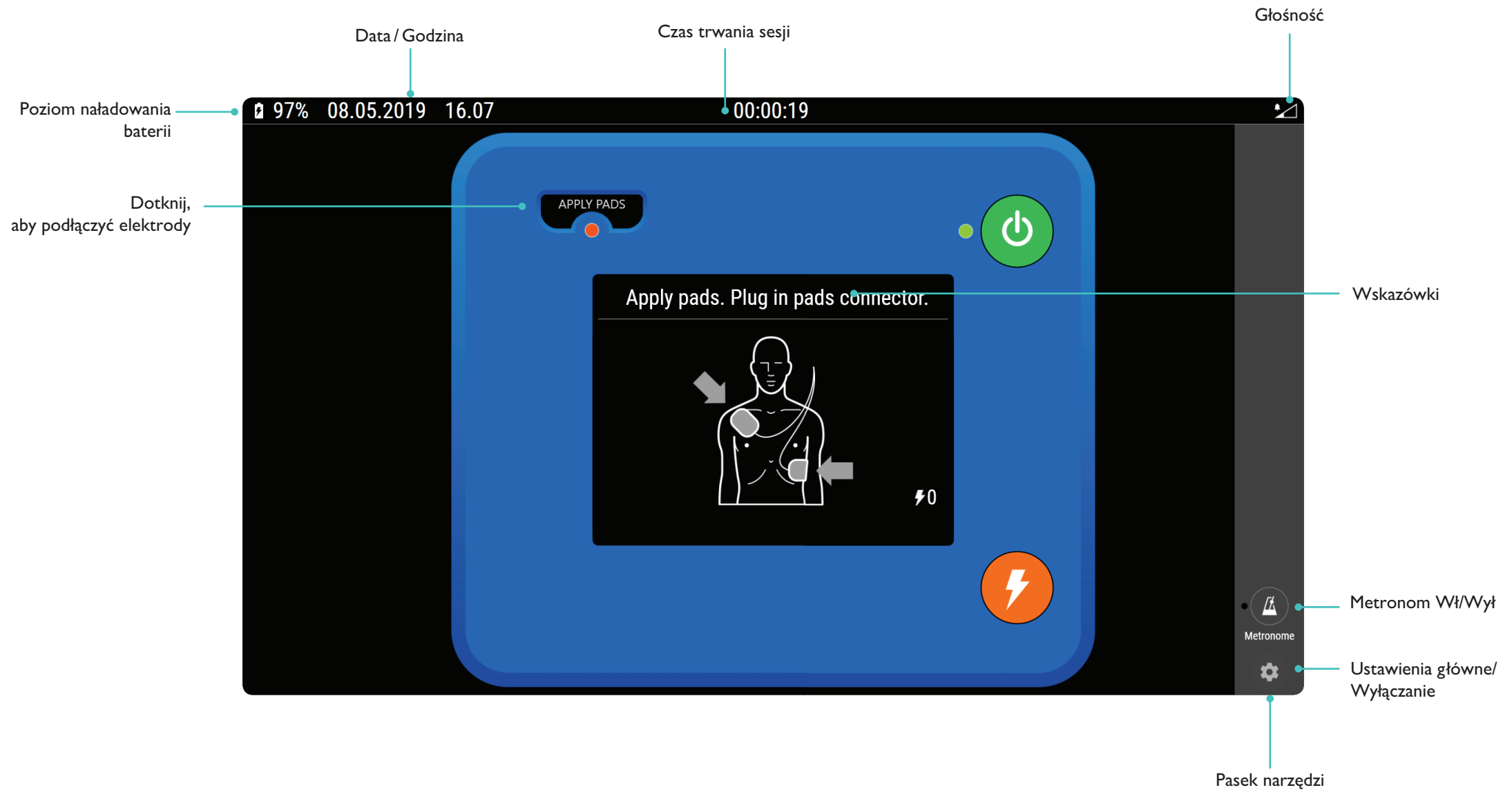

Konfiguracja - SimPad PLUS

Symulacja z użyciem standaryzowanego pacjenta



Symulacja z użyciem symulatora



SimPad PLUS - Konfiguracja

Zmiana ustawień i wyglądu ekranu

What do you want to do?

Manual Mode Automatic Mode Log Viewer

BLS Learner BLS Instructor

SimStore Update Sys

Dotknij, aby zobaczyć scenariusze

Wybierz scenariusz

Select theme

Current theme: Cardiac Arrest

Selecting a new theme will start a new session. Your log will be saved.

Circulation

ACS (Chest Pain)

Cardiac Arrest

Fgfgfddh

Hemorrhage

Respiration

Menu

Cardiac Arrest

Current state Healthy (00:00)

Healthy

VT conscious

VT unconscious

VF

Asystole

Recovery

Sinus HR 80 SpO2 98

RR 12 etCO2 35 BP 120/80 (93) Temp. 37.2 (36.1)

Press 'START' to begin session

START

Menu Manual mode

Current theme: Cardiac Arrest

Manual mode Preferences

Select theme

Save theme as

Patient monitor

Start CPR Demo

End session

Wybierz z menu Monitor Pacjenta

Patient monitor

Change screen

3wave

3waveWithEFM

4wave

AED

BigNum

Monitor-Defibrillator

Monitor-Defibrillator with ABP

NIBP

Wybierz rodzaj monitora

Wł/Wył AED / Defibrillator

Włącz lub wyłącz wybrane parametry

Dostosuj ustawienia

Patient monitor

Change screen

3wave

AED Power

ECG

Pads

ABP

SpO2

etCO2

NIBP

NIBP measurement time: 10 seconds

2 5 20

NIBP measurement sound volume: Max

Off Max

SpO2 Cut Off Limit: 30 %

10 30 55 100

Defib CPR before Analysis: 120

0 60 120 180 240 300


Auto start Metronome

LLEAP - Konfiguracja


Symulacja z użyciem standaryzowanego pacjenta



Symulacja z użyciem symulatora

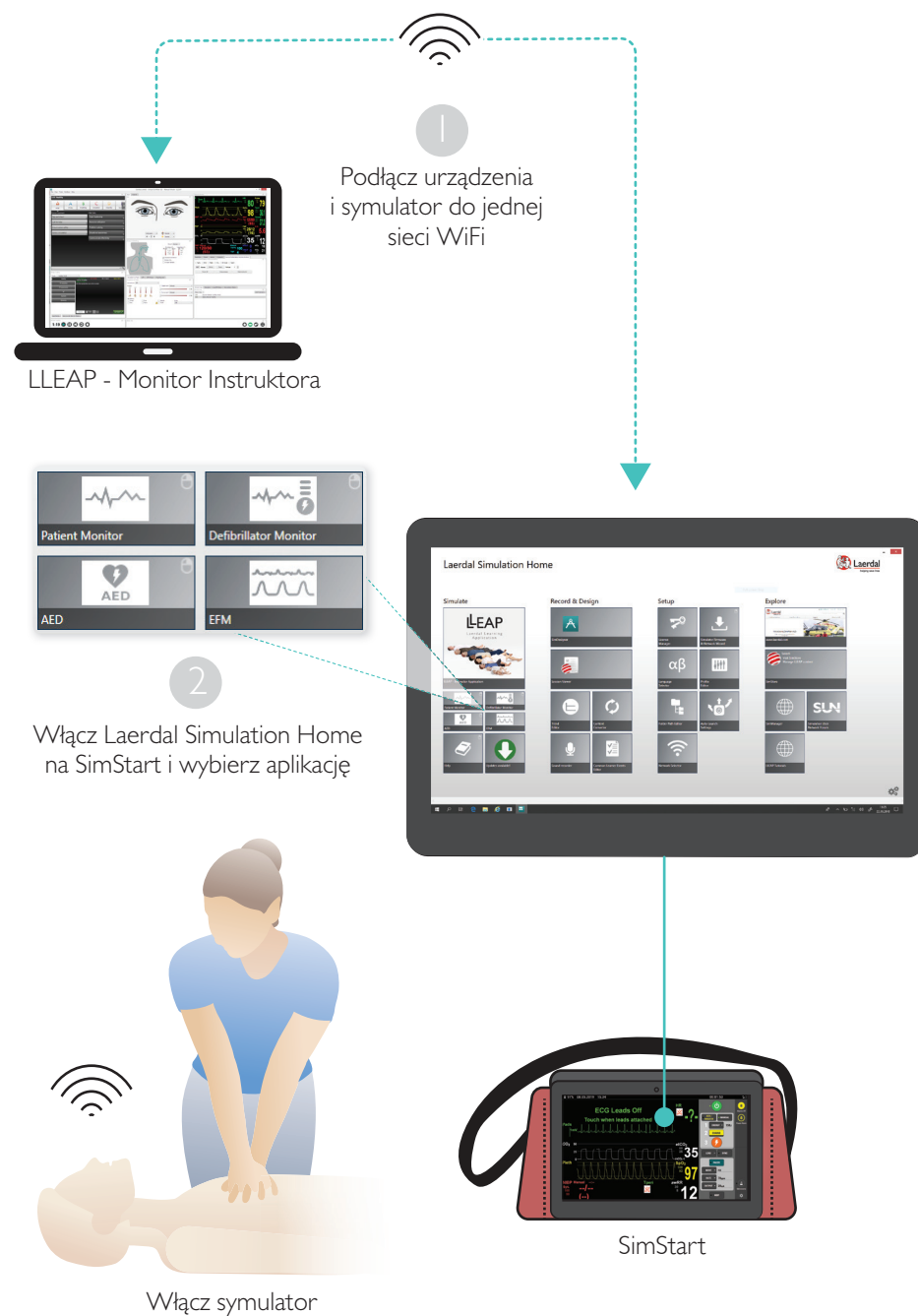


Sterowanie SimStart

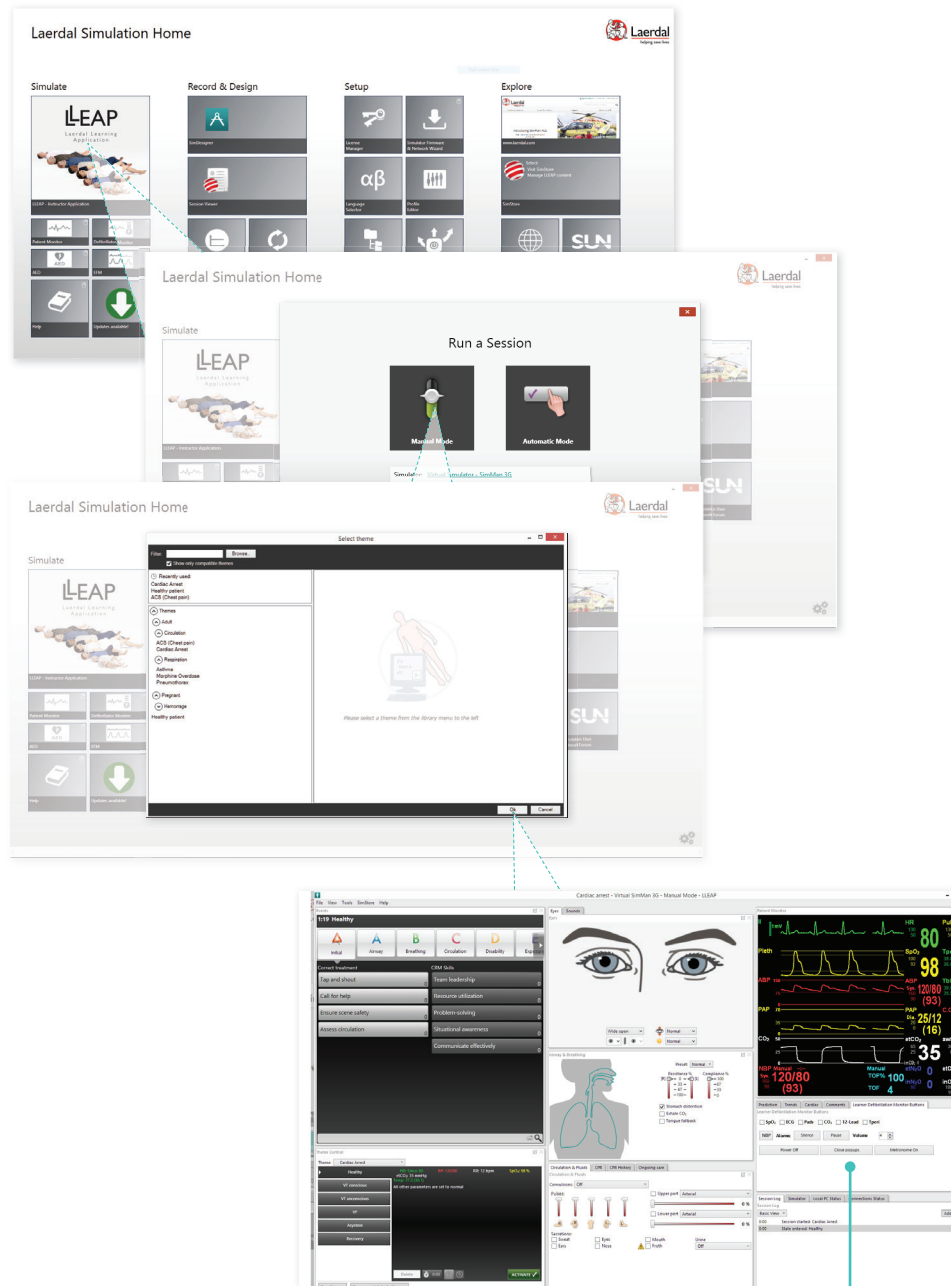


Panel sterowania

Panel sterowania defibrylatora

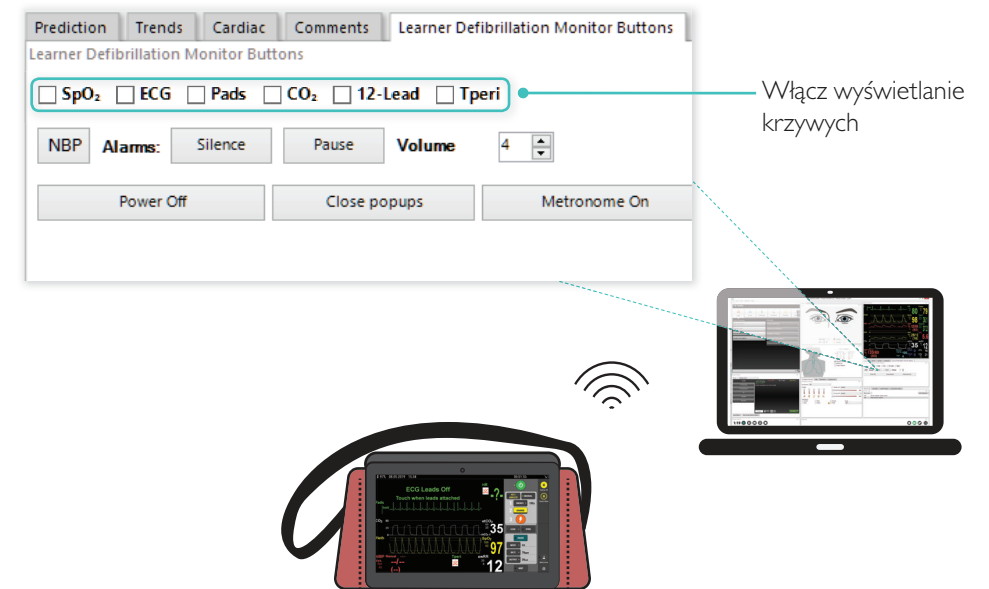

Panel sterowania AED

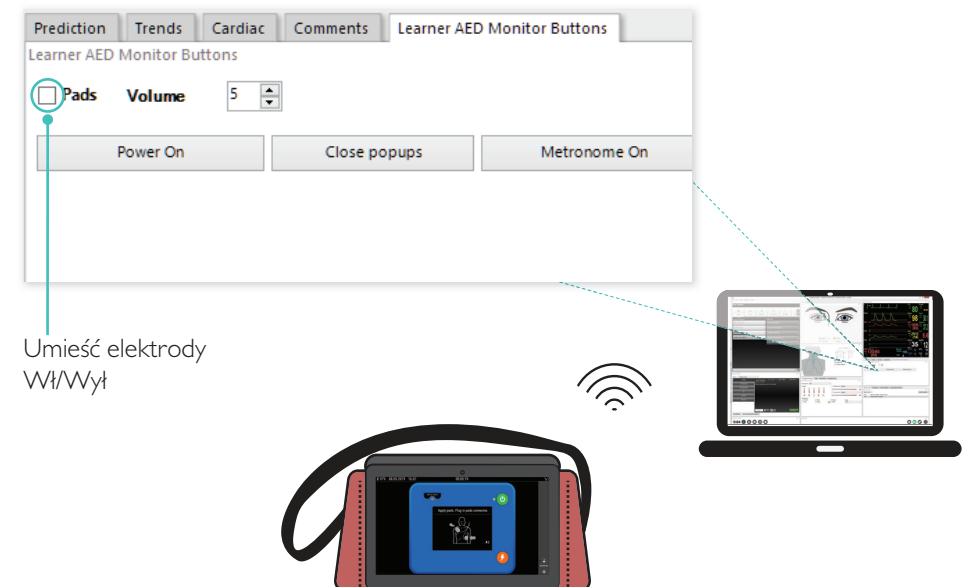

© 2019 Laerdal Medical AS. Wszystkie prawa zastrzeżone.

20-15052 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives