

SkillGuide

Podręcznik użytkownika

Polski



Laerdal

helping save lives

SkillGuide

SkillGuide to urządzenie treningowe, które na bieżąco dostarcza informacji dotyczących przeprowadzanej resuscytacji krążeniowo-ddechowej i przedstawia ich podsumowanie.



www.laerdal.com




Elementy zestawu

Urządzenie SkillGuide i Podręcznik użytkownika.




Podłącz

Podłącz urządzenie SkillGuide do manekina.

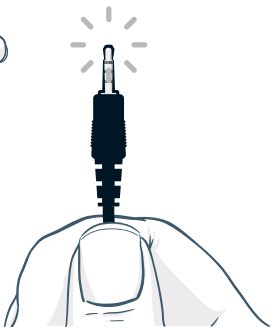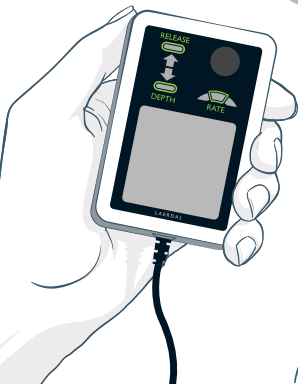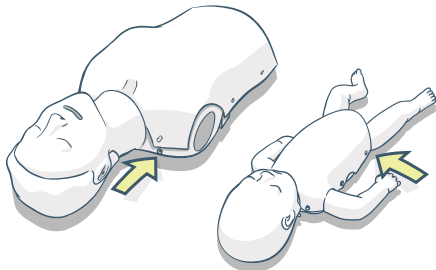

Włączenie

Włącz manekin, aby aktywować SkillGuide.

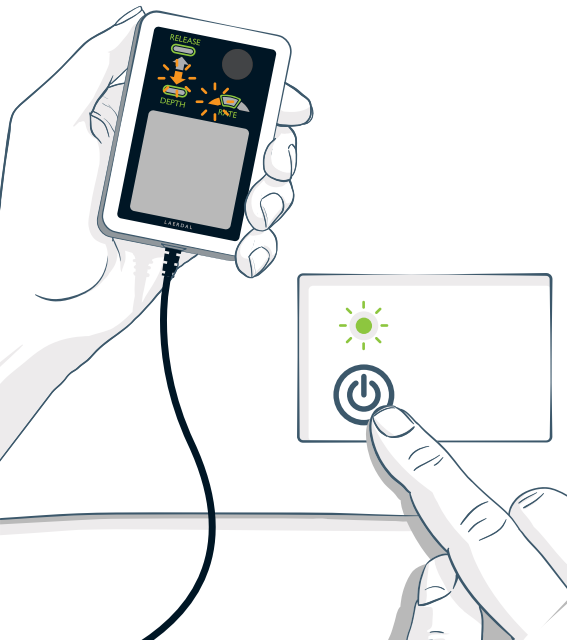

Start


Zegar sesji uruchamiany jest w chwili rozpoczęcia resuscytacji i zatrzymywany po przełączeniu w tryb Podsumowanie. Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez sekundę, aby zresetować.



Przełączenie między trybami


Naciśnij przycisk, aby przełączyć między trybami.

Funkcja jest nieaktywna w przypadku używania QCPR app

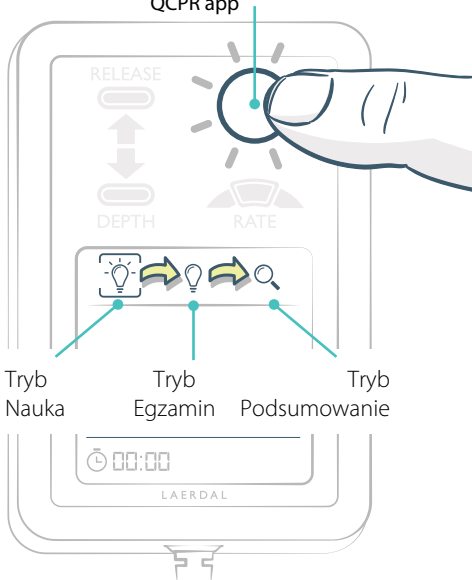


Tryb Nauka

W trybie Nauka diody LED wskazują informacje o uciśnięciach w czasie rzeczywistym. Na ekranie wyświetlany jest czas sesji i niewłaściwe ułożenie rąk (jeśli występuje).

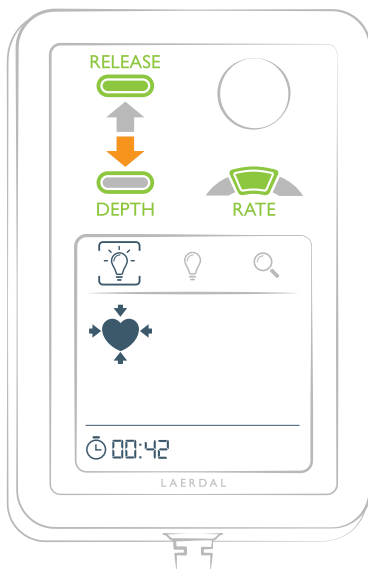

Wskaźnik ucisku

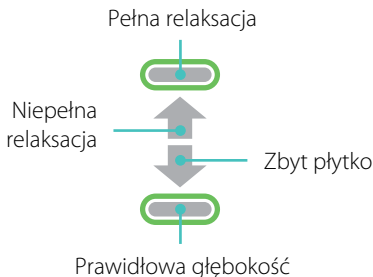


Miernik częstotliwości uciśnień



Tryb Egzamin

W trybie Egzamin nie są wyświetlane informacje o uciśnięciach, tylko zegar sesji.

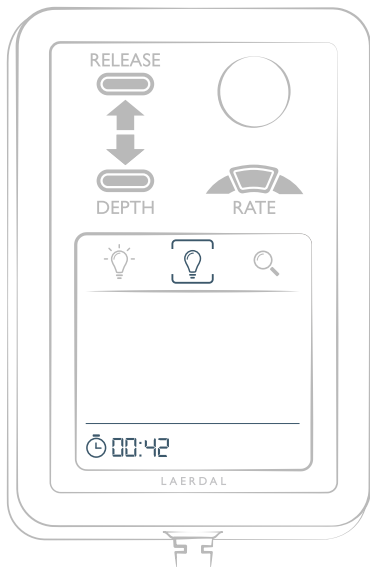


Tryb Podsumowanie

W trybie Podsumowanie na wyświetlaczu i za pomocą diod LED prezentowane są informacje podsumowujące wynik sesji.

Wynik wentylacji

Wynik uciśnień

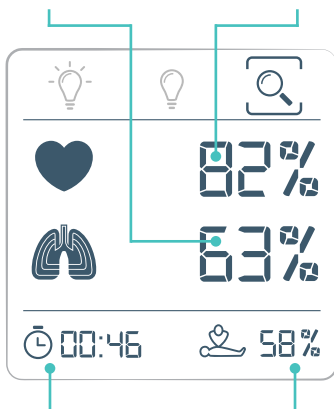

Zegar sesji

Frakcja uciśnień

Tryb Podsumowanie

Wynik uciśnień

Całkowity wynik uciśnień w sesji. Kryteria brane pod uwagę do obliczenia wyniku to: głębokość uciśnień, częstość uciśnień, relaksacja i ułożenie rąk.

W trybie podsumowania diody wskaźnika informują o błędach związanych z głębokością, częstością i relaksacją ucisków wykonanych w trakcie sesji. Miga wskaźnik informujący o najpoważniejszym błędzie.

RELEASE



DEPTH



RATE

Tryb Podsumowanie

Miejsce ułożenia rąk

Symbol serca informuje o prawidłowym lub nieprawidłowym miejscu ułożenia rąk.



Prawidłowe miejsce
ułożenia rąk



Nieprawidłowe
miejsce ułożenia rąk


Tryb Podsumowanie

Wynik wentylacji

Całkowity wynik wentylacji. Wynik ten zależy od objętości i częstości wentylacji.

Objętość wentylacji

Krótką animacją informuje o najbardziej znaczącym błędzie (jeśli wystąpił).

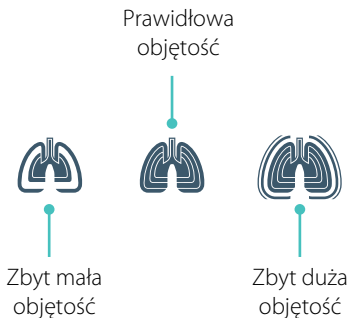

Tryb Podsumowanie



Zegar sesji

Mierzy czas trwania od pierwszego uciśnięcia lub wentylacji do zatrzymania sesji. Sesję można zatrzymać przez przełączenie w tryb Podsumowanie.



Frakcja uciśnień

Procentowa część sesji, podczas której wykonywano uciśnięcia.



Aby uzyskać więcej informacji na temat obliczeń wyniku, odwiedź stronę internetową www.laerdal.com

SkillGuide

Ważne informacje o produkcie



Laerdal

helping save lives

SkillGuide Polski

Wymagania środowiskowe

Temperatura i wilgotność

Temperatura pracy: od 0°C do +40°C, wilgotność <95% wilgotn. wzgl., bez kondensacji.

Temperatura przechowywania i transportu: od -15°C do +50°C

Odporność na wodę i pył

Odporność na pył – klasa IP3X zgodnie z normą IEC60529.

Odporność na wodę – klasa IPX2 zgodnie z normą IEC60529.

Woda i wilgoć

Nie używać urządzenia pod wodą lub w jej pobliżu. Nie obsługiwać mokrymi dłońmi.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem lub polerowaniem należy odłączyć urządzenie SkillGuide od manekina.

Nie należy używać płynnych lub aerozolowych środków czyszczących. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni stosować lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczkę.

Serwis

Nie wolno dokonywać samodzielnego rozmontowywania lub serwisowania urządzenia SkillGuide. Demontaż i serwis mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu.



Oświadczenie zgodności CE

Firma Laerdal Medical AS niniejszym deklaruje, że produkt wyposażony w oznaczenie CE spełnia zasadnicze wymagania i inne istotne przepisy Rady 2004/108/KE dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywę Rady 2011/65/UE dotyczącą ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).



WEEE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

To urządzenie jest opatrzone znakiem zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą odpadów elektronicznych i elektrycznych (WEEE). Zapewniając prawidłową utylizację, przyczyniają się Państwo do zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu. Ten symbol na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt nie może być klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Powinien zatem być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, odzysku i recyklingu tego

produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji lub przedstawicielem firmy Laerdal.

FCC Statement (applies only to USA)

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The use of shielded I/O cables is required when connecting this equipment to any and all optional peripheral or host devices. Failure to do so may violate FCC rules.

OGRANICZONA GWARANCJA

Więcej informacji, patrz Globalna gwarancja firmy Laerdal: www.laerdal.com

Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.

